


Aan de slag met myAbilia en CARY Base




Aan de slag met myAbilia – stap voor stap

1. myAbilia account aanmaken

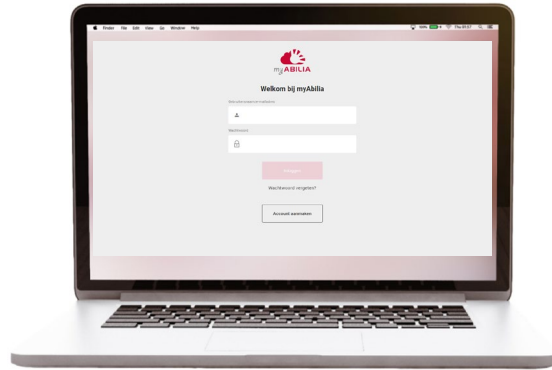


- Ga naar www.myabilia.com op een computer, mobiele telefoon of tablet.*
- Maak een gebruikersaccount aan op myAbilia.*
- Log in op myAbilia.*
- Selecteer de kalendermodule CARY.***
- Importeer de afbeeldingsbibliotheek CARY.***

2. CARY Base verbinden met myAbilia

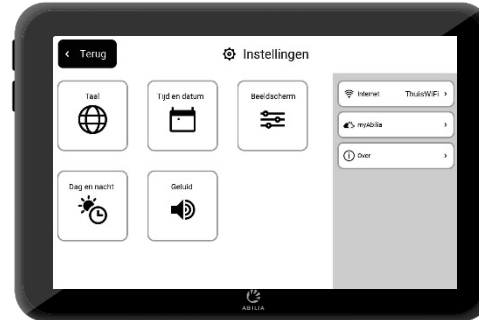

Zorg ervoor dat het toestel is verbonden met Wi-Fi en meld u aan met de gebruikersaccount.

3. Activiteiten toevoegen

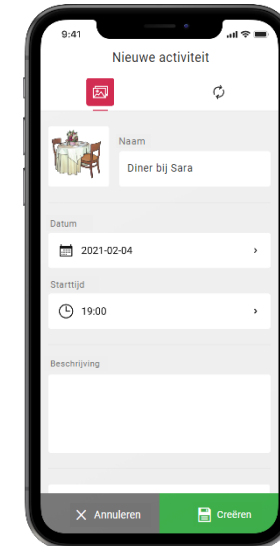


Log in op www.myabilia.com op een computer, mobiele telefoon of tablet.

Gebruik myAbilia om de agenda in CARY Base te beheren.


Als u meer hulp nodig hebt, volg dan de instructies in deze gids.

Maak een gebruikersaccount aan bij myAbilia

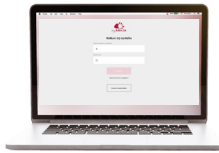

1. Open een webbrowser en ga naar www.myabilia.com.
2. Selecteer **Account aanmaken**.
3. Selecteer accounttype **Gebruiker** en volg de instructies.

www.myabilia.com



Welkom bij myAbilia

Gebrowsersnaam/e-mailadres

Wachtwoord


Inloggen

[Wachtwoord vergeten?](#)

Account aanmaken

The image shows a screenshot of the myAbilia website's login and registration page. The URL 'www.myabilia.com' is at the top. Below it is the myABILIA logo, which consists of a red hand icon and the text 'myABILIA'. The main heading is 'Welkom bij myAbilia'. There are two input fields: one for 'Gebrowsersnaam/e-mailadres' (username/email) with a person icon, and one for 'Wachtwoord' (password) with a lock icon. Below these is a pink 'Inloggen' button. Underneath is a link for 'Wachtwoord vergeten?'. At the bottom, there is a white 'Account aanmaken' button, which is circled in a dark teal oval.

Inloggen bij myAbilia

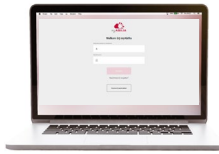

1. Open een webbrowser en ga naar www.myabilia.com.
2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.

The image shows two parts of the myAbilia interface. On the left is the desktop login page, and on the right is the mobile app interface.

Desktop Login Page:


- Logo: myABILIA
- Greeting: Welkom bij myAbilia
- Form fields: Gebruikersnaam/e-mailadres (anna@gmail.com) and Wachtwoord (masked).
- Buttons: Inloggen (red), Wachtwoord vergeten?, Account aanmaken.

Mobile App Interface:


- Header: Anna, Nieuw, Week 34, Acties.
- Calendar: maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29.
- Time slots: 24h, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
- Menu: Kalender, Standaard activiteiten, Standaard timers, Checklist, Afbeeldingenarchief, Notities, Spraakmemo.

An arrow points from the 'Inloggen' button on the desktop page to the mobile app interface.

Selecteer de kalendermodule CARY

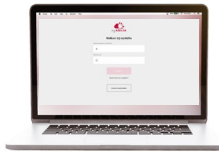



1. Selecteer  en **Mijn profiel** in het menu.
2. Selecteer de tab **Modules** en selecteer de modules bestemd voor CARY:
 - Kalender - CARY
 - Standaardactiviteiten
 - Afbeeldingsbibliotheek
3. Selecteer **Opslaan**.

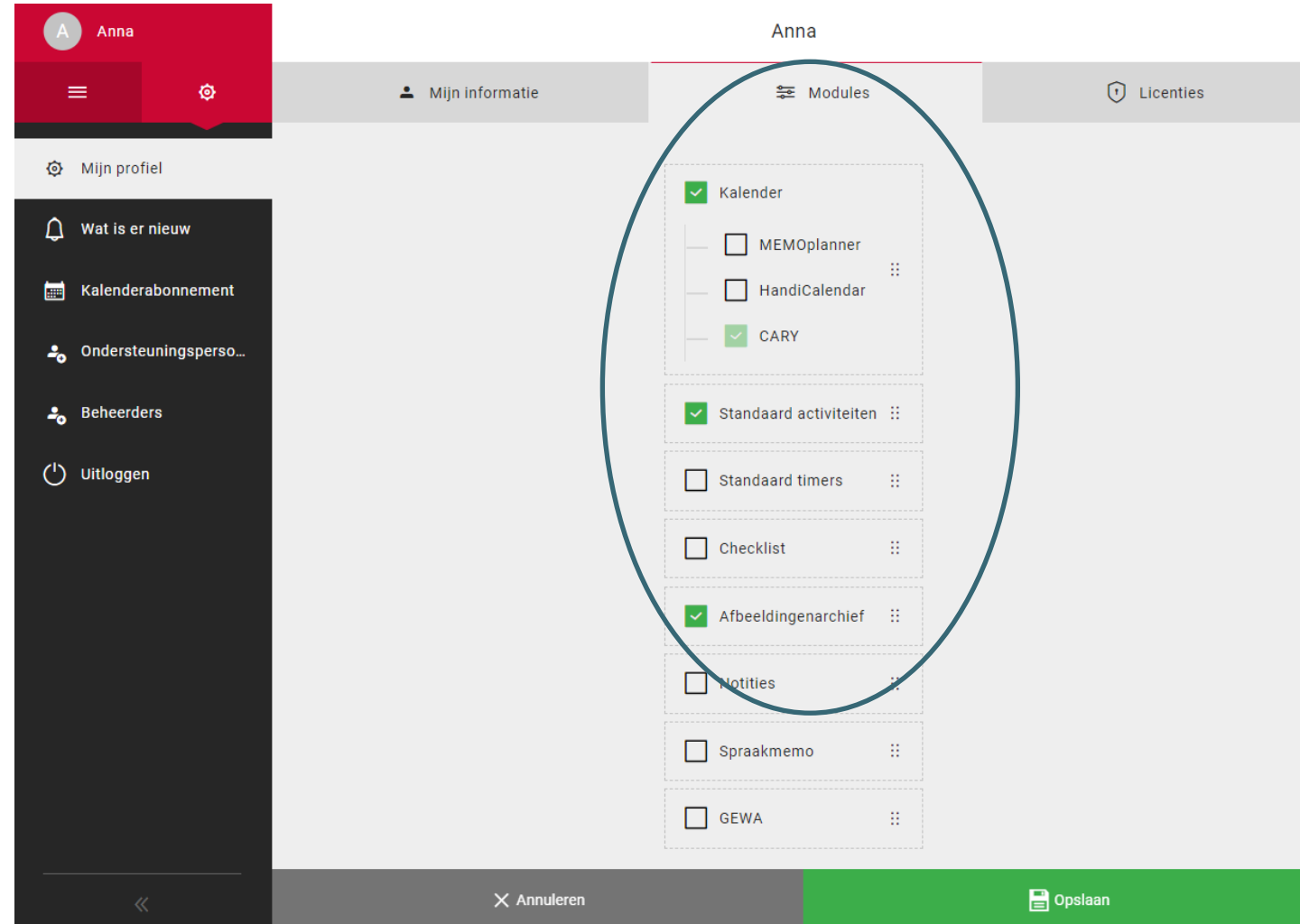


The screenshot displays the user interface for a user named Anna. The top navigation bar includes 'Mijn informatie', 'Modules', and 'Licenties'. The 'Modules' tab is active, showing a list of modules with checkboxes. The 'Kalender' category is expanded, and the 'CARY' module is checked. Other modules include MEMOplanner, HandiCalendar, Standaard activiteiten, Standaard timers, Checklist, Afbeeldingenarchief, Notities, Spraakmemo, and GEWA. At the bottom, there are buttons for 'Annuleren' and 'Opslaan'.

Importeren van het beeldarchief CARY

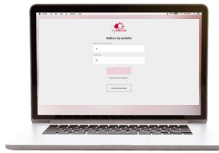

1. Selecteer  en **Afbeeldingenarchief** in het menu.
2. Selecteer **Nieuw** en **Importeren uit afbeeldingsbibliotheek**.
3. Selecteer afbeeldingsbibliotheek **CARY** en **Toevoegen**.

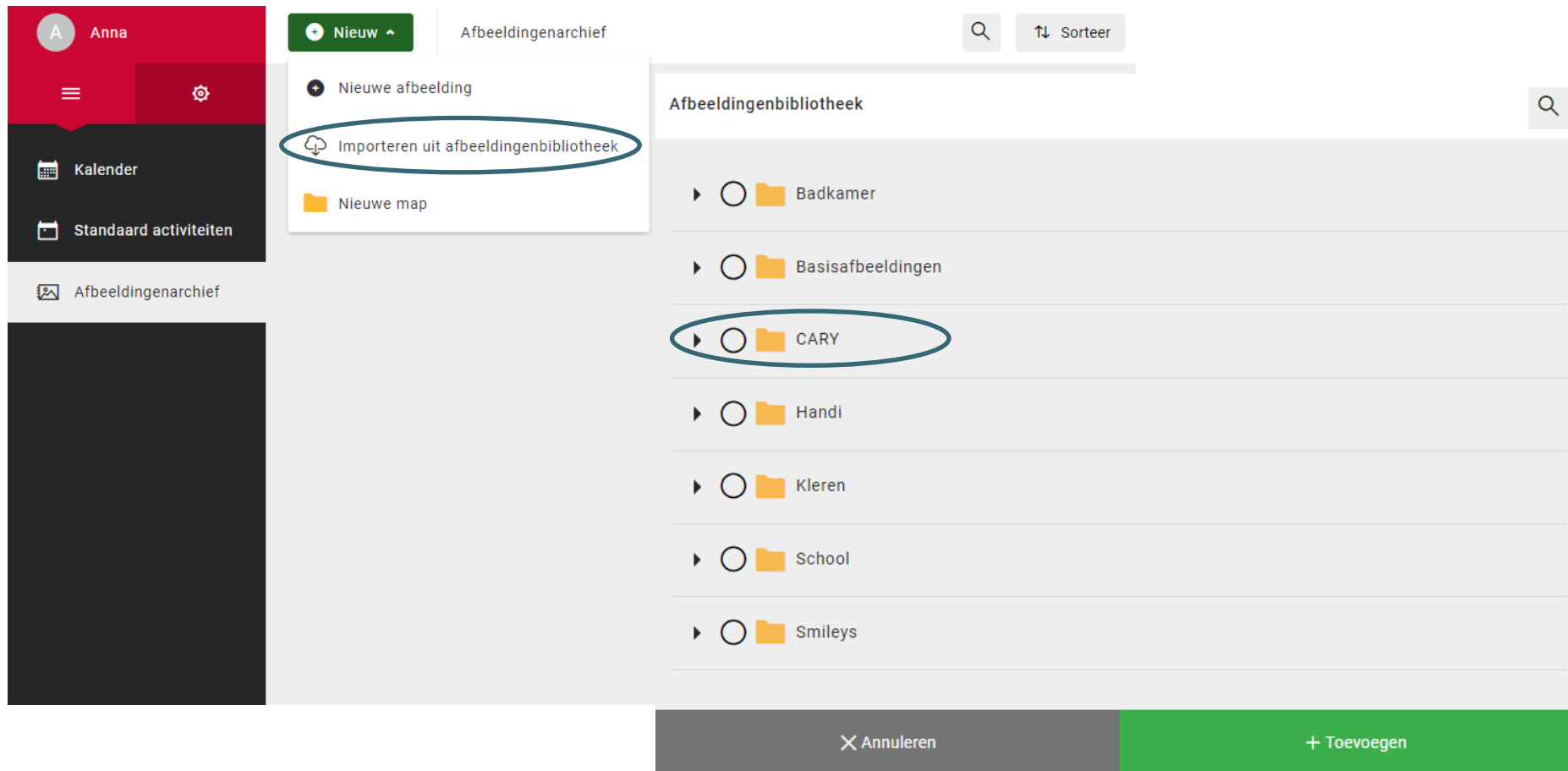

The screenshot shows the ABILIA interface. On the left, a dark sidebar contains a user profile 'Anna' and navigation options: 'Kalender', 'Standaard activiteiten', and 'Afbeeldingenarchief'. The 'Afbeeldingenarchief' option is selected. A 'Nieuw' dropdown menu is open, with 'Importeren uit afbeeldingsbibliotheek' circled in blue. The main area displays a list of folders under 'Afbeeldingsbibliotheek': 'Badkamer', 'Basisafbeeldingen', 'CARY' (circled in blue), 'Handi', 'Kleren', 'School', and 'Smileys'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuleren' (grey) and '+ Toevoegen' (green).


CARY Base verbinden met myAbilia




1. Ga naar het aan/uit-menu en selecteer **Instellingen**.



2. Als het toestel niet met internet is verbonden, selecteert u **Internet** en selecteert u een beschikbaar draadloos netwerk (Wi-Fi).
3. Selecteer **myAbilia**.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.
5. Selecteer **Terug** en dan **Sluiten** om terug te keren naar het hoofdscherm.

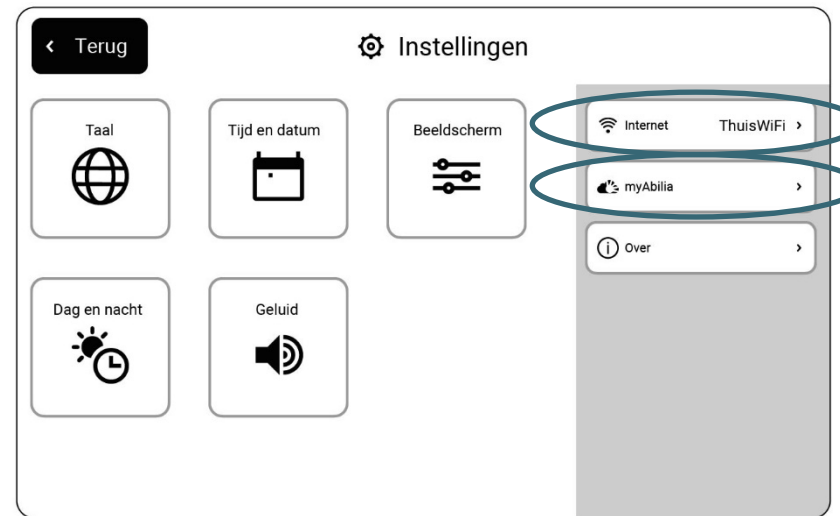

Activiteiten toevoegen

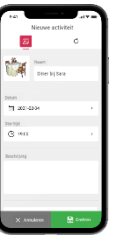

1. Meld u aan op www.myabilia.com met uw gebruikersaccount.
2. Tik direct in de kalender om de **Datum** en **Starttijd** van de activiteit te selecteren.
3. Voer de naam van de activiteit in het veld **Naam** in.
4. Voeg een **Afbeelding** en **Beschrijving** toe aan de activiteit (optioneel).
5. Selecteer om een **bericht** of **tekst** af te spelen wanneer de herinnering wordt weergegeven (optioneel).
6. Selecteer **Creëren** om de activiteit op te slaan.


CARY

Nieuwe activiteit

Naam & Afbeelding

Terugkerend

Afbeelding



Naam

Hond uitlaten

Datum

09-02-2023

Beschrijving

Vergeet plastic zakken niet

Starttijd

17:30

Bericht opnemen

Extra instellingen

Weergeven in dagplan

Tekst afspelen bij alarm

Annuleren

Creëren

Bericht =
Opgenomen geluid of voorlezing van tekst (naam en beschrijving)

Opnieuw afspelen

OK



Hond uitlaten

Vergeet plastic zakken niet


Naam

Beschrijving

Afbeelding =
Foto uit de afbeeldingsbibliotheek of uw eigen foto.

Hoe werkt myAbilia?

Een activiteit toevoegen in CARY Base via myAbilia

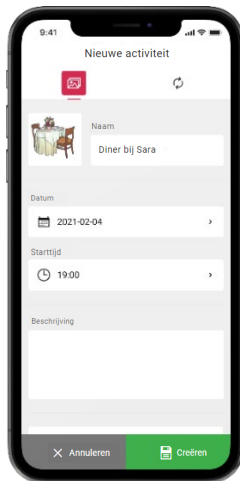

De activiteit wordt weergegeven in CARY Base



- CARY Base wordt bijgewerkt:
- Elke vijf minuten
 - Wanneer u op Kalender tikt