

# MEMO Dayboard

## Handleiding

Art. nr: 508820 508825




# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
Over MEMO Dayboard .....	4
Beoogd doeleind .....	4
Over dit document .....	5
<b>Overzicht van MEMO Dayboard</b> .....	<b>6</b>
Meegeleverde onderdelen .....	6
Meegeleverde documenten .....	6
<b>Ga aan de slag met MEMO Dayboard</b> .....	<b>7</b>
Bevestig MEMO Dayboard aan een muur .....	7
Start MEMO Dayboard .....	8
Stel datum en tijd in .....	8
Pas MEMO Dayboard aan .....	8
<b>Gebruik MEMO Dayboard</b> .....	<b>9</b>
Geef datum, dag van de week en maand weer .....	10
Geef gebeurtenissen en activiteiten weer .....	10
Alarmen instellen .....	12
Stel vergrendelingsmodus in .....	16
Wijzig helderheidsinstellingen .....	17
Wijzig algemene instellingen .....	18
Pas dag- en nachturen aan .....	19
Verberg delen van het bord .....	19
Verander naar de 12-uursversie .....	20
<b>Onderhoud</b> .....	<b>21</b>
Reinig MEMO Dayboard .....	21
Herstel fabrieksinstellingen .....	21
<b>Opslag en verwijderen</b> .....	<b>21</b>
<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>22</b>
<b>Productspecificaties</b> .....	<b>23</b>
MEMO Dayboard .....	23
Accessoires .....	23
<b>Belangrijke informatie</b> .....	<b>24</b>
<b>Contactgegevens</b> .....	<b>27</b>


# Inleiding

## Over MEMO Dayboard

MEMO Dayboard is een planbord voor diegenen die een visueel overzicht van de dag nodig hebben. Het heeft een magnetisch whiteboard en twee tijdzuilen: een met rode lichten voor de dag en een met blauwe lichten voor de nacht. Door de verschillende kleuren is het makkelijk te zien of het dag of nacht is. Door activiteiten te visualiseren met tekst of afbeeldingen krijgt u een dagoverzicht. Het is mogelijk om alarmen in te stellen.

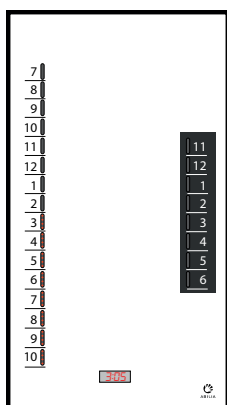

MEMO Dayboard 12u

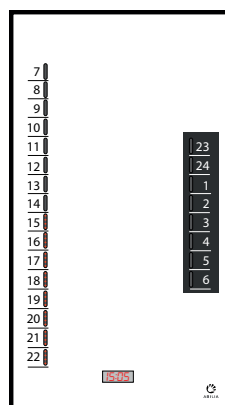

MEMO Dayboard 24u

Er zijn accessoires verkrijgbaar voor MEMO Dayboard, bijvoorbeeld *Tafelstandaard*, *Afsluitbare deur* en *Aanpassingsset* met magneten. Zie *Accessoires* op pagina 23.

## Beoogd doeleind


MEMO Dayboard is een planbord dat bedoeld is voor mensen die een visueel overzicht van de dag en de tijdsgang nodig hebben. Het is geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen die minder goed in staat zijn tijd te hanteren. Bijvoorbeeld personen met ADHD/ADD, autisme, vroegtijdige dementie en milde of matige intellectuele handicap.

MEMO Dayboard is bedoeld voor binnengebruik op school, op het werk, of thuis.

## Over dit document

Deze handleiding is bedoeld voor ondersteuningspersonen. In dit document leert u hoe u MEMO Dayboard kunt instellen en aanpassen aan de behoeften van de gebruiker.

# Overzicht van MEMO Dayboard

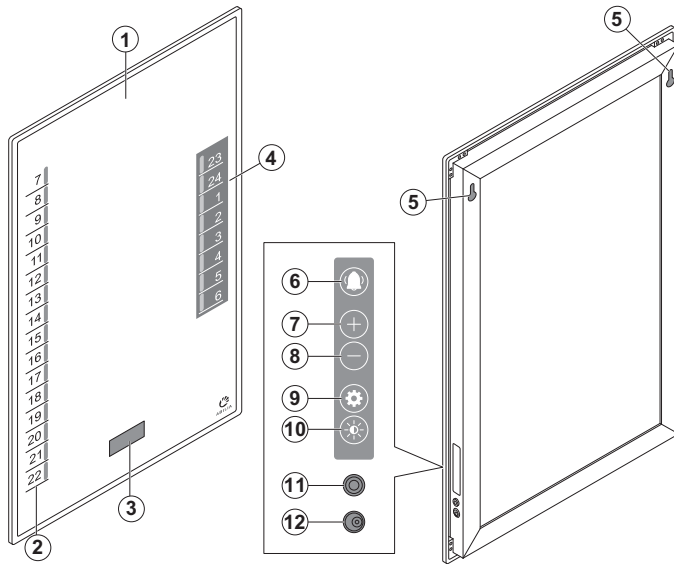

1. Magnetisch whiteboard
2. Tijdzuil Dag
3. Digitale klok
4. Tijdzuil Nacht
5. Bevestigingsgaten

## Zijpaneel:

6. Knop Alarminstellingen
7. Knop +
8. Knop -
9. Knop Algemene instellingen
10. Knop Helderheidsinstellingen
11. Uitgang voor het aansluiten van een bedieningsschakelaar
12. Uitgang voor het aansluiten van de stroomadapter

## Meegeleverde onderdelen

- MEMO Dayboard
- Stroomadapter
- 3 whiteboardpennen
- Microvezeldoek
- Boorgatsjabloon
- Schroeven en muurpluggen


## Meegeleverde documenten

- Handleiding (dit document)
- Beknopte handleiding


# Ga aan de slag met MEMO Dayboard

## Bevestig MEMO Dayboard aan een muur


Zorg er, voordat u MEMO Dayboard aan een muur bevestigt, voor dat u de volgende gereedschappen en meegeleverde onderdelen bij de hand hebt:

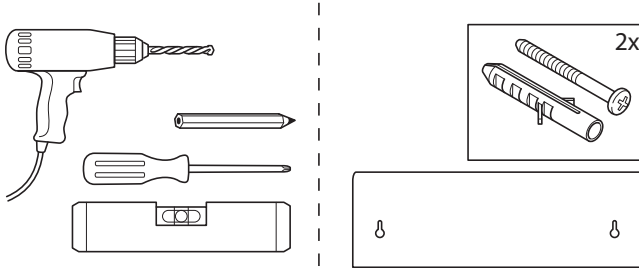


**⚠ WAARSCHUWING:** Bevestig MEMO Dayboard correct. Onjuiste bevestiging kan schade aan het apparaat of letsel veroorzaken.

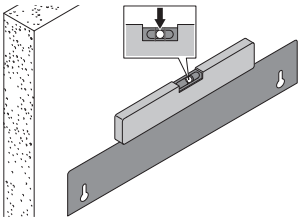


1. Houd het boorgatsjabloon waterpas.

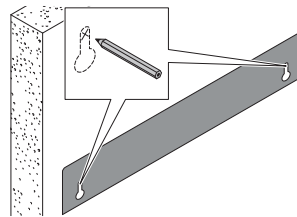


2. Markeer de boorgaten.

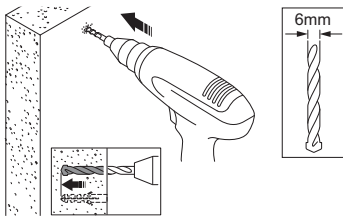

3. Boor de gaten.

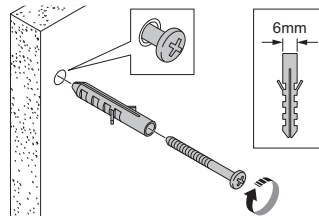

4. Plaats de muurpluggen en draai de schroeven vast.

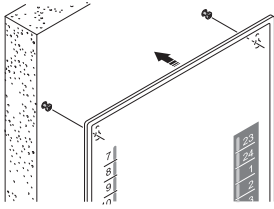

**5.** Hang MEMO Dayboard aan de bevestigingsgaten aan de muur.




*TIP: Als u MEMO Dayboard niet aan een muur wilt hangen, kunt u de tafelstandaard gebruiken, zie Accessoires op pagina 23.*


## Start MEMO Dayboard



**WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de originele stroomadapter die bij MEMO Dayboard is geleverd.

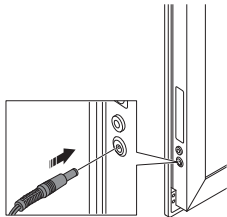

**1.** Sluit het contact aan op MEMO Dayboard.

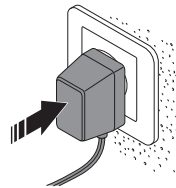

**2.** Sluit de adapter aan op een stopcontact.

## Stel datum en tijd in

Controleer of de datum- en tijdstellingen juist zijn, zie *Wijzig algemene instellingen* op pagina 18.

## Pas MEMO Dayboard aan

Om optimaal gebruik te maken van MEMO Dayboard, raden we u aan om de instellingen aan te passen aan de behoeften van de gebruiker, zie *Gebruik MEMO Dayboard* op pagina 9.



# Gebruik MEMO Dayboard

In sommige van de volgende instructies wordt gebruik gemaakt van de accessoires voor MEMO Dayboard. Zie *Accessoires* op pagina 23 de beschikbare accessoires.



## WAARSCHUWING:

- *Het accessoire Aanpassingsset bevat kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege verstikkingsgevaar. Gebruik indien nodig het accessoire Afsluitbare deur om te zorgen dat de gebruiker niet bij de onderdelen kan.*
- *Gebruik geen scherpe voorwerpen op het whiteboard of op de knoppen op het zijpaneel.*

Werk het planbord elke dag bij:

- *Geef datum, dag van de week en maand weer op pagina 10.*
- *Geef gebeurtenissen en activiteiten weer op pagina 10.*
- *Controleer of alle gewenste alarmen juist zijn ingesteld, zie *Alarmen instellen* op pagina 12.*
- *Stel, indien nodig, MEMO Dayboard in de vergrendelde modus, zie *Stel vergrendelingsmodus in* op pagina 16.*

Voer indien nodig de volgende wijzigingen uit:

- *Wijzig helderheidsinstellingen op pagina 17.*
- *Wijzig datum, tijd, alarmsignaal, alarmlicht en andere algemene instellingen, zie *Wijzig algemene instellingen* op pagina 18.*
- *Pas dag- en nachturen aan op pagina 19.*
- *Verberg delen van het bord die niet nodig zijn, zie *Verberg delen van het bord* op pagina 19.*
- *Verander naar de 12-uursversie op pagina 20.*

## Geef datum, dag van de week en maand weer

U kunt verschillende materialen en accessoires gebruiken om de datum, de dag van de week en de maand weer te geven:

- Gebruik de weekdagmagneten van het accessoire *Aanpassingsset*. De dagkleuren rechts worden in Scandinavië gebruikt als officieuze standaard.
- Gebruik de maandafbeeldingen van het accessoire *Aanpassingsset* en bevestig ze op de zelfklevende magneethouders.
- Zoek een maandkalender op internet en druk deze af in A6-formaat. Plaats de maandkalender in een magnetisch fotovak. Gebruik een whiteboardpen om bijvoorbeeld de huidige datum te markeren of om dagen door te kruisen wanneer u aftelt naar een speciale gebeurtenis.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

## Geef gebeurtenissen en activiteiten weer

### Verduidelijk activiteiten visueel

- Schrijf of teken een activiteit met verschillende whiteboardpennen.
- Illustreer een activiteit met afbeeldingen.

Handi-afbeeldingen kunnen worden afgedrukt via [www.handi.se/print](http://www.handi.se/print). Bevestig de afgedrukte afbeeldingen op de zelfklevende magneethouders van accessoire *Aanpassingsset*.




*TIP: Lamineer de afbeeldingen, dan kunt u ze vaker gebruiken.*

- Maak een activiteit concreter met objecten.  
Gebruik koelkastmagneten of bevestig vaste voorwerpen aan de zelfklevende magneethouders van het accessoire *Aanpassingsset*.


## Gebruik actieketens

Een actieketen helpt bij het uitvoeren van activiteiten in een vaste volgorde. Maak een actieketen met het accessoire *Aanpassingsset* door meerdere afbeeldingen op de zelfklevende strip te bevestigen. Wanneer de activiteit is voltooid, plaatst u een cirkelmagneet over de afbeelding of verplaatst u een pijltjesmagneet naar de volgende stap van de actieketen.

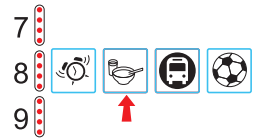


## Koppel de activiteit aan een daadwerkelijke tijd

Om de exacte begintijd van een activiteit aan te geven, gebruikt u de pijlmagneten van het accessoire *Aanpassingsset* of tekent u een stip of streep met de whiteboardpennen.

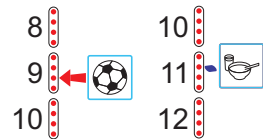

## Verduidelijk hoe lang de activiteit duurt

Om te verduidelijken hoe lang een activiteit duurt, kunt u met de cirkelmagneten van het accessoire *Aanpassingsset* laten zien hoeveel lichtpunten er worden gebruikt, of u kunt de afbeelding even lang maken als de overeenkomstige tijd in de tijdzuil.

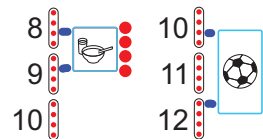

## Verduidelijk dat de dag doorgaat

U kunt op het bord aangeven wanneer de gebruiker vertrekt en wanneer de gebruiker thuiskomt.

U kunt bijvoorbeeld laten zien dat de gebruiker om 10.00 uur naar het dagcentrum vertrekt en om 15.00 uur thuiskomt.

## Laat zien dat de activiteit is beëindigd



U kunt afbeeldingen van het bord verwijderen om aan te geven dat een activiteit is beëindigd of dat een persoon naar huis is gegaan. U kunt ook een alarm instellen op de eindtijd van de activiteit, zie *Stel een nieuw alarm in* op pagina 12.

## Alarmen instellen


**⚠ WAARSCHUWING:** Gebruik MEMO Dayboard niet als enige ondersteuning voor medicatie, medische behandeling of andere belangrijke activiteiten.

- i OPMERKING:**
- Een alarm gaat iedere dag opnieuw af totdat het wordt verwijderd; zie *Verwijder een alarm* op pagina 14.
  - MEMO Dayboard sluit de instellingsmodus automatisch af na 20 seconden. Alle gewijzigde instellingen worden opgeslagen.

### Bekijk alle huidige alarmen

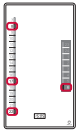
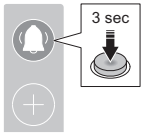


1. Ga naar de instellingsmodus. Alle tijdpunten met een alarm branden.


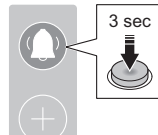


2. Sluit de instellingsmodus af.

### Stel een nieuw alarm in

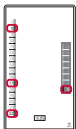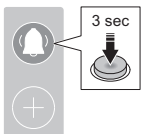


1. Ga naar de instellingsmodus. Alle tijdpunten met een alarm branden.

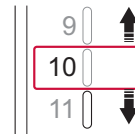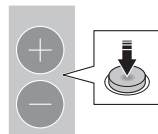


2. Gebruik de knoppen + en – om een tijdstip te selecteren.

**💡 TIP:** Houd de knop + of – ingedrukt om de aanwijzer sneller te verplaatsen.

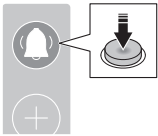


**3.** Stel het alarm in. Het tijdpunt knippert.

Om meer alarmen in te stellen, herhaalt u stap 2 en 3.

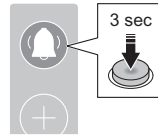

**4.** Sluit de instellingsmodus af.

## Stop een alarm met het zijpaneel

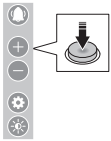

**1.** Druk op een willekeurige knop op het zijpaneel.

Het alarmsignaal stopt na één minuut. De alarmlichten stoppen na 15 minuten.


## Stop een alarm met een bedieningsschakelaar




**WAARSCHUWING:** Gebruik alleen bedieningsschakelaars met een CE-merk.

Om een alarm makkelijker te stoppen kunt u ook een bedieningsschakelaar gebruiken. Er zijn veel knoppen en schakelaars beschikbaar. Neem contact op met uw productdistributeur voor advies, zie [www.abilia.com/en/abilias-world/distributors](http://www.abilia.com/en/abilias-world/distributors).


## Verwijder een alarm

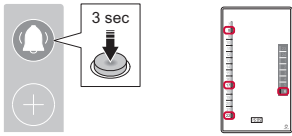


**1.** Ga naar de instellingsmodus. Alle tijdpunten met een alarm branden.

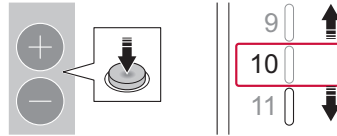


**2.** Gebruik de knoppen + en – om een tijdstip te selecteren.

 *TIP: Houd de knop + of – ingedrukt om de aanwijzer sneller te verplaatsen.*

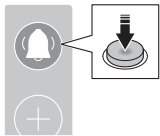


**3.** Verwijder het alarm. Als u meerdere alarmen wilt verwijderen, herhaalt u stap 2 en 3 voordat u de instellingsmodus afsluit.

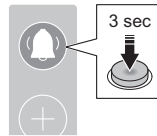


**4.** Sluit de instellingsmodus af.


## Verwijder alle alarmen

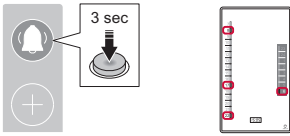

1. Ga naar de instellingsmodus. Alle tijdpunten met een alarm branden.

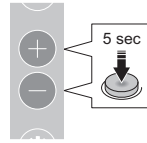

2. Houd de knoppen + en – gelijktijdig 5 seconden ingedrukt om alle alarmen te verwijderen.

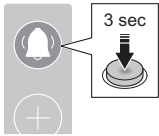

3. Sluit de instellingsmodus af.

## Stel alarminstellingen in

Om alle alarmen in of uit te schakelen of het licht- en geluidssignaal van de alarmen in te stellen, zie *Wijzig algemene instellingen* op pagina 18.

Mogelijke instellingen zijn:

- Hoe het alarmlicht zich moet gedragen: uit, één knipperlicht of de hele tijdzuil knippert.
- Of de alarmen moeten worden in- of uitgeschakeld. Als alarmen alleen voor weekdays gelden, kunt u de alarmen tijdens de weekends uitschakelen.




### VOORBEELD: Een alarm verplaatsen

- *Houd de knop Alarminstellingen 3 seconden ingedrukt.*
- *Gebruik de knoppen + en – om de tijd van het alarm te selecteren dat u wilt verplaatsen.*
- *Druk op de knop Alarminstellingen om het alarm te verwijderen.*
- *Gebruik de knoppen + en – om de tijd van het nieuwe alarm te selecteren.*
- *Druk op de knop Alarminstellingen om het alarm in te stellen.*
- *Houd de knop Alarminstellingen 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus af te sluiten.*


*Resultaat: Het oude alarm is verwijderd en het nieuwe alarm is ingesteld!*

## Stel vergrendelingsmodus in

U kunt het zijpaneel te vergrendelen, zodat er geen instellingen kunnen worden gewijzigd.

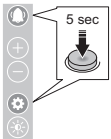

**1.** Om de vergrendelingsmodus in of uit te schakelen, houdt u de instellings- en alarmknoppen ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

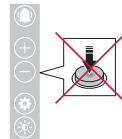

**2.** Wanneer MEMO Dayboard in de vergrendelingsmodus is, is het zijpaneel gedeactiveerd. U kunt nog wel een lopend alarm te stoppen. Wanneer u toch op een knop drukt, toont het display kort "LOC".




## Wijzig helderheidsinstellingen


**i** **OPMERKING:** MEMO Dayboard sluit de instellingsmodus automatisch af na 20 seconden. Alle gewijzigde instellingen worden opgeslagen.

Pas de helderheid aan voor:


- A. Tijdzuil Dag
- B. Tijdzuil Nacht
- C. Digitale klok

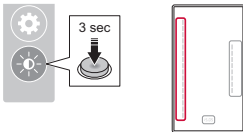


**1.** Ga naar de instellingsmodus.

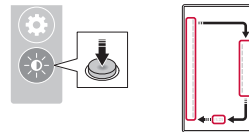

**2.** Gebruik de helderheidsknop om A, B of C te selecteren.

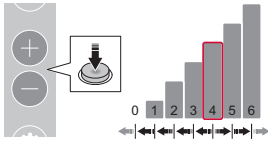


**3.** Gebruik de knoppen + en – om de helderheid te wijzigen. Om meer instellingen in één keer in te stellen, herhaalt u stap 2 en 3 voordat u de instellingsmodus afsluit.

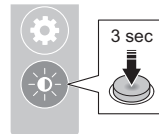

**4.** Sluit de modus voor het instellen van de helderheid af.

## Wijzig algemene instellingen

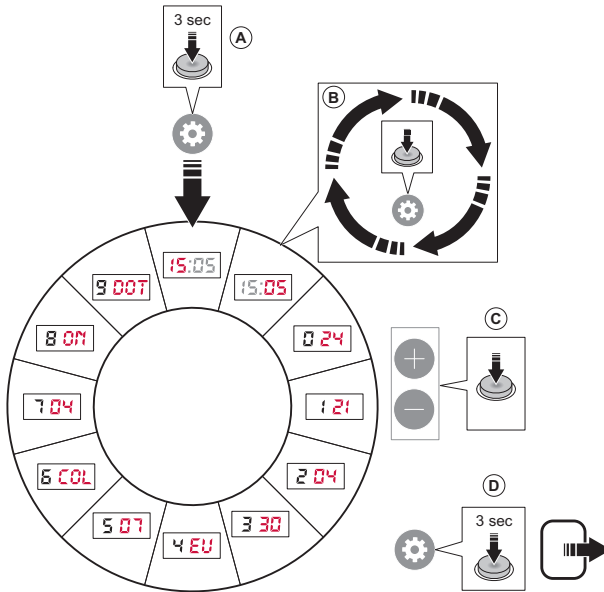

### Stappen

- A. Ga naar de instellingsmodus.
- B. Ga naar de juiste instelling.
- C. Wijzig de instelling.
- D. Instellingen opslaan en afsluiten.

### Instellingen


De standaardwaarde voor elke instelling wordt weergegeven in rode tekst in de afbeelding.

- Uren (00–24)
- Minuten (00–59)
- 0. Urmodus (12 of 24)
- 1. Jaar, laatste twee cijfers (20XX)
- 2. Maand (1–12)
- 3. Dag 1–31
- 4. Zomertijd
  - EU: Europese zomertijd
  - US: Amerikaanse zomertijd
  - OFF: Geen zomertijd

5. Begintijd tijdzuil  
Indien niet 07, dan moet u de getallen van de tijdzuil wijzigen, zie *Pas dag- en nachturen aan* op pagina 19.
6. Weergave tijdzuil  
COL: als tijdzuil  
DOT: als stip
7. Alarmvolume  
0 Geen geluid  
6 Maximumvolume
8. Alle alarmen in- of uitschakelen  
ON: Ingeschakeld  
OFF: Uitgeschakeld
9. Het alarmlicht instellen  
OFF: Lichten uit  
DOT: Eén lampje knippert  
TOG: De hele tijdzuil knippert

## Pas dag- en nachturen aan

De MEMO Dayboard heeft vaste tijden voor dag (07:00 tot 22: 59) en nacht (23: 00 tot 06: 59). Als u dit wilt wijzigen en de dag bijvoorbeeld om 8.00 uur wilt laten beginnen, kunt u hiervoor de magneetstrips gebruiken, zie *Accessoires* op pagina 23.

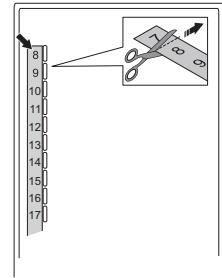


In dat geval moet u ook de begintijd van de tijdzuil aanpassen, zie *Wijzig algemene instellingen* op pagina 18. U hoeft de digitale klok niet aan te passen.

## Verberg delen van het bord

### Verberg delen van de tijdzuil

Als u alleen het gedeelte van de dag wilt weergeven waarop activiteiten plaatsvinden, kunt u de magneetstrip zonder tekst gebruiken om de tijdzuil voor de niet-relevante tijd af te dekken, zie *Accessoires* op pagina 23. Dit kan handig zijn op een school waar de dag eindigt om 15.00 uur of voor een naschoolse club die eindigt om 17.00 uur.

U kunt brede witte tape gebruiken als de nachtkolom moet worden afgedekt.

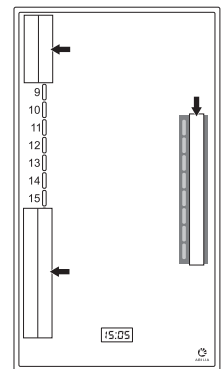

### Verberg nummers naast de tijdzuil


Voor mensen die geen tijdsbegrip hebben, kunnen de cijfers op de MEMO Dayboard verwarrend zijn en hun focus afleiden van de tijdzuil en de gebeurtenissen van de dag. Bedek de nummers met magneetstrips zonder tekst, zie *Accessoires* op pagina 23. Zo blijft het bord zo overzichtelijk mogelijk.

## Verander naar de 12-uursversie

Het is mogelijk om een 24-uursversie van MEMO Dayboard te veranderen in een 12-uursversie door middel van het accessoire *Magneetstrip, 12u*, zie *Accessoires* op pagina 23.

Het kan dan ook gepast zijn om de digitale klok in 12-uursmodus te zetten, *Wijzig algemene instellingen* op pagina 18.

Op dezelfde manier kan een 12-uursversie van MEMO Dayboard worden veranderd in een 24-uursversie.

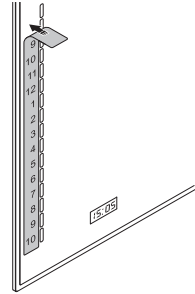

# Onderhoud

## Reinig MEMO Dayboard


Reinig MEMO Dayboard met de meegeleverde microvezeldoek en een beetje water.




*TIP: Is het bord moeilijk schoon te maken? Ga met een whiteboardpen over de moeilijk te verwijderen tekst heen en wacht een minuut voordat u het schoonveegt.*

## Herstel fabrieksinstellingen

Het kan nodig zijn om de fabrieksinstellingen van MEMO Dayboard te herstellen wanneer u het gereedmaakt voor een nieuwe gebruiker of wanneer u problemen oplost. Door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle mogelijk aangebrachte alarmen en instellingswijzigingen verwijderd.

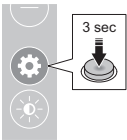

**1.** Houd de knop voor algemene instellingen ingedrukt om naar de instellingsmodus te gaan.

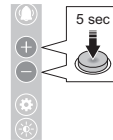

**2.** Houd de knoppen + en – ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

## Opslag en verwijderen

Houd het product binnenshuis op kamertemperatuur en uit de buurt van vocht.



Het product bevat elektrische componenten die moeten worden gerecycled. Breng het product naar een geschikte afvalverwerkingslocatie.

## Problemen oplossen

Als u vragen hebt over de functies of instellingen van het product, neem dan contact op met uw productleverancier of dealer.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De knoppen op het zijpaneel reageren niet	Het product is vergrendeld	Zie <i>Stel vergrendelingsmodus in</i> op pagina 16.
	Het product is defect	Neem contact op met support. <sup>1</sup>
Een ingesteld alarm gaat niet af	Het product is niet aangesloten op een stopcontact	Zie 2.
	Alarmen zijn uitgeschakeld	Zie <i>Alle alarmen in- of uitschakelen in Wijzig algemene instellingen</i> op pagina 18.
	Alarmsignaal en lichteffecten zijn uit	Zie <i>Alarmvolume</i> en <i>Het alarmlicht instellen</i> op pagina 18.
	Het product is defect	Neem contact op met support. <sup>1</sup>
De digitale klok wordt niet getoond	Het product is niet aangesloten op een stopcontact	Zie 2.
	De helderheid van de klok is uit	Zie 3
	Het product is defect.	Neem contact op met support. <sup>1</sup> .
De tijdzuiltijd is niet hetzelfde als de klok	De klok en tijdzuil lopen niet synchroon	Wijzig de begintijd van de tijdzuil, zie <i>Wijzig algemene instellingen</i> op pagina 18.
Een of beide tijdzuilen worden niet getoond	Het product is niet aangesloten op een stopcontact	Zie 2.
	De verlichting van de zuil is uit	Zie 3.
	Het product is defect.	Neem contact op met support. <sup>1</sup>
Het bord wordt niet meer schoon	Het plastic folie moet worden vervangen	Neem contact op met support. <sup>1</sup>
Het product werkt niet goed	Het product is defect	Neem contact op met support. <sup>1</sup> Er kan u gevraagd worden om de fabrieksinstellingen te herstellen, zie <i>Herstel fabrieksinstellingen</i> op pagina 21.

<sup>1</sup>Zie *Contactgegevens* op de een-na-laatste pagina.

<sup>2</sup>Zie de instructies in *Start MEMO Dayboard* op pagina 8.

<sup>3</sup>Zie de instructies in *Helderheidsinstellingen wijzigen* op pagina 17.

---

# Productspecificaties

## MEMO Dayboard

Afmetingen, H × B × D	713 x 392 x 32 mm
Gewicht:	3,8 kg
Stroomvoorziening	9 V DC, 1,1 A
Aansluiting voor schakelaaringang	3,5 mm

## Accessoires

MEMO Dayboard heeft de volgende beschikbare accessoires:

- 508785 Aanpassingsset
- 508786 Accessoireset
- 508787 Magneetstrips, zonder opdruk
- 508788 Magneetstrips, 24u
- 508789 Magneetstrips, 12u
- 508790 Magneetstrips, klok
- 508794 Tafelstandaard
- 508795 Pennenbakje
- 508796 Afsluitbare deur
- 508821 Stroomadapter MEMO Dayboard

Ga voor meer informatie over MEMO Dayboard en de accessoires naar [www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h](http://www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h) of scan de QR-code.




Scan mij!

## Belangrijke informatie

Lees de inhoud van dit document zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

### Veiligheidsdefinities

 **WAARSCHUWING:** Letsel- of overlijdensrisico als de instructies niet worden gevolgd.

 **VOORZICHTIG:** Schaderisico van het product als de instructies niet worden gevolgd.

 **OPMERKING:** Informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

### Veiligheidsinstructies voordat u MEMO Dayboard gebruikt

 Lees deze waarschuwingen voordat u het product gebruikt.

- Gebruik MEMO Dayboard niet als enige ondersteuning voor medicatie, medische behandeling of andere belangrijke activiteiten.
- Gebruik alleen bedieningsschakelaars met een CE-merk.
- Gebruik alleen de originele stroomadapter die bij MEMO Dayboard is geleverd.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen op het whiteboard of op de knoppen op het zijpaneel.
- Bevestig MEMO Dayboard correct. Onjuiste bevestiging kan schade aan het apparaat of letsel veroorzaken.
- Het accessoire *Aanpassingsset* bevat kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege verstikkingsgevaar. Gebruik indien nodig het accessoire *Afsluitbare deur* om te zorgen dat de gebruiker niet bij de onderdelen kan.



## Ernstige incidenten

Als zich een ernstig incident met het product voordoet, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in uw land.

Een incident wordt als ernstig beschouwd als het direct of indirect heeft geleid, zou kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot een van de volgende situaties:

- Overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon.
- De tijdelijke of permanente ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon.
- Een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

## Conformiteit met vereisten voor medische hulpmiddelen

MEMO Dayboard wordt op de markt gebracht als technisch hulpmiddel voor mensen met een beperking en voldoet aan alle benodigde vereisten, voorschriften en richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

## Productaansprakelijkheid

Het product is ontwikkeld en onderworpen aan een risicobeoordeling conform ISO 14971. De gebruikershandleiding en de technische specificaties zijn opgesteld volgens de veiligheidsbeoordelingen die in de risicoanalyse staan. Houd bij het gebruik van het product altijd rekening met de veiligheid. Als het product op een andere manier wordt gebruikt dan waarvoor het is bedoeld, kan dit risico's met zich meebrengen waarvoor Abilia AB geen verantwoordelijkheid neemt. De geschatte levensduur is van toepassing als het product wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik en de onderhoudsinstructies. Abilia AB is niet aansprakelijk voor verlies, schade of gevolgschade als het product is gebruikt of geïnstalleerd op een andere wijze dan in dit document is gespecificeerd. Elke vorm van schade aan of manipulatie van het product maakt de garantie ongeldig en doet de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.



# Contactgegevens

## Zweden

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Zweden  
Telefoon +46 (0)8- 594 694 00 | [support@abilia.se](mailto:support@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

## Noorwegen

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Noorwegen  
Telefoon +47 23 28 94 00 | [support@abilia.no](mailto:support@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

## Verenigd Koninkrijk

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, Verenigd Koninkrijk  
Telefoon +44 (0) 1954 281 210 | [support@abilia.uk](mailto:support@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

## Internationaal

[www.abilia.com/intl/get-products/distributors](http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors)

