
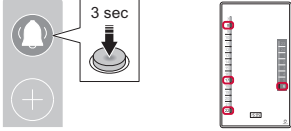


Reinig MEMO Dayboard


Reinig MEMO Dayboard met de meegeleverde microvezeldoek en een beetje water.

 **TIP:** Is het bord moeilijk schoon te maken? Ga met een whiteboardpen over de moeilijk te verwijderen tekst heen en wacht een minuut voordat u het schoonveegt.

Bekijk alle huidige alarmen




1. Ga naar de instellingsmodus.
Alle tijdstippen met een alarm branden.

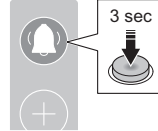


2. Sluit de instellingsmodus af.


Stel een nieuw alarm in

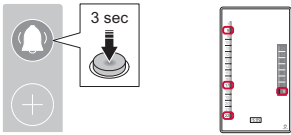


1. Ga naar de instellingsmodus.

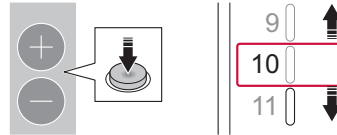

2. Gebruik de knoppen + en – om een tijdstip te selecteren.

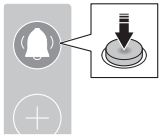


3. Stel het alarm in.

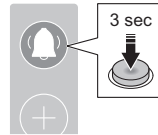


4. Sluit de instellingsmodus af.

Stop een alarm met het zijpaneel

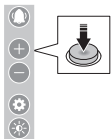


1. Druk op een willekeurige knop op het zijpaneel.
Het alarmsignaal stopt na één minuut. De alarmlichten stoppen na 15 minuten.


Verwijder een alarm

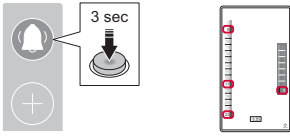


1. Ga naar de instellingsmodus. Alle tijdstippen met een alarm branden.

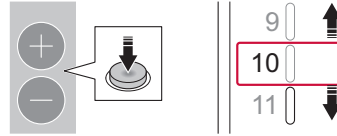

2. Gebruik de knoppen + en – om een tijdstip te selecteren.

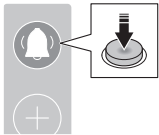


3. Verwijder het alarm.

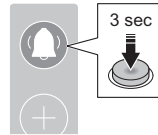

4. Sluit de instellingsmodus af.

Stel vergrendelingsmodus in

U kunt het zijpaneel te vergrendelen, zodat er geen instellingen kunnen worden gewijzigd.

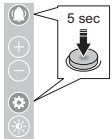

1. Om de vergrendelingsmodus in of uit te schakelen, houdt u de instellings- en alarmknoppen ingedrukt totdat u een piepton hoort.



2. Wanneer MEMO Dayboard in de vergrendelingsmodus is, is het zijpaneel gedeactiveerd. U kunt nog wel een lopend alarm te stoppen. Wanneer u toch op een knop drukt, toont het display kort "LOC".

Meer informatie en toegang tot de volledige handleiding via

www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h of scan de QR-code.



Scan mij!