

# CE EU-conformiteits- verklaring

## Opbouw / type Modulair


Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.  
h.o.d.n. rdgKompagne  
Roessinghsbleekweg 161  
7522 AH Enschede

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid deze opbouw (type Modulair (OM-RGM-DD / OM-RGM-DV / OM-RGM-EDO / OM-RGM-EDB) met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU)
  - Richtlijn Laagspanningsrichtlijn, (2014/35/EU)
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)
  - Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)
    - Richtlijn Machines (2006/42/EG)

Enschede, 2022

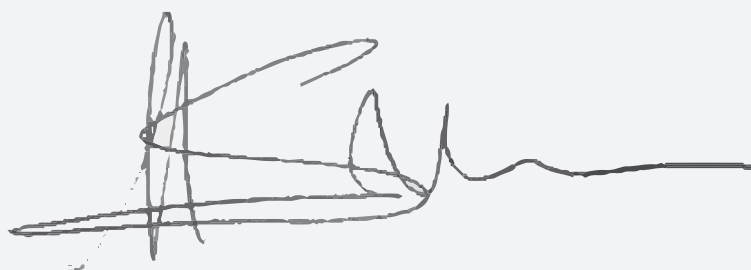

Eric Schonewille  
Algemeen Directeur / CEO



OM-RGM-DD / OM-RGM-DV / OM-RGM-EDO / OM-RGM-EDB



klasse I



# Waarschuwingen

## Opbouw / type Modulair

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door.

*Gebruik de opbouw uitsluitend waar deze voor bedoeld is: het monteren van het communicatiehulpmiddel. Plaats geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering getoond zijn. Demonteer de opbouw niet verder dan tijdens de uitlevering en in de bijgeleverde handleiding getoond is. Door eigen toevoegingen en of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.*

### Monteren en verstellen

Het monteren en verstellen van de opbouw kan eenvoudig uitgevoerd worden met de bijgeleverde instructies. Besteed hierbij extra aandacht aan het volgende:

- Zorg altijd dat het apparaat van de opbouw gehaald is voordat deze gemonteerd of versteld wordt.
- Wees er ten alle tijden op alert dat na het losdraaien van borg- en fixatiepunten onderdelen kunnen verschuiven, loskomen of naar beneden draaien. Houd daarom altijd het vrijgemaakte deel stevig vast tijdens het losmaken van deze delen.
- Let bij het inschuiven dat er geen dingen of ledematen beklemd komen te zitten.

### Wegdraaien

Indien van toepassing: let bij het wegdraaien van het boven en/of onderdeel dat er zich niks in de draaizone van de opbouw bevindt. Let er ook op dat er niks beklemd komt te zitten bij de draaipunten zelf.

### Vervoer

Tijdens het vervoer van de rolstoel (bv. in een auto of bus) moeten zowel het communicatiehulpmiddel als de opbouw van de rolstoel verwijderd zijn.

### Reinigen

Voordat de opbouw gereinigd wordt moet het apparaat verwijderd worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om de opbouw schoon te maken. Vermijd overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht in de schuivende delen.

### Defecten

In geval van storingen of defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in deze handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in het geval van storingen of defecten met betrekking tot de voeding en/of opbouw contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>.

### Apparaat instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van het apparaat voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende het communicatieapparaat.



# Instructies

## Opbouw / type Modulair

### ReaDy Go Mount - Dubbel Draai


Deze flyer laat zien hoe de rolstoelopbouw van rdgKompagne het beste gebruikt kan worden. Van dagelijks gebruik, tot het monteren en instellen van de opbouw.

#### Gebruiken

In het dagelijks gebruik kan de opbouw op de volgende manieren bediend worden.

##### Draaischarnier boven


Voor het wegdraaien van het bovenste deel.

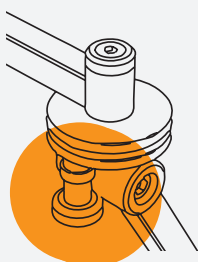

Ontgrendel de beveiliging om dit deel weg te kunnen draaien.

##### Draaischarnier onder


Voor het wegdraaien van de gehele opbouw.

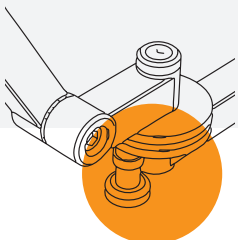

Ontgrendel de beveiliging om dit deel weg te kunnen draaien.

##### Opname apparaat

Voor de precisie afstelling van het apparaat.

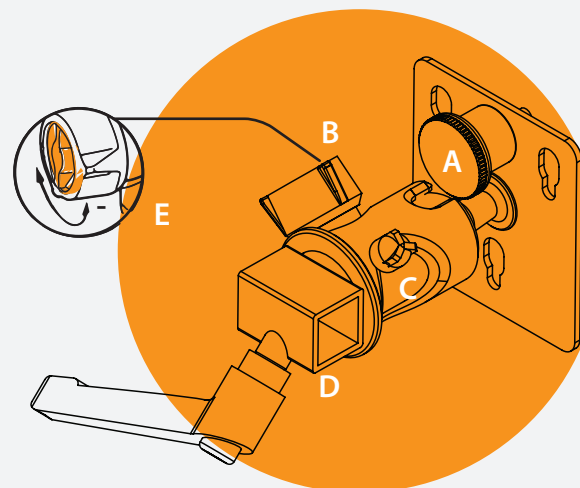

Met het **snelwisselsysteem (A)** kan het apparaat verwijderd worden door de beveiliging te ontgrendelen en het apparaat omhoog te tillen. Voor het bevestigen dienen de drie nokjes van bovenaf in de sleuven geschoven te worden. Controleer altijd op de beveiliging weer vergrendeld is.

Met de **kogelkop (B & C)** kan de hoek van het apparaat ingesteld worden.

**Draaiknop B** ontgrendelt de kogel; bepaal de stroefheid van de kogelbeweging met de **draaischijf E** in de knop zelf.

**Draaiknop C** ontgrendelt het roteren van de gehele kogelkop.

Met de **schuif (D)** kan de zijwaartse afstand ingesteld worden door de hendel los te draaien.




# Instructies


## Opbouw / type Modulair ReaDy Go Mount - Dubbel Draai

### Monteren


De opbouw wordt zo goed mogelijk afgesteld aangeleverd. Het kan echter zijn dat deze afstelling bij eerste montage moet worden gefinetuned. Volg hiervoor onderstaande stappen. Op de achterzijde van deze flyer vind je een uitgebreidere instructie voor de diepte- en hoogte instellingen. Voordat je begint: zorg dat het apparaat niet gemonteerd is.

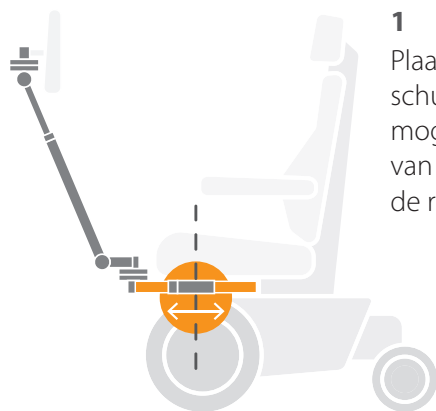

- 1** Plaats het horizontale schuifdeel zoveel mogelijk in het midden van de bevestiging op de rolstoel.

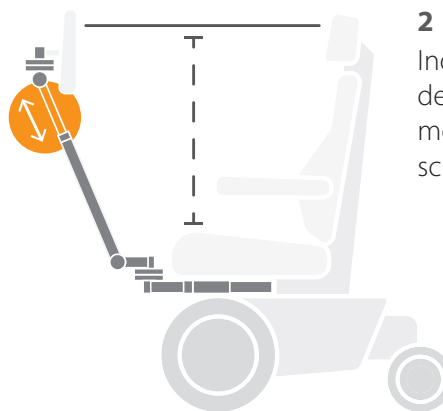

- 2** Indien nodig, stel de hoogte bij met het verticale schuifdeel.

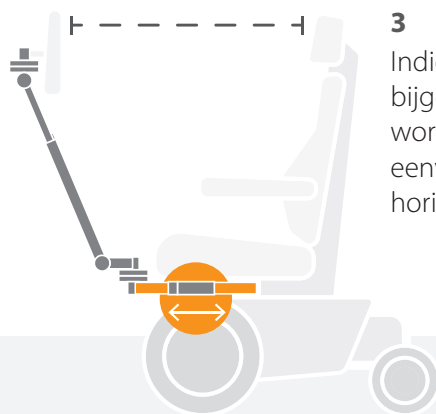

- 3** Indien de diepte bijgesteld moet worden, kan dit eenvoudig met het horizontale schuifdeel.



- 4** Monteer het apparaat en bepaal de zijwaartse positie en hoek met behulp van de kogelkop.




Wellicht moeten stappen 2 t/m 4 herhaald worden om de juiste afstelling te vinden. Ook is het mogelijk dat voor het vinden van de juiste diepte, de kartelscharnieren versteld moeten worden. Kijk hiervoor op de achterzijde van deze flyer.


### Verstellen

#### Hoogte

Voor het aanpassen van de hoogte kan het verticale schuifdeel gebruikt worden.

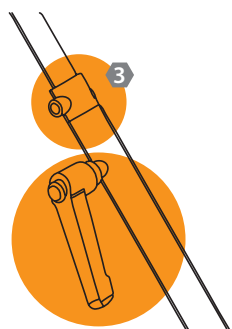

- Draai eerst de stop en vervolgens de hendel voor het schuifdeel los.
- Vind de goede hoogte en draai de hendel goed aan.
- Schuif de stop weer tegen de buitenste koker aan en draai goed vast.

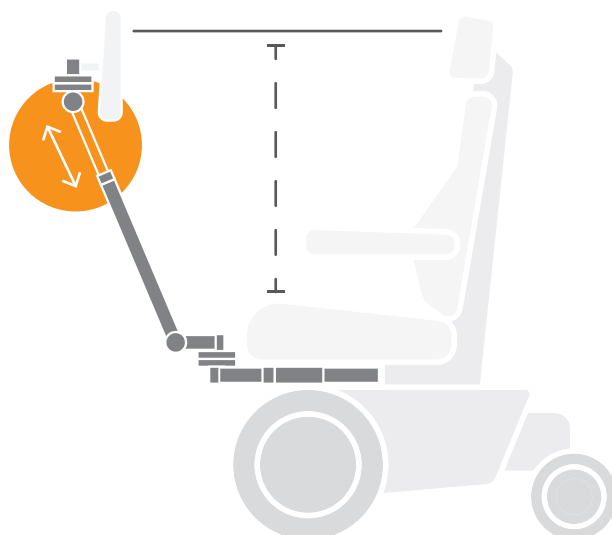



# Instructies



## Opbouw / type Modulair ReaDy Go Mount - Dubbel Draai

### Verstellen

#### Diepte



De diepte kan op twee manieren worden aangepast: schuivend met het horizontale schuifdeel en kantelend met de kartelscharnieren. Zorg altijd dat het apparaat van de opbouw gehaald is. **x** is de benodigde inbusgrootte.

#### Schuiven

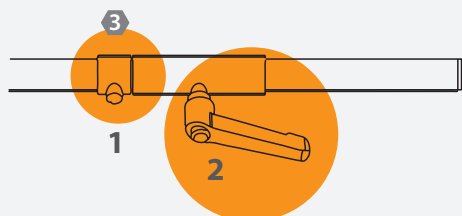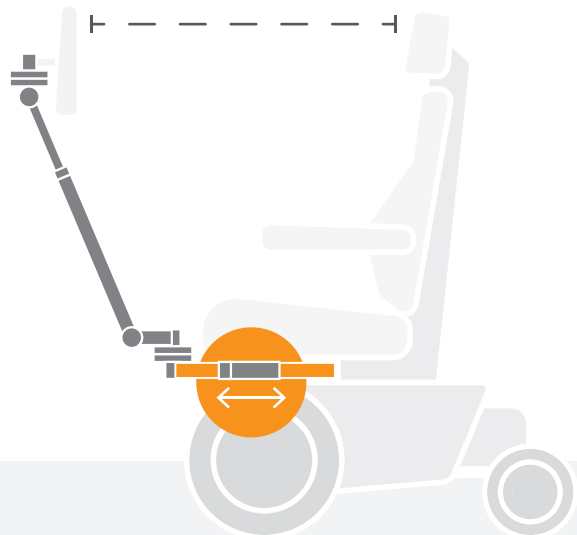


- Draai zowel de stop los (1) als de rolstoelbevestiging los (2).
- Verschuif de insteek naar de gewenste diepte en draai de opname vast (2).
- Schuif de stop tegen de opname en draai vast (1).

#### Kantelen

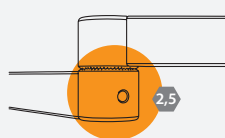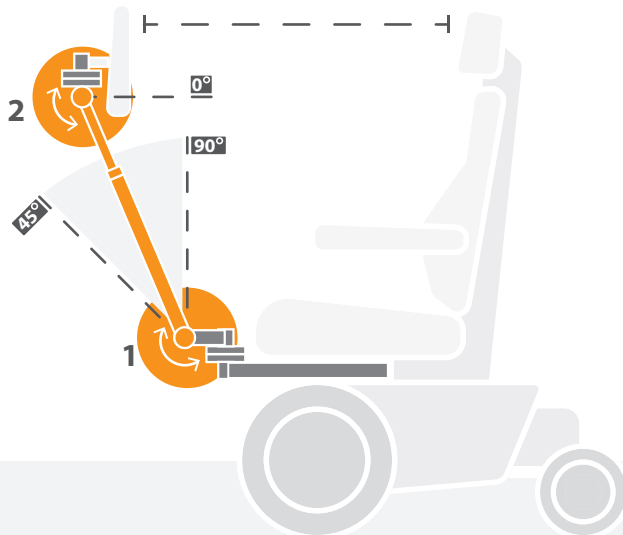


- Draai eerst de borging los.
- Draai het onderste kartelscharnier (1) aan de zijkant losser tot deze vrij kan bewegen. Ondersteun hierbij het bovendee van de opbouw.

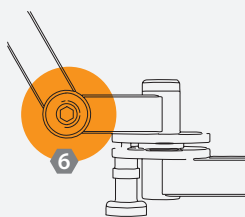

Let op! Draai nooit het scharnier helemaal uit elkaar.

- Verstel de hoek totdat de juiste diepte gevonden is en draai het scharnier hierna weer vast.

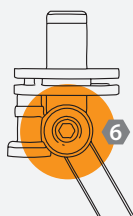

Zorg dat de hoek tussen de 45 en 90 graden blijft.

- Volg dezelfde stappen voor het bovenste kartelscharnier (2) tot deze horizontaal is.
- Draai de borging van beide scharnieren weer goed vast.