

# CE EU-conformiteits- verklaring

## Statief / type vast


Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.  
h.o.d.n. rdgKompagne  
Roessinghsbleekweg 161  
7522 AH Enschede

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid dit statief (type vast (SV-HV / SV-UV / SV-VV / SV-XV) met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)
- Richtlijn Machines (2006/42/EG)

Enschede, 08/2013

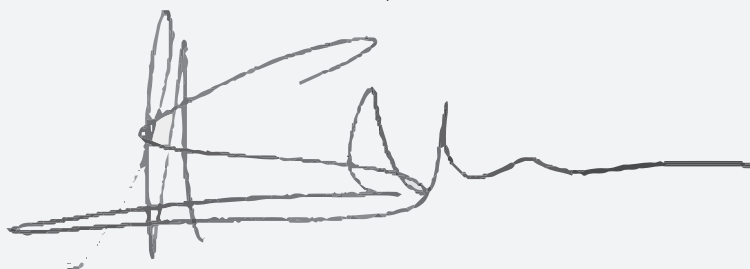

Eric Schonewille  
Algemeen Directeur / CEO

CE UDI-DI SV-HV / SV-UV / SV-VV / SV-XV MD klasse I



# Waarschuwingen

## Statief / type vast

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door.

*Gebruik dit statief uitsluitend waar deze voor bedoeld is: het monteren van het communicatiehulpmiddel of de (spel)computer (bv. de Kojo). Plaats geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering gepresenteerd zijn. Demonteer het statief niet verder dan tijdens de uitlevering en in de bijgeleverde handleiding getoond is. Door eigen toevoegingen en of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.*

### Positioneren en verstellen

Het positioneren en verstellen van het statief kan eenvoudig uitgevoerd worden door de bijgeleverde instructies te volgen. Besteed hierbij extra aandacht aan het volgende:

- In geval van een monitorarm: wees er ten alle tijden alert op dat bij het verwijderen van het communicatiehulpmiddel de arm vanzelf omhoog kan komen. Houd daarom altijd een hand op de arm om deze beweging op te vangen.
- Wees er ten alle tijden alert op dat bij het losdraaien van de dubbele arm-vergrendeling, deze vanzelf omlaag kan komen. Ondersteun daarom de arm altijd met een hand wanneer de vergrendeling losgedraaid wordt.
- Let bij het verschuiven van arm en/of kolom dat er geen zaken (bv kabels) of lichaamsdelen beklemd komen te zitten.

### Wegdraaien

In geval van een monitorarm: let bij het wegdraaien van arm dat er zich niks in de draaizone bevindt. Let er ook op dat er niks beklemd komt te zitten bij de draaipunten zelf. Zorg er voor dat het apparaat ten alle tijden binnen het draagvlak blijft.

### Statief reinigen

Voordat het statief gereinigd wordt moet het apparaat en alle overige elektronische componenten verwijderd worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om de opbouw schoon te maken. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen, overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht tussen de schuivende en/of bewegende delen.

### Defecten met betrekking tot het statief

In geval van defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in de handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in dit het geval contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>.

### Apparaat instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van het apparaat voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende het communicatiehulpmiddel.



# Instructies

## Statief / type vast

Deze flyer toont de belangrijkste gebruiksinstructies voor alle soorten vaste statieven. Het geleverde exemplaar kan enigszins afwijken van de getoond illustraties. De werking zal echter vergelijkbaar zijn.

### Apparaat opname

Met het **snelwisselsysteem (A)** kan het apparaat verwijderd worden door de beveiliging te ontgrendelen en het apparaat omhoog te tillen. Voor het bevestigen dienen de drie nokjes van bovenaf in de sleuven geschoven te worden. Controleer altijd op de beveiliging weer vergrendeld is.

Met de **kogelkop (B & C)** kan de de hoek van het apparaat ingesteld worden.

**Draaiknop B** ontgrendelt de kogel; bepaal de stroefheid van de kogelbeweging met de **draaischijf E** in de knop zelf.

**Draaiknop C** ontgrendelt het roteren van de gehele kogelkop.

Met de **schuif (D)** kan de zijwaartse afstand ingesteld worden door de hendel los te draaien.

### Arm


De arm komt in twee uitvoeringen: een kokerarm (zoals afgebeeld) en een monitorarm.

### Voet met rem

De zwenkwielen van de voet zijn uitgevoerd met een rem. Gebruik deze om de statief op zijn plek te houden wanneer deze eenmaal in positie staat. De X-Voet is uitgevoerd met 2 wielen zonder rem.

### Transport

In geval van transport kan de arm boven van de kolom geschoven worden en kan de kolom uit de voet verwijderd worden. **Verwijder vooraf altijd het hulpmiddel van het statief.**

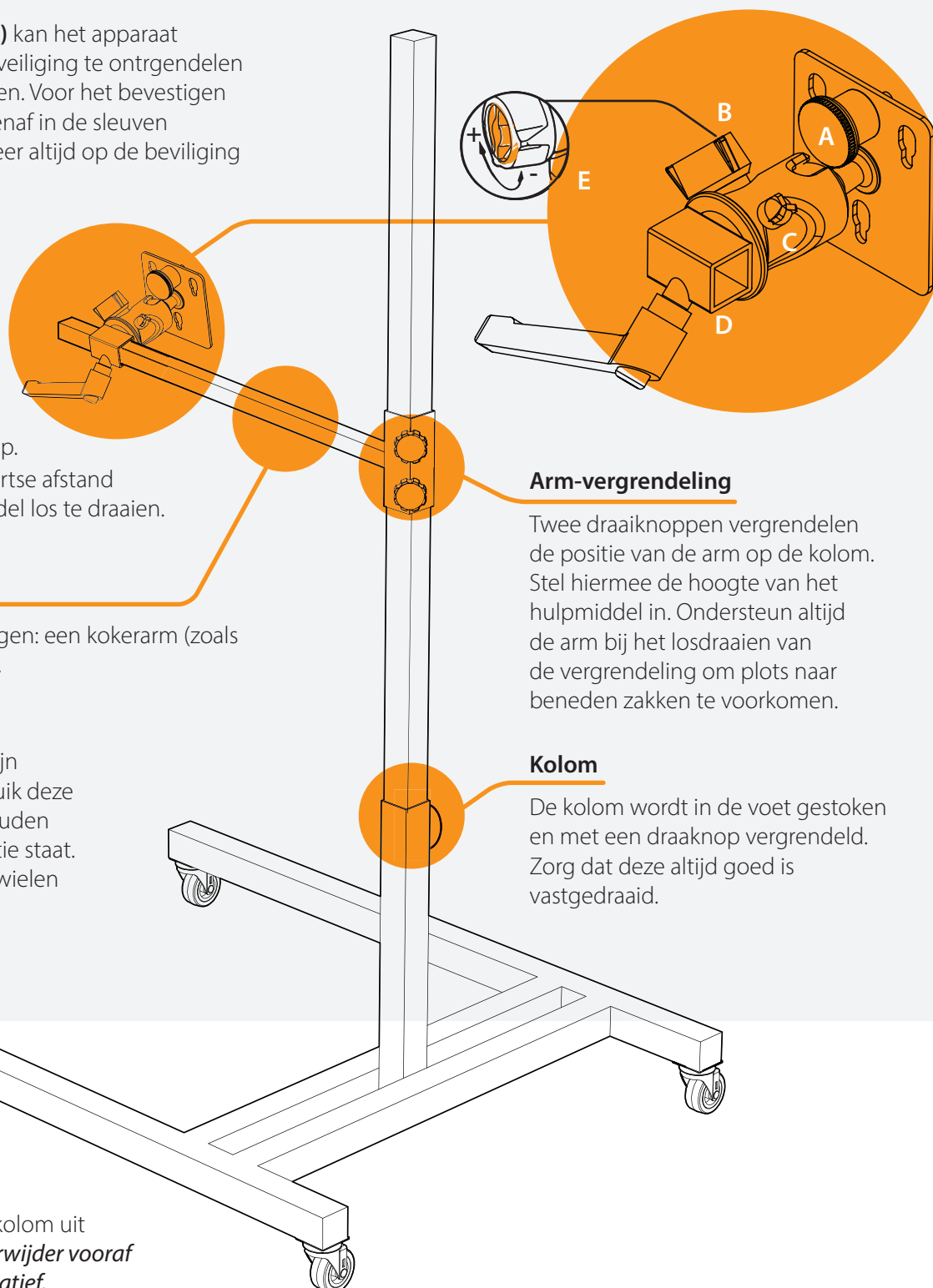

### Arm-vergrendeling

Twee draaiknoppen vergrendelen de positie van de arm op de kolom. Stel hiermee de hoogte van het hulpmiddel in. Ondersteun altijd de arm bij het losdraaien van de vergrendeling om plots naar beneden zakken te voorkomen.

### Kolom

De kolom wordt in de voet gestoken en met een draaiknop vergrendeld. Zorg dat deze altijd goed is vastgedraaid.