

# CE EU-conformiteits- verklaring Statief / type Mobiel

Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.  
h.o.d.n. rdgKompagne  
Roessinghsbleekweg 161  
7522 AH Enschede

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid dit statief (type Flamingo (SM-FL) met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)
- Richtlijn Machines (2006/42/EG)

Enschede, 02/2016



Eric Schonewille  
Algemeen Directeur / CEO

CE UDI-DI SM-FL MD klasse I



# Waarschuwingen

## Statief / type Mobiel

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door.

*Gebruik de Flamingo uitsluitend waar deze voor bedoeld is: het monteren van het communicatiehulpmiddel. Plaats geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering getoond zijn. Demonteer de Flamingo niet verder dan tijdens de uitlevering en in de bijgeleverde handleiding getoond is. Door eigen toevoegingen en of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.*

### Positioneren en verstellen

Het positioneren en verstellen van de Flamingo kan eenvoudig uitgevoerd worden door de bijgeleverde instructies te volgen. Besteed hierbij extra aandacht aan het volgende:

- Wees er ten alle tijden alert op dat bij het verwijderen van het communicatiehulpmiddel kan de arm vanzelf omhoog kan komen. Houd daarom altijd een hand op de arm om deze beweging op te vangen.
- Wees er ten alle tijden alert op dat bij het ontgrendelen van de kolom-vergrendeling, deze vanzelf omhoog kan komen (afhankelijk van de belasting). Begeleid daarom de kolom altijd met de hand.
- Let bij het inschuiven van de voet en kolom dat er geen dingen of ledematen beklemd komen te zitten.
- Het verstellen van de voet gaat het best door de druk licht van het uitschuifpunt weg te nemen door de op te tillen. Let hierbij op dat deze niet te ver wordt opgetild in verband met het kantelgevaar.
- Ga niet staan op de voet. Tip: gebruik de remmen om de Flamingo op zijn plek te houden.
- Positioneer het hulpmiddel en accessoires uitsluitend binnen het draagvlak van de voet.

### Wegdraaien

Let bij het wegdraaien van arm dat er zich niks in de draaizone van de Flamingo bevindt. Let er ook op dat er niks beklemd komt te zitten bij de draaipunten zelf. Zorg er voor dat het communicatiehulpmiddel ten alle tijden binnen het draagvlak blijft (zie de instructies met tips voor gebruik).

### Reinigen

Voordat de Flamingo gereinigd wordt moet het apparaat verwijderd worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om de opbouw schoon te maken. Vermijd overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht in de schuivende delen.

### Defecten

In geval van defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in de handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in dit het geval contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>.

### Apparaat instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van het apparaat voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende het communicatiehulpmiddel.




# Instructies

## Statief / type Mobiel

### Flamingo

De Flamingo is een uniek statief voor elke situatie. Hierbij enkele tips voor het gebruik.

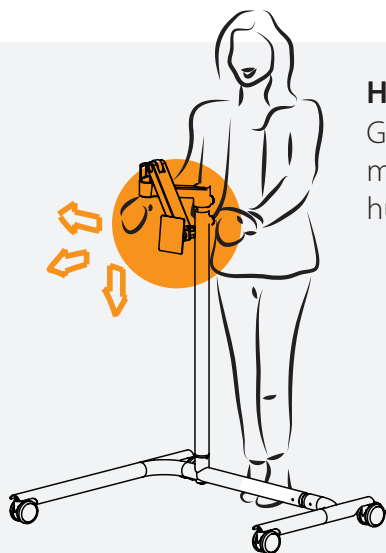

#### Het hulpmiddel positioneren

Gebruik de arm voor een snelle en makkelijke positieaanpassing van het hulpmiddel.

#### De voet verstellen

Om de Flamingo zo dicht mogelijk bij de gebruiker te plaatsen kan de voet versteld worden: haal de druk van het uitschuifpunt door het licht op te tillen (1) en schuif het korte deel naar binnen of buiten (2).



#### De kolom verstellen

Voor grote aanpassingen in de hoogte kan de kolom in- of uitgeschoven worden. Doe dit door de onderste pin uit te trekken (1) en de kolom te begeleiden (2).

Tip: plaats het hulpmiddel en de arm zo dicht mogelijk bij de kolom tijdens het verstellen.



#### Draagvlak

Let bij het positioneren van het hulpmiddel en accessoires dat deze niet buiten het draagvlak komt.



Niet de gehele arm naar achteren zwenken, dit kan leiden tot kantelgevaar.



Het onderste deel van de arm naar achteren draaien kan wel, zo lang het hulpmiddel binnen het draagvlak blijft.