



MEMOplanner

Handleiding

Art. nr: 4628XX

Programmaversie: 3.7.2 of later

Inhoud

1. Inleiding	5
1.1 myAbilia	5
1.2 Afbeeldingenarchief in MEMOplanner	5
1.3 Spraakondersteuning in MEMOplanner.....	6
1.4 Typen activiteiten in MEMOplanner	6
1.5 Het kwartierprincipe	7
2. De agenda	9
2.1 Dagkalender	9
2.2 Weekkalender.....	14
2.3 Maandkalender	15
2.4 Activiteitsweergave	16
2.5 Alarmen en herinneringen	17
2.6 Een activiteit toevoegen	19
2.7 Activiteit bewerken.....	26
2.8 Activiteit verwijderen	26
2.9 Activiteit afvinken	27
2.10 Bewerkweergave	27
2.11 Skype in activiteit.....	36
3. Menu.....	38
3.1 Camera.....	38
3.2 Mijn foto's	39
3.3 Fotokalender.....	40
3.4 Timers	41
3.5 Snel-instellingen	42
3.6 Videogesprek (Skype)	42
4. Instellingen.....	43
4.1 Kalender	43
4.2 Functies	53
4.3 Afbeeldingkiezer	55
4.4 Menu	55
4.5 Timers	56
4.6 Systeem.....	57
5. Standaardinstellingen van MEMOplanner.....	63

1. Inleiding

MEMOplanner is een digitale kalender en agenda die in het dagelijks leven als cognitieve ondersteuning kan fungeren.

MEMOplanner is ontwikkeld voor mensen die op een visueel inzichtelijke manier ondersteuning met tijd en planning nodig hebben.

MEMOplanner biedt u de volgende voordelen:

- Eenvoudig te begrijpen overzicht van de dag, week en maand
- Hulp om de tijd van de dag bij te houden
- Tijd wordt op een eenvoudige manier weergegeven
- Duidelijke, persoonlijke herinneringen

MEMOplanner kan in grote mate worden aangepast aan wat de gebruiker nodig heeft en wat hij of zij wel en niet kan. U kunt uw eigen afbeeldingen gebruiken of gebruik maken van de afbeeldingen in MEMOplanner. U kunt zelf selecteren welke functies de gebruiker ter beschikking heeft.

Via de webservice *myAbilia* kunnen ondersteuningspersonen op afstand hulp bieden met uw MEMOplanner.

Om extra ondersteuning te krijgen, kunt u MEMOplanner installeren op een Android-smartphone. Op die manier ontvangt u zelfs herinneringen als u uw MEMOplanner niet in de buurt heeft. Raadpleeg hiervoor de instructies in het *Handboek*.

In deze gebruikershandleiding wordt de app MEMOplanner 3 beschreven, die op verscheidene MEMOplanner-modellen wordt meegeleverd. Functionaliteit die specifiek is voor bepaalde modellen, wordt hier niet beschreven. Die informatie vindt u in het *Handboek* van het desbetreffende model.

1.1 myAbilia

myAbilia is een webservice voor MEMOplanner en andere producten van Abilia.

Met *myAbilia* kunt u:

- De agenda, de checklists en het afbeeldingenarchief beheren op een computer
- Ondersteuningspersonen selecteren die via internet bijvoorbeeld herinneringen kunnen toevoegen of bewerken

U heeft een gebruikersaccount voor *myAbilia* nodig om MEMOplanner te kunnen gebruiken. Het is echter niet verplicht om de webservice te gebruiken of om uw apparaat te verbinden met internet (behalve wanneer u inlogt).

1.2 Afbeeldingenarchief in MEMOplanner

In *myAbilia* staan de volgende afbeeldingsbronnen die kunnen worden toegevoegd aan MEMOplanner:

- **Handi-afbeeldingen.** Circa 160 afbeeldingen die zijn gemaakt door de eenheid AIR van de afdeling psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Sahlgrenska in Göteborg. De afbeeldingsbron is in 2014 aangevuld door de illustrator Andreas Högberg.
- **Rolltalk-afbeeldingen.** Circa 60 afbeeldingen uit de afbeeldingsbron van het communicatiehulpmiddel Rolltalk.
- **Smileys.** 20 smileys zijn speciaal ontwikkeld voor Handi.

- **Standaardafbeeldingen.** 84 pictogrammen en PCS-afbeeldingen.

Via *myAbilia* kunt u het afbeeldingenarchief aanpassen. Voeg bijvoorbeeld uw eigen foto's toe of kies extra afbeeldingen uit de afbeeldingsbronnen van *myAbilia*.

1.3 Spraakondersteuning in MEMOplanner

In MEMOplanner is spraakondersteuning ingebouwd. Dit houdt in dat als u een functie in het programma 1½ seconde ingedrukt houdt, de functie wordt voorgelezen door middel van spraaksynthese. U kunt bijvoorbeeld de klok ingedrukt houden zodat de tijd wordt voorgelezen, of u kunt op een activiteit drukken om te horen hoe deze heet en wanneer deze begint.

U kunt instellen of u spraakondersteuning wilt gebruiken en zo ja, welke spraaksynthese moet worden gebruikt. Dit wordt ingesteld via Instellingen. Zie hoofdstuk 4.6.2 *Spraakondersteuning*.

1.4 Typen activiteiten in MEMOplanner

Er zijn verschillende typen activiteiten in MEMOplanner en ze hebben verschillende kenmerken. De verschillende typen worden in dit hoofdstuk beschreven.

Geplande activiteiten	Geplande activiteiten hebben altijd een begintijd, maar niet altijd een eindtijd. Als de activiteit een eindtijd heeft, wordt voor de activiteit een periode weergegeven in de tijdlijn, zodat de tijd visueel wordt gemaakt. In de lijstweergave worden de begintijd en eindtijd weergegeven in duidelijke tekst.
Geplande activiteiten aan de linker- of rechterzijde	De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die in de agenda links of rechts worden weergegeven. Op deze manier kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende doeleinden.
Geplande activiteiten met herinnering	Voor geplande activiteiten kunt u een of meer herinneringen ontvangen voordat ze beginnen. In de lijstweergave worden de herinneringen weergegeven in duidelijke tekst.
Geplande activiteiten met alarm	Wanneer geplande activiteiten beginnen of eindigen, wordt doorgaans een alarm met geluid en/of trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft) geactiveerd. U kunt ook instellen dat er een alarm stil wordt geactiveerd of dat er helemaal geen alarm is. Ook is het mogelijk om gesproken berichten op te nemen die worden afgespeeld wanneer de activiteit begint en/of eindigt.
Activiteiten voor de hele dag	Activiteiten voor de hele dag hebben geen begintijd. In de dagkalender, weekkalender en maandkalender worden ze weergegeven in het veld 'Hele dag'. Ze worden gebruikt voor speciale gebeurtenissen, zoals verjaardagen, die u duidelijk wilt kunnen zien op de maandkalender.
Afvinkbare activiteiten	Als u een herinnering wilt ontvangen als een activiteit niet is voltooid en u duidelijk wilt zien of u de activiteit al heeft afgerond, kunt u deze afvinkbaar maken. In de lijstweergave ziet u of de activiteit wel of niet is afgevinkt. In de tijdlijn ziet u alleen een vinkje als de activiteit is afgevinkt.
Activiteiten met extra informatie	U kunt aan een activiteit extra informatie koppelen, namelijk een checklist of een Skype-contact (als Skype is geïnstalleerd).

	<p>Een checklist kan handig zijn als u een activiteit wilt opdelen in kleinere stappen of deeltaken, zoals ochtendroutines of takenlijsten. De checklist wordt rechtstreeks in de activiteit gemaakt. Ook kunt u kant-en-klare checklists gebruiken die u hebt gemaakt via <i>myAbilia</i>.</p> <p>Het kan handig zijn om Skype-contacten toe te voegen als u wilt praten of overleggen met de mensen die u selecteert. Als MEMOplanner bijvoorbeeld wordt gebruikt als hulpmiddel in huis, kunnen nachtverpleegkundigen hulp bieden met een videochat, zodat ze niet hoeven langs te komen.</p>
Terugkerende activiteiten	Activiteiten kunnen wekelijks worden herhaald (op een of meer weekdays), om de week, maandelijks (op een of meer data) of jaarlijks.
Standaardactiviteiten	<p>Met een 'standaardactiviteit' wordt een vooraf ingestelde activiteit bedoeld die u als nieuwe activiteit kunt toevoegen. Aan een standaardactiviteit kunt u onder meer een naam, afbeelding, checklist en herinnering toevoegen.</p> <p>Standaardactiviteiten maken het eenvoudiger om nieuwe activiteiten toe te voegen.</p> <p>Standaardactiviteiten maakt u via <i>myAbilia</i>.</p>
Standaardtimers	<p>Met een 'standaardtimer' wordt een vooraf ingestelde timer bedoeld met een afbeelding en/of naam en een tijd. In de lijst worden standaardtimers weergegeven met hun naam en mogelijk met hun symbool.</p> <p>Met standaardtimers wordt het makkelijker om af te tellen.</p> <p>Standaardtimers maakt u in de instellingenmodus van MEMOplanner of via <i>myAbilia</i>.</p>

1.5 Het kwartierprincipe

Met het 'kwartierprincipe' wordt de cognitieve ondersteuning van het **kwartierhorloge** bedoeld.

Het kwartierhorloge laat zien hoelang het nog duurt tot een bepaalde gebeurtenis begint of eindigt. Dit wordt aangeduid met stippen. Elke stip staat voor 15 minuten, oftewel een kwartier.

Om het kwartierhorloge te begrijpen, bedenkt u eens wat het inhoudt om te bepalen hoeveel tijd u heeft. Normaliter doet u het volgende:

1. Op de wijzerplaat het huidige tijdstip aflezen: *bijvoorbeeld kwart over één*.
2. Bedenken hoe laat de gebeurtenis is: *bijvoorbeeld om twee uur*.
3. De tijden van elkaar aftrekken om te berekenen hoeveel tijd er resteert: *45 minuten*.
4. Proberen te beseffen hoelang de resterende tijd nou eigenlijk is. Ga na hoe u '45 minuten' meestal ervaart: wat kunt u allemaal doen in die tijd?

Veel mensen met een cognitieve stoornis leren klokkijken (punt 1). Vaak weten ze ook nog op welke tijd ze wachten (punt 2). Het kan echter lastig zijn om het tijdsverschil (punt 3) uit te rekenen en om te beseffen wat die resterende tijd nou eigenlijk inhoudt (punt 4).



De cognitieve ondersteuning van het kwartierhorloge zorgt ervoor dat het aftrekken van de tijd (punt 3) voor u wordt gedaan en dat de resterende tijd in de vorm van verticale stippen wordt weergegeven.

Een kolom zwarte stippen geeft een duidelijk visueel beeld. Iedereen kan begrijpen dat een lange kolom stippen een langere tijd weergeeft dan een korte kolom, en dat wanneer er een stip verdwijnt, er minder tijd resteert.

De stippen zijn ook eenvoudig te vertalen in dagelijkse getallen. Eén stip is een kwartier, twee stippen een halfuur en vier stippen een uur.

Veel mensen blijken baat te hebben bij dit concept, waardoor ze hun begrip van tijd (punt 4) kunnen ontwikkelen.



2. De agenda



WAARSCHUWING: Gebruik het product niet als de enige ondersteuning voor medicatie, medische behandeling of andere belangrijke activiteiten.


De agenda vormt het hart van MEMOplanner. Hij biedt u een overzicht van de dag, week en maand. Ook ziet u duidelijk hoe laat het is. U ontvangt een herinnering zodra er iets gaat beginnen of eindigen. Bovendien kunt u makkelijker onthouden of u bepaalde taken hebt uitgevoerd.

2.1 Dagkalender

In de dagkalender worden de activiteiten van de dag weergegeven in de vorm van *één tijdlijn*, *twee tijdlijnen* of een *lijst*. Voor 's avonds en 's nachts is er een speciale nachtwoergave.

U kunt instellen hoe de dagkalender eruitziet. Zie hoofdstuk 4.1 *Kalender*.

2.1.1 Dagkalender met tijdlijn

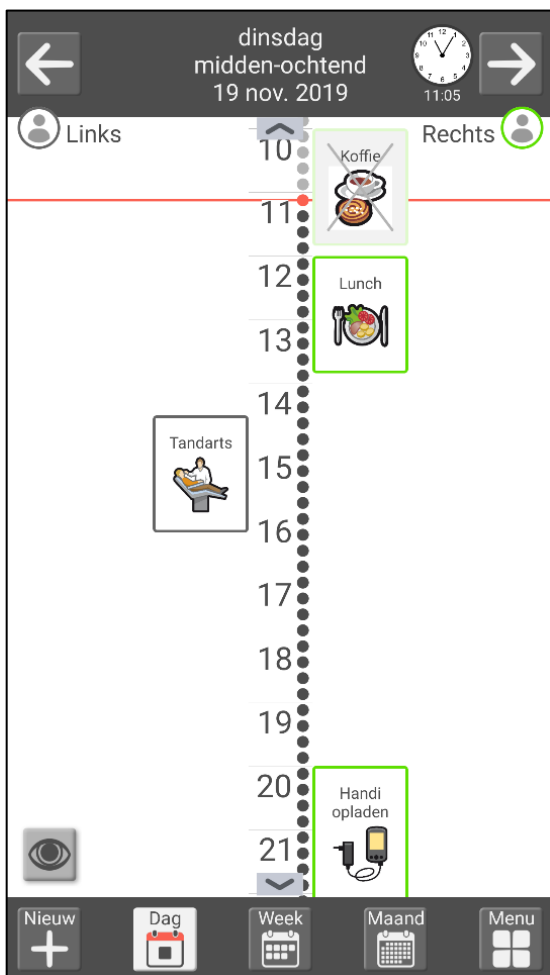

Helemaal bovenaan wordt informatie over de dag en tijd weergegeven. Ook kunt u bladeren tussen de dagen.

De activiteiten worden weergegeven in een tijdlijn. De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die in de tijdlijn links of rechts worden weergegeven. Zie hoofdstuk



2.1.6 Linker- en rechterzijde.

Als er geen categorieën worden gebruikt, wordt de tijdlijn aan de rechterzijde getoond.

De tijdlijn geeft aan uit hoeveel stippen een activiteit bestaat.

Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten staat een vinkje.

De lengte en het formaat van de tijdlijn kunnen worden aangepast. Zie hoofdstuk 2.1.7 *Menu Scherm*. Ook kunt u hier overschakelen naar de lijstweergave.


Als de tijdlijn niet helemaal op het scherm past, worden de symbolen   weergegeven en kunt u naar boven en beneden vegen.

Als niet alle activiteiten zichtbaar zijn, kunt u naar links/rechts vegen om alle activiteiten te zien.

Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop om de activiteitsweergave te openen. Zie hoofdstuk 2.4 *Activiteitsweergave*.

Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies.

2.1.2 Dagkalender met twee tijdlijnen

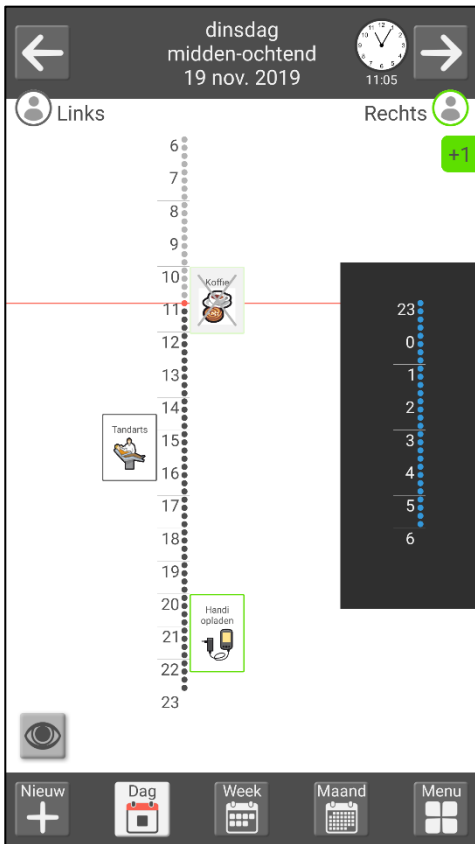

Helemaal bovenaan wordt informatie over de dag en tijd weergegeven. Ook kunt u hier bladeren tussen de dagen.

De tijdlijn wordt in twee delen weergegeven. De dag staat links en de nacht rechts.

De activiteiten worden weergegeven in een tijdlijn. De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die in de tijdlijn links of rechts worden weergegeven. Zie hoofdstuk

2.1.6 Linker- en rechterzijde.

De tijdlijn geeft aan uit hoeveel stippen een activiteit bestaat.


Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten staat een vinkje.

De lengte en het formaat van de tijdlijn kunnen worden aangepast. Zie hoofdstuk 2.1.7 *Menu Scherm*. Ook kunt u hier overschakelen naar de lijstweergave.

Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop om de activiteitsweergave te openen. Zie hoofdstuk 2.4 *Activiteitsweergave*.

Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies.

2.1.3 Dagkalender met lijstweergave

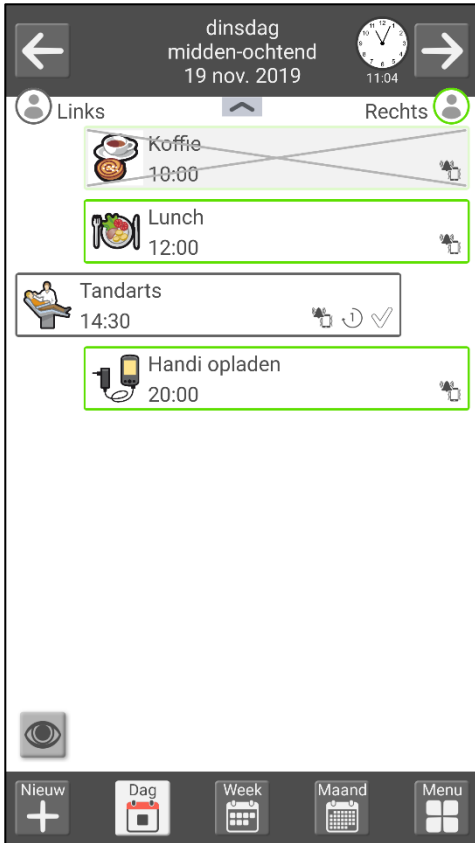

Helemaal bovenaan wordt informatie over de dag en tijd weergegeven. Ook kunt u hier bladeren tussen de dagen.

De activiteiten staan in een lijst waarin de eerstvolgende activiteit als eerste wordt weergegeven. De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die links of rechts worden weergegeven. Zie hoofdstuk

2.1.6 Linker- en rechterzijde.

Ook kunt u voor elke activiteit zien hoe het alarm wordt geactiveerd, of er een herinnering is ingesteld en of de activiteit moet worden afgevinkt.

Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten staat een vinkje.


U kunt de weergave wijzigen in een tijdlijn. Zie hoofdstuk 2.1.7 *Menu Scherm*.

Als de lijst niet helemaal op het scherm past, worden de symbolen   weergegeven en kunt u naar boven en beneden vegen.

Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop om de activiteitsweergave te openen. Zie hoofdstuk 2.4 *Activiteitsweergave*.

Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies.

2.1.4 Nachtagenda

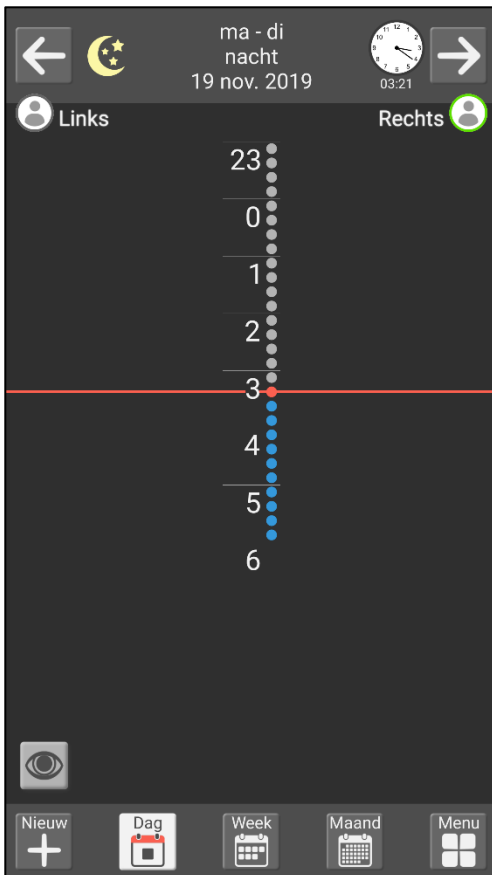

'S Nachts is het scherm donker.


Helemaal bovenaan wordt informatie over de nacht, datum en tijd weergegeven.

Alleen de activiteiten in de nacht worden weergegeven, dus geen activiteiten in de ochtend.

Als u naar de volgende dag bladert, worden de activiteiten van de ochtend getoond.

2.1.5 Het veld Hele dag

Activiteiten die aan de dag zijn toegewezen, kunnen bovenaan de pagina worden weergegeven in het veld Hele dag.

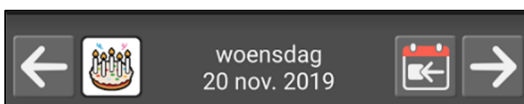

Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop om de activiteitsweergave te openen. Zie hoofdstuk 2.4 *Activiteitsweergave*.

Als er meerdere activiteiten voor de hele dag zijn, wordt in het veld een plusteken weergegeven. Als u op het veld drukt, wordt een lijst met activiteiten voor de hele dag weergegeven.

2.1.6 Linker- en rechterzijde

De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die in de tijdlijn en lijst links of rechts worden weergegeven. Op deze manier kan makkelijker onderscheid worden gemaakt tussen verschillende activiteiten. Zo kunt u aan de linkerzijde bijvoorbeeld weergegeven wie dienst heeft en waar u moet zijn.




Binnen de twee categorieën kunt u verhelderende namen en afbeeldingen kiezen. Als u hiervoor kiest, worden de bijbehorende pictogrammen boven in de tijdlijn/lijsst weergegeven.



2.1.7 Menu Scherm



Als u op het oog drukt, kunt u aanpassen hoe de dagkalender eruitziet.

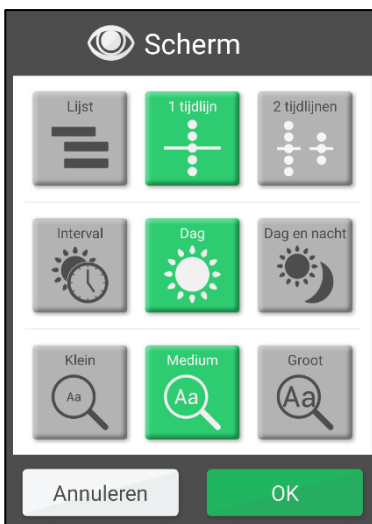

U kunt kiezen uit **Lijst**, **1 tijdlijn** en **2 tijdlijnen**.

U kunt ook de **lengte** van de tijdlijn aanpassen:


- *Interval*. De ochtend, dag, avond en nacht zijn gescheiden.
- *De dag*. De tijdlijn toont de ochtend, dag en avond. De nacht wordt afzonderlijk weergegeven.
- *Dag en nacht*. De tijdlijn toont de hele dag van 24 uur.

U kunt het **zoomniveau** van de tijdlijn instellen, oftewel hoe groot de tijdlijn moet zijn. Als u inzoomt, past de tijdlijn mogelijk niet op één pagina, waardoor u omhoog en omlaag moet vegen om alles te bekijken.

2.2 Weekkalender

In de weekkalender worden de activiteiten van de week weergegeven met de focus op vandaag.

U kunt instellen hoe de weekkalender eruitziet. Zie hoofdstuk 4.1 *Kalender*.

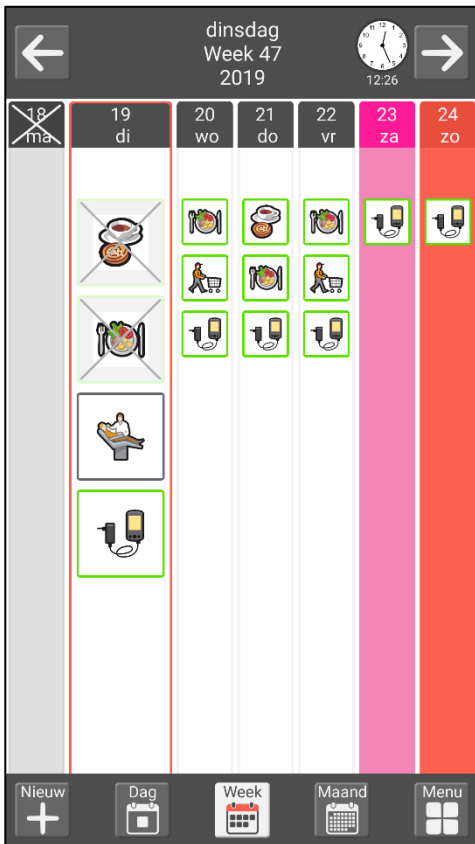

Helemaal bovenaan wordt informatie over vandaag weergegeven. Ook kunt u hier bladeren tussen de weken.

De activiteiten worden weergegeven in de lijst. Dit gebeurt op dezelfde manier als in de dagkalender.

Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten staat een vinkje.

Als u een specifieke dag wilt bekijken, drukt u erop in de weekkalender.

Als u in de weekkalender wilt blijven maar een andere dag wilt bekijken, drukt u boven in de kolom.


Als de lijst niet helemaal op het scherm past, worden de symbolen   weergegeven en kunt u naar boven en beneden vegen.

Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies.

2.3 Maandkalender

In de maandkalender worden de activiteiten van de maand weergegeven.

U kunt instellen hoe de maandkalender eruitziet. Zie hoofdstuk 4.1 *Kalender*.

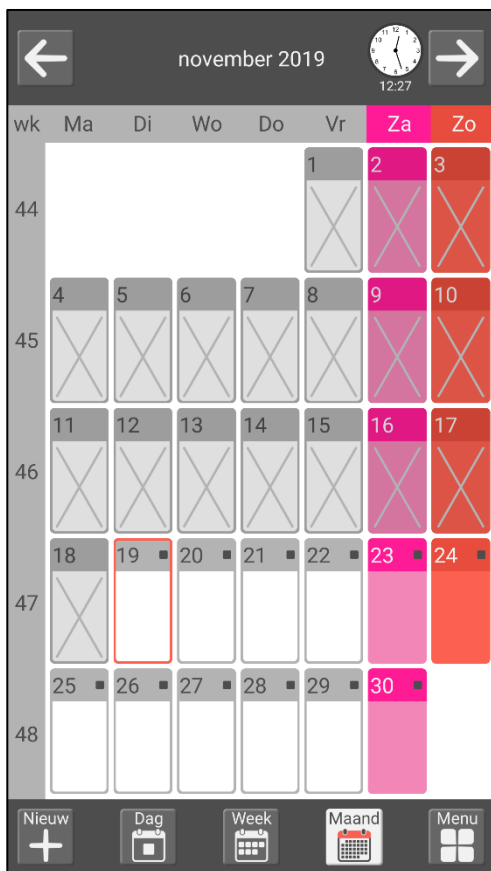

Helemaal bovenaan wordt informatie over de maand weergegeven. Ook kunt u hier bladeren tussen de maanden.

Voor iedere dag worden activiteiten voor de hele dag weergegeven. Als er nog andere activiteiten zijn, wordt dit aangeduid.

Dagen die zijn geweest, worden doorgekruist.

Als u een specifieke dag wilt bekijken, drukt u erop.


Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies.

2.4 Activiteitsweergave

In de activiteitsweergave ziet u informatie over een activiteit in de dagkalender.

Of de activiteit een afbeelding, tekst en checklist heeft, bepaalt hoe de activiteitsweergave eruitziet. Hoe minder zaken u aan een activiteit toevoegt, hoe duidelijker deze te zien is.

U kunt instellen wat moet worden weergegeven in de activiteitsweergave. Zie hoofdstuk 4.1.5 *Activiteitsweergave*.

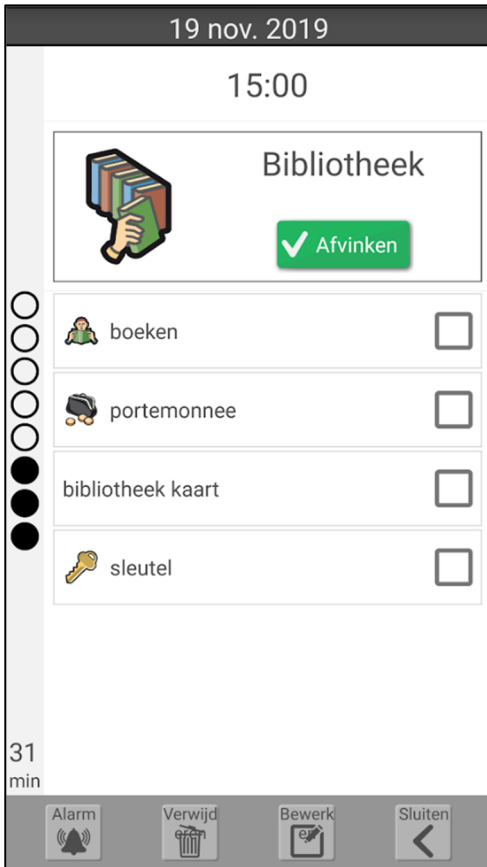

Helemaal bovenaan wordt informatie over de datum en tijd van de activiteit weergegeven.

Als de activiteit een **gesproken bericht** heeft, staan er knoppen naast de begin- en eindtijd. U kunt op deze knoppen drukken om het bericht te beluisteren.

Het **kwartierhorloge** laat zien hoeveel tijd er resteert tot de activiteit begint of eindigt.

Als de activiteit een checklist heeft, kunt u activiteiten afvinken zodra u ze voltooit.

Als de activiteit afvinkbaar is, heeft deze een knop **Afvinken** waarmee u de activiteit als voltooid kunt markeren.

(Als er een alarm is, kunt u de activiteit ook afvinken. Zie hoofdstuk 2.9 *Activiteit afvinken*.)

Helemaal onderaan vindt u knoppen waarmee u het afvinken van een activiteit ongedaan maakt, het alarm van de activiteit wijzigt, de activiteit verwijdert, de activiteit bewerkt of het venster sluit.

2.4.1 Afvinken ongedaan maken



Als u een activiteit per ongeluk heeft afgevinkt, kunt u dit met deze knop ongedaan maken.

2.4.2 Het alarm van de activiteit wijzigen




Druk op de *alarmknop* om te wijzigen welk alarm wordt geactiveerd wanneer de activiteit begint of eindigt.

U heeft de volgende keuzes:

- *Alarm + trilfunctie*. Geluidssignaal, mogelijk een gesproken bericht, en trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft).
- *Alarm*. Geluidssignaal en mogelijk een gesproken bericht.
- *Trilfunctie*. Trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft) en mogelijk een gesproken bericht.
- *Stil alarm*. Alleen een gesproken bericht.
- *Geen alarm*. Er is geen alarmweergave.
- *Alarm alleen op begintijd*. Er is geen alarm op de eindtijd.

Als u het geluid of de duur van het alarm wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen. Zie hoofdstuk 4.1.6.3 Voorselectie

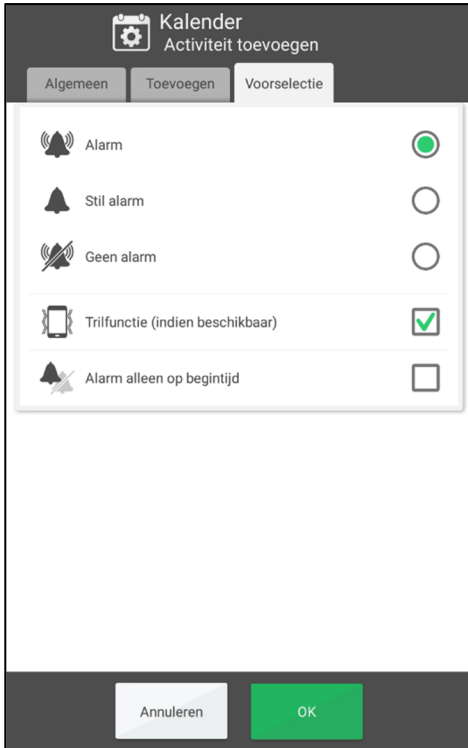

Instellingen voor welk alarm en welke instellingen bij het aanmaken van een activiteit moeten zijn ingesteld.

4.1.7 Alarminstellingen.

2.4.3 De activiteit verwijderen



Zie hoofdstuk 2.8 *Activiteit verwijderen*.

2.4.4 De activiteit bewerken



Zie hoofdstuk 2.7 *Activiteit bewerken*.

2.5 Alarmen en herinneringen


De alarmweergave wordt weergegeven wanneer een activiteit begint of eindigt. De alarmweergave kan ook worden weergegeven bij een herinnering voordat een activiteit begint of als u bent vergeten een activiteit af te vinken.

Eerst klinkt het gekozen alarmsignaal en vervolgens eventueel een gesproken bericht.

Het maakt niet uit of het apparaat 'uit' staat (d.w.z. het scherm is uitgeschakeld) en of u bezig bent met een andere functie; het alarm gaat altijd af.



U kunt alle alarmen tegelijk uitschakelen met de knop *Alarmen uitschakelen*. Om 23:59 uur worden de alarmen automatisch weer ingeschakeld. Deze functie activeert u via *Snel-instellingen*.

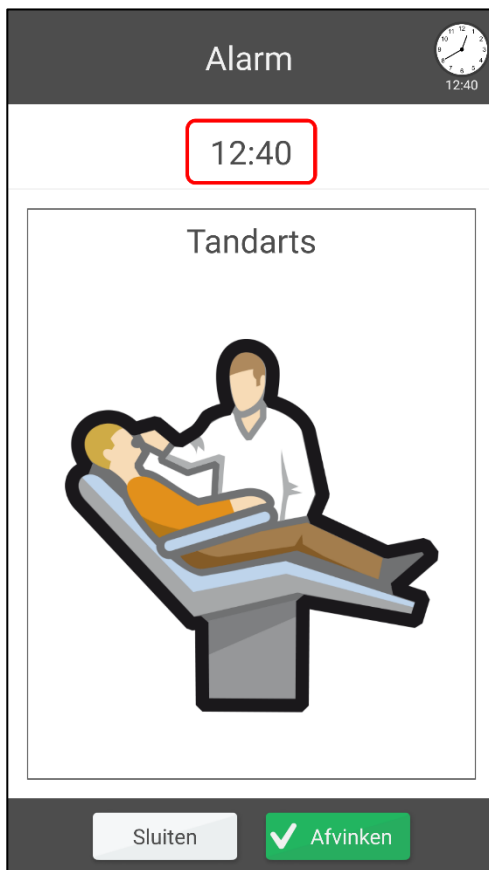

Bovenaan kunt u zien of er meerdere alarmen zijn ingesteld voor dezelfde tijd. Als dit het geval is, kunt u bladeren tussen de alarmen.

Als aan een activiteit een gesproken bericht is gekoppeld, kunt u op de afbeelding of op de knop naast de tijd drukken om het bericht opnieuw te beluisteren.

Druk op *OK* om de alarmweergave te sluiten.

Als de activiteit afvinkbaar is, zijn er twee knoppen. *Sluiten* en *Afvinken*. Druk op *Afvinken* om een activiteit af te vinken. Zie hoofdstuk 2.9 *Activiteit afvinken*.

2.6 Een activiteit toevoegen




Als u een activiteit wilt toevoegen, drukt u op de knop *Nieuw* in de dagkalender, de weekkalender, de maandkalender of het menu.

Hier worden twee manieren beschreven waarop u een activiteit kunt toevoegen. Selecteer de gewenste methode en de werking ervan bij Instellingen. Zie hoofdstuk 4.1.6 *Een activiteit toevoegen*.

2.6.1 Een activiteit toevoegen via de bewerkweergave


2.6.1.1 Nieuw of Uit standaardactiviteit selecteren

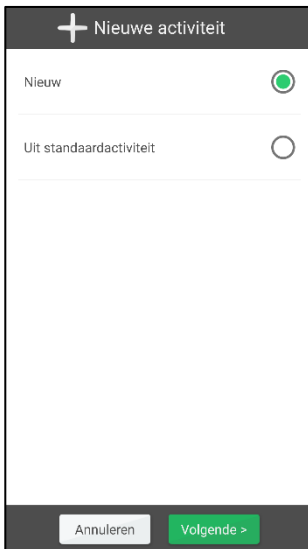

Kies of u een nieuwe activiteit wilt maken of een standaardactiviteit als sjabloon wilt gebruiken.

Als er geen standaardactiviteiten zijn of als u hebt ingesteld dat deze niet worden weergegeven op uw apparaat, worden ze niet weergegeven in dit venster.

2.6.1.2 Standaardactiviteit selecteren

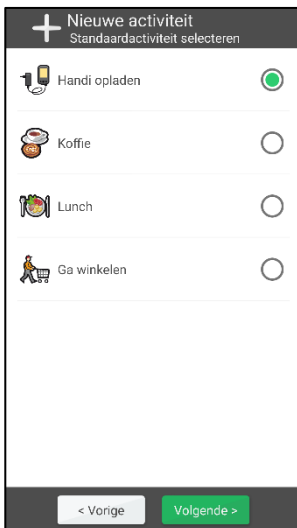

Kies de gewenste standaardactiviteit uit de lijst.
(Standaardactiviteiten maakt u via *myAbilia*.)

2.6.1.3 De eigenschappen van de activiteit invoeren in de bewerkweergave

The screenshot shows a form titled 'Nieuwe activiteit' with tabs for 'Naam', 'Extra', 'Alarm', and 'Herinnering'. The 'Naam' tab is active. Fields include: 'Naam' (text input), 'Afbeelding' (image icon), 'Datum' (calendar icon, value: 'do 20 aug.'), 'Type' (dropdown menu, value: 'Höger'), 'Tijd' (clock icon), 'Beschikbaar voor' (lock icon, value: 'Mij en ondersteuningsp...'), 'Verwijderen na' (checkbox), and 'Afvinkbaar' (checkbox with a checkmark). At the bottom are buttons for '< Vorige' and 'Opslaan'.

Geef hier de eigenschappen van de activiteit op: naam, afbeelding, begintijd, type alarm, herinneringen enzovoort.

Zie hoofdstuk 2.10 *Bewerkweergave* voor meer informatie over de bewerkweergave.

2.6.1.4 Herhaling selecteren

The screenshot shows the 'Nieuwe activiteit' form with the 'Terugkerend:' section. Options are: 'Eén keer' (radio button selected), 'Wekelijks' (radio button), 'Om de week' (radio button), 'Maandelijks' (radio button), and 'Jaarlijks' (radio button). At the bottom are buttons for '< Vorige' and 'Volgende >'.

Selecteer of, en zo ja hoe vaak, de activiteit moet terugkeren:

- *Eén keer*. De activiteit vindt maar één keer plaats.
- *Wekelijks*. De activiteit vindt elke week plaats op een bepaalde dag of bepaalde dagen.
- *Om de week*. De activiteit vindt om de week plaats op een bepaalde dag of bepaalde dagen.
- *Maandelijks*. De activiteit vindt elke maand plaats op een bepaalde dag of bepaalde dagen.
- *Jaarlijks*. De activiteit vindt elk jaar plaats op de geselecteerde datum.

Afhankelijk van uw keuze wordt een van de onderstaande weergaven getoond.

Wekelijks/ Om de week

The screenshot shows the 'Nieuwe activiteit' form with 'Terugkerend: Wekelijks'. A row of days is shown: 'ma', 'di', 'wo', 'do', 'vr', 'za', 'zo'. The 'za' button is highlighted in pink. Below is an 'Alles selecteren' button and a 'Geen einddatum' checkbox. At the bottom are buttons for '< Vorige' and 'Volgende >'.

Maandelijks

The screenshot shows the 'Nieuwe activiteit' form with 'Terugkerend: Maandelijks'. A calendar grid is shown with days 1 through 31. Below is a 'Geen einddatum' checkbox. At the bottom are buttons for '< Vorige' and 'Volgende >'.

Bij *Wekelijks* en *Om de week* is het mogelijk om meerdere dagen te selecteren, bijvoorbeeld dinsdag en donderdag. Met *Alles selecteren* selecteert u eenvoudig alle dagen tegelijk. Als u 'Geen einddatum' selecteert, zal de activiteit telkens weer worden toegevoegd. Als dit niet gewenst is, geeft u een einddatum op in het venster dat verschijnt wanneer u op *Volgende* drukt.

Bij de optie *Maandelijks* kunt u meerdere dagen selecteren, bijvoorbeeld de 1e en 15e van de maand. Als u 'Geen einddatum' selecteert, zal de activiteit telkens weer worden toegevoegd. Als dit niet gewenst is, geeft u een einddatum op in het venster dat verschijnt wanneer u op *Volgende* drukt.


Bij de optie *Jaarlijks* kunt u een activiteit toevoegen die jaarlijks terugkeert op de datum die u selecteert wanneer u op *Opslaan* drukt.

2.6.2 Stapsgewijs een activiteit toevoegen

Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe u een activiteit toevoegt.

Pas zelf aan welke stappen u wilt opnemen, zodat er niet te veel stappen zijn wanneer u een activiteit op deze manier toevoegt. Zie hoofdstuk 4.1.6 *Een activiteit toevoegen*.

2.6.2.1 Nieuw of Uit standaardactiviteit selecteren

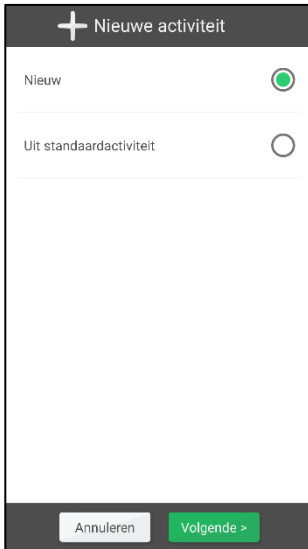


Kies of u een nieuwe activiteit wilt maken of een standaardactiviteit als sjabloon wilt gebruiken. Druk vervolgens op *Volgende*.

Als u ervoor kiest een standaardactiviteit te gebruiken, hoeft u alleen nog de datum en tijd toe te voegen.

Als er geen standaardactiviteiten zijn of als u hebt ingesteld dat deze niet worden weergegeven op uw apparaat, worden ze niet weergegeven in dit venster.


2.6.2.2 Standaardactiviteit selecteren

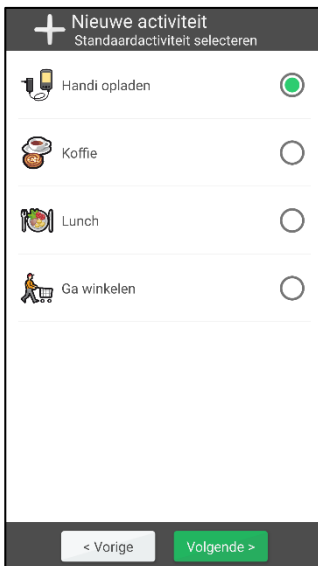

Selecteer de gewenste standaardactiviteit uit de lijst en druk op *Volgende*.


(Standaardactiviteiten maakt u via *myAbilia*.)

2.6.2.3 Datum selecteren

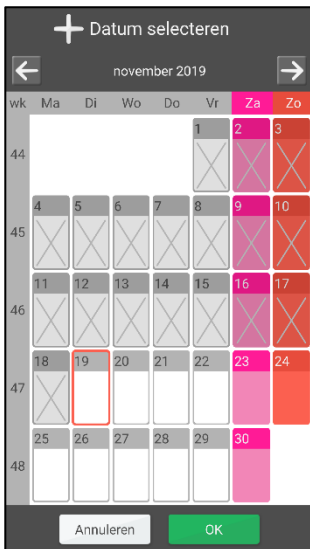

Selecteer de gewenste datum en druk op *Volgende*.

2.6.2.4 Naam invoeren

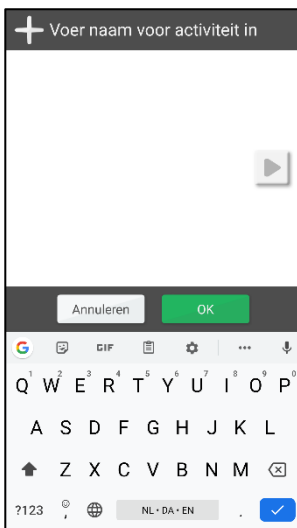

Geef de activiteit een naam en druk op *Volgende*.


2.6.2.5 Afbeelding selecteren



Selecteer een afbeelding (of sla deze stap over) en druk op *Volgende*.

De afbeeldingkiezer wordt beschreven in hoofdstuk 2.10.2 *Afbeelding selecteren*.

2.6.2.6 Type selecteren

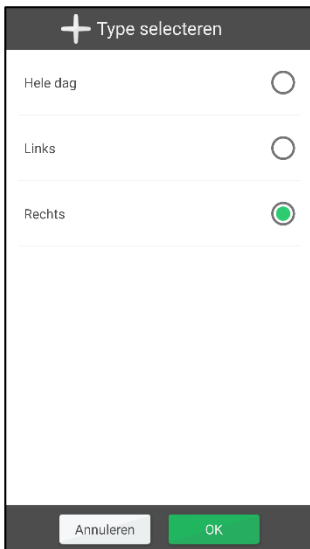

Selecteer wat voor activiteit u wilt toevoegen. Afhankelijk van de categorie-instelling zijn er verschillende opties om uit te kiezen.


Categorieën tonen

- *Hele dag*. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het veld Hele dag).
- *Links*. De activiteit wordt aan de linkerzijde van de dagkalender getoond.
- *Rechts*. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de dagkalender getoond.

Geen categorieën tonen:

- *Hele dag*. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het veld Hele dag).
- *Gepland*. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de dagkalender getoond.

2.6.2.7 Afvinkbaar selecteren

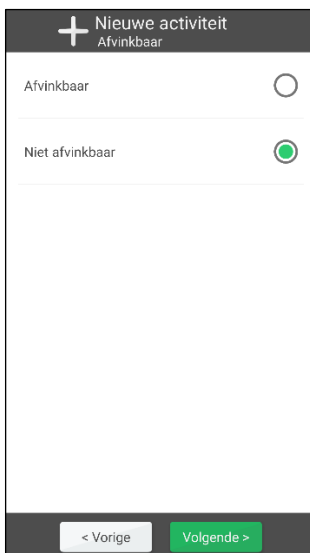


Hier geeft u op of de activiteit moet worden afgevinkt zodra deze is voltooid.

Een afvinkbare activiteit geeft extra steun, omdat u herinneringen ontvangt als de activiteit niet is uitgevoerd wanneer dat wel de bedoeling was. U ziet duidelijk in de agenda wanneer de activiteit moet plaatsvinden.

Selecteer het gewenste alternatief en druk op *Volgende*.

2.6.2.8 Verwijderen na selecteren

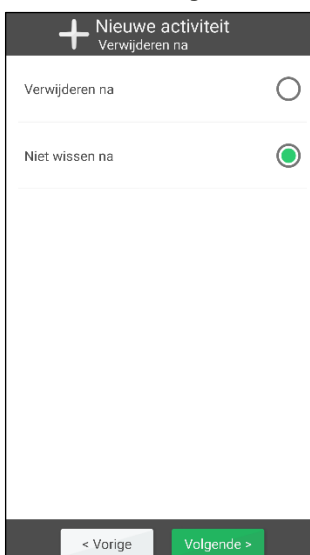


Hier selecteert u of de activiteit de volgende dag moet worden verwijderd als deze is voltooid.

Deze functie is vooral handig voor 'onbelangrijke' activiteiten. Dat maakt het makkelijker om gewenste activiteiten terug te vinden in uw dagboek.

Selecteer het gewenste alternatief en druk op *Volgende*.


2.6.2.9 Tijd selecteren

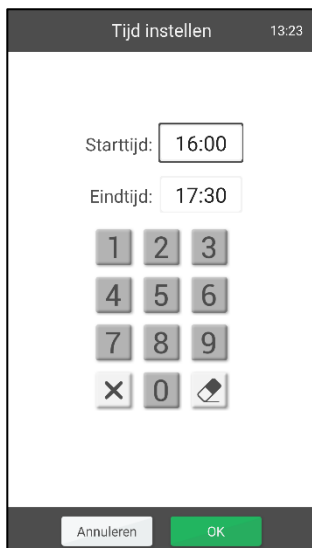

Hier voert u de begintijd en eventuele eindtijd van de activiteit in. Druk vervolgens op *Volgende*.

De tijdselectie wordt beschreven in hoofdstuk 2.10.5 *Tijd selecteren*.

2.6.2.10 Alarm selecteren

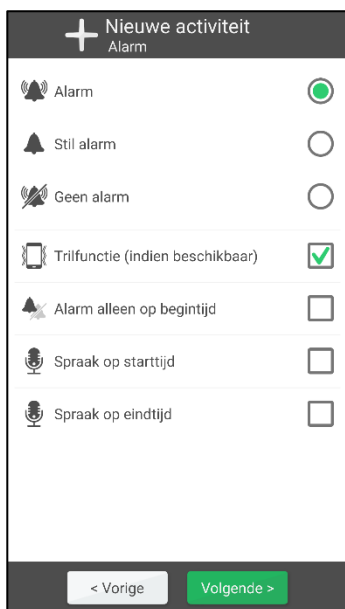

Hier selecteert u wat voor alarm de activiteit moet hebben.


- *Alarm*. Geluidssignaal.
- *Stil alarm*. Een alarm zonder geluid, maar met visuele weergave.
- *Geen alarm*. Er is geen alarmweergave.
- *Trilling* (als het apparaat een trilfunctie heeft).
- *Alarm alleen op begintijd*. Er is geen alarm op de eindtijd.

U kunt ook een gesproken bericht toevoegen aan het alarmsignaal op de begin- en/of eindtijd. Zie hoofdstuk 2.10.10.1 *Een gesproken bericht opnemen*.

Selecteer het gewenste alternatief en druk op *Volgende*.

Als er geen actieve selectie wordt gemaakt, gebruikt het apparaat de standaardoptie. Zie hoofdstuk 4.1.6.3 *Voorselectie*.


2.6.2.11 Extra informatie selecteren

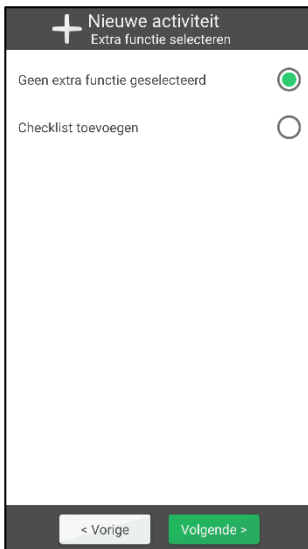

Selecteer of u een extra functie wilt koppelen aan de activiteit. Zie hoofdstuk 2.10.9 *Een extra functie koppelen*.

Als u geen extra functie wilt koppelen, drukt u gewoon op *Volgende*.

2.6.2.12 Herinnering selecteren

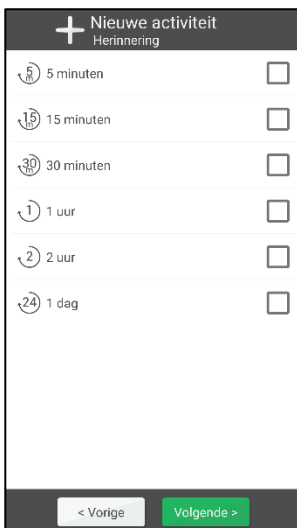


Selecteer of u een of meer herinneringen wilt ontvangen op verschillende momenten voordat de activiteit begint.

- 5 minuten
- 15 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 1 dag

Selecteer het gewenste alternatief en druk op *Volgende*.

2.6.2.13 Herhaling selecteren

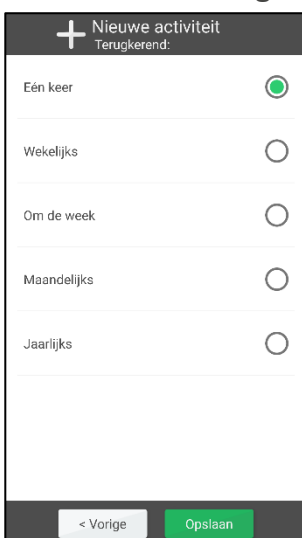

Selecteer of, en zo ja hoe vaak, de activiteit moet terugkeren:


- *Eén keer*. De activiteit vindt maar één keer plaats.
- *Wekelijks*. De activiteit vindt elke week plaats op een bepaalde dag of bepaalde dagen.
- *Om de week*. De activiteit vindt om de week plaats op een bepaalde dag of bepaalde dagen.
- *Maandelijks*. De activiteit vindt elke maand plaats op een bepaalde dag of bepaalde dagen.
- *Jaarlijks*. De activiteit vindt elk jaar plaats op de geselecteerde datum.

Afhankelijk van uw keuze wordt een van de onderstaande weergaven getoond.

Wekelijks/ Om de week



Maandelijks

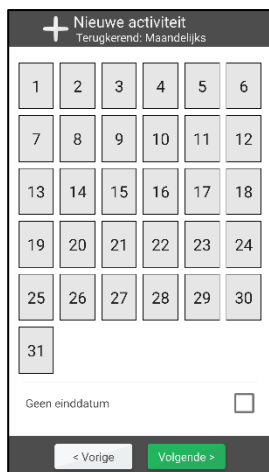

Bij *Wekelijks* en *Om de week* is het mogelijk om meerdere dagen te selecteren, bijvoorbeeld dinsdag en donderdag. Met *Alles selecteren* selecteert u eenvoudig alle dagen tegelijk. Als u 'Geen einddatum' selecteert, zal de activiteit telkens weer worden toegevoegd. Als dit niet gewenst is, geeft u een einddatum op in het venster dat verschijnt wanneer u op *Volgende* drukt.

Bij de optie *Maandelijks* kunt u meerdere dagen selecteren, bijvoorbeeld de 1e en 15e van de maand. Als u 'Geen einddatum' selecteert, zal de activiteit telkens weer worden toegevoegd. Als dit niet gewenst is, geeft u een einddatum op in het venster dat verschijnt wanneer u op *Volgende* drukt.

Bij de optie *Jaarlijks* kunt u een activiteit toevoegen die jaarlijks terugkeert op de datum die u selecteert wanneer u op *Opslaan* drukt.

2.7 Activiteit bewerken



Als u een activiteit wilt bewerken, opent u de activiteitsweergave en drukt u op de knop *Bewerken*. Dan wordt de bewerkweergave weergegeven. Zie hoofdstuk 2.10 *Bewerkweergave*.

Zodra u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, moet u in het geval van een terugkerende activiteit selecteren hoe de activiteit moet worden gewijzigd:

- *Alleen deze dag*. Alleen de geselecteerde activiteit wordt gewijzigd.
- *Deze dag en verder*. Alle activiteiten vanaf de geselecteerde dag worden gewijzigd.

2.8 Activiteit verwijderen




Als u een activiteit wilt verwijderen, opent u de activiteitsweergave en drukt u op de knop *Verwijderen*. Voordat de activiteit wordt verwijderd, moet u bevestigen dat u dit wilt doen.

Als de activiteit wordt herhaald, moet u kiezen hoe u deze wilt verwijderen:

- *Alleen deze activiteit*. Alleen de geselecteerde activiteit wordt verwijderd.
- *Deze activiteit en verder*. Alle activiteiten vanaf de geselecteerde dag worden verwijderd.
- *Alles*. Alle activiteit in deze reeks worden verwijderd, zowel in het verleden als in de toekomst.

2.9 Activiteit afvinken

Wanneer er een alarm is gekoppeld worden activiteiten afgevinkt in de alarmweergave. Anders in de activiteitsweergave.

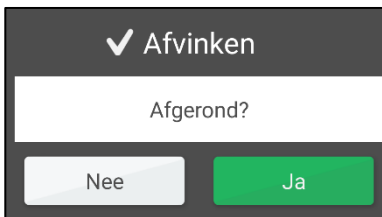

Druk op *Ja* om te bevestigen dat de activiteit is voltooid. In de activiteitsweergave, dagkalender en weekkalender verschijnt een vinkje.

Als u een activiteit vergeet af te vinken of als u op *Nee* drukt, wordt gedurende twee uur om het kwartier een herinnering getoond.


Als u een activiteit per ongeluk heeft afgevinkt, drukt u op de knop *Ongedaan maken* in de activiteitsweergave.

2.10 Bewerkweergave

Via de bewerkweergave kunt u de eigenschappen van een activiteit aanpassen. U opent de bewerkweergave door in de activiteitsweergave op de knop *Bewerken* te drukken. Zie hoofdstuk 2.4.4 *De activiteit bewerken*.


U kunt ook nieuwe activiteiten toevoegen via de bewerkweergave. Zie hoofdstuk 2.6.1 *Een activiteit toevoegen via de bewerkweergave*.

De bewerkweergave heeft vier tabbladen: Naam, Extra, Alarm en Herinnering.

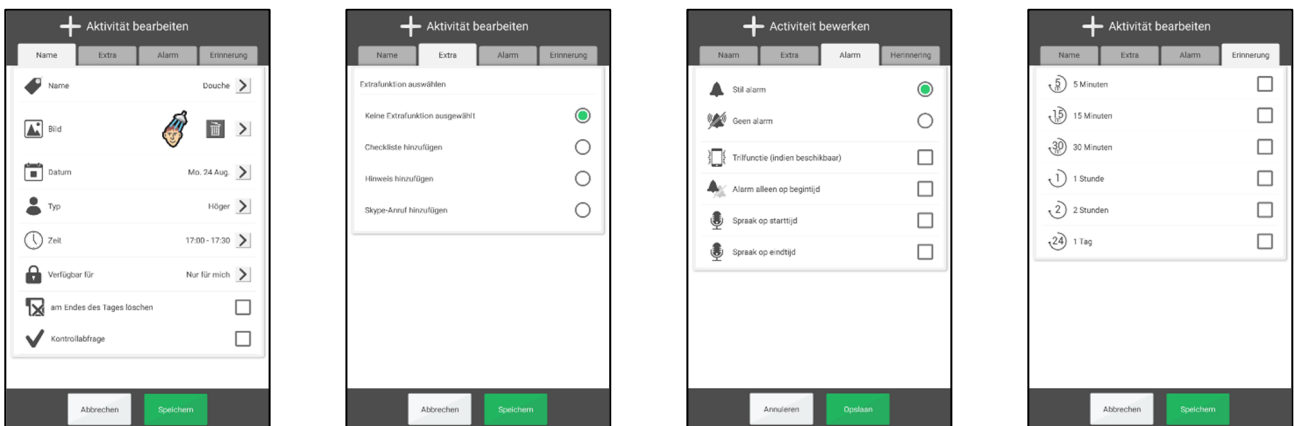

In dit hoofdstuk worden de functies van de bewerkweergave beschreven.


2.10.1 Naam invoeren

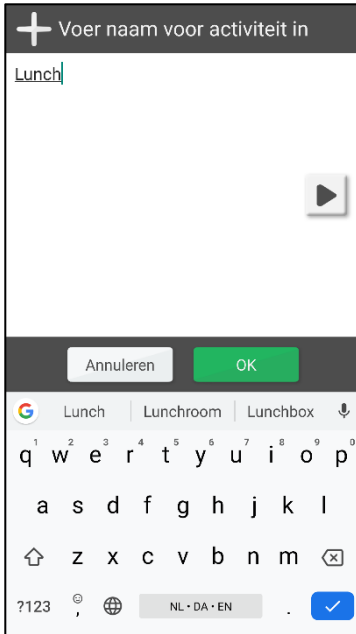

U voert een naam in door op het tabblad Naam op *Naam* te drukken.

Het venster van MEMOplanner voor tekstinput wordt weergegeven.

2.10.2 Afbeelding selecteren

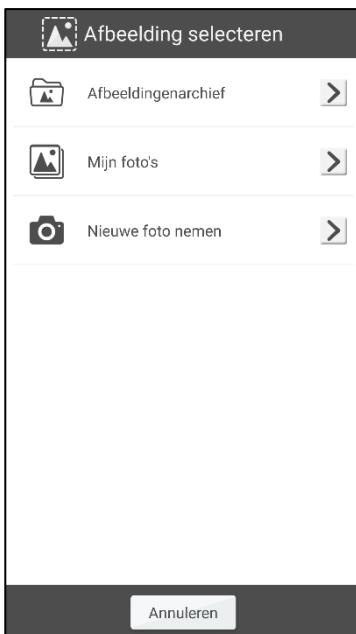

U selecteert een afbeelding door op het tabblad Naam op *Afbeelding* te drukken.


Vervolgens wordt de afbeeldingkiezer van MEMOplanner weergegeven. Hiermee kunt u de volgende afbeeldingen selecteren:

- Afbeeldingenarchief
- Mijn foto's
- Een nieuwe foto nemen

U kunt instellen welke keuzes worden weergegeven. Zie hoofdstuk 4.3 *Afbeeldingkiezer*.

2.10.2.1 Afbeeldingenarchief


Via 'Afbeeldingenarchief' kunt u een afbeelding selecteren uit het individuele afbeeldingenarchief. Zie ook hoofdstuk 1.2 *Afbeeldingenarchief in MEMOplanner*.

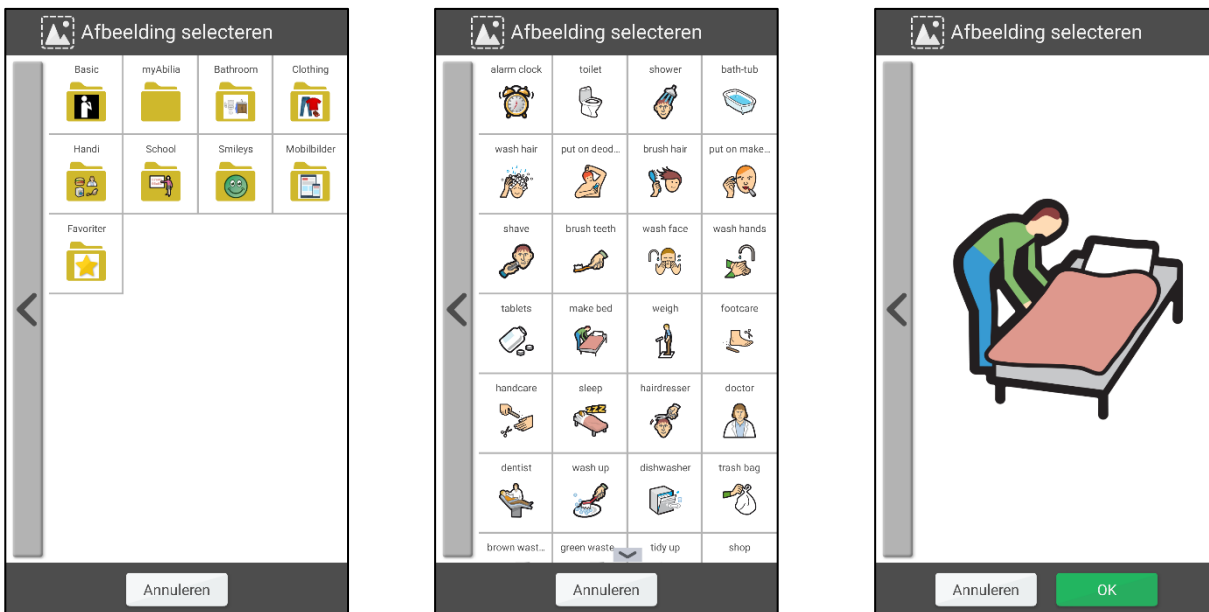

Door omhoog/omlaag te vegen, kunt u meer afbeeldingen bekijken.

2.10.2.2 Mijn foto's

Via 'Mijn foto's' kunt u foto's kiezen die met de camera zijn gemaakt. Zie ook hoofdstuk 3.2 *Mijn foto's*.

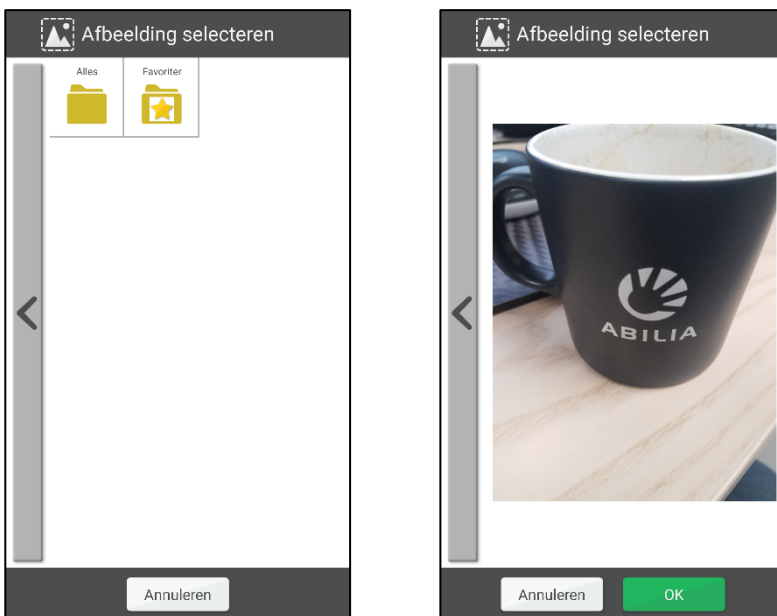


Door omhoog/omlaag te vegen, kunt u meer afbeeldingen bekijken.

2.10.2.3 Een nieuwe foto nemen

Via 'Nieuwe foto nemen' kunt u een nieuwe foto nemen met de ingebouwde camera. De nieuwe foto wordt automatisch opgeslagen in de map 'Mobiële afbeeldingen' van het afbeeldingenarchief.

2.10.3 Datum selecteren

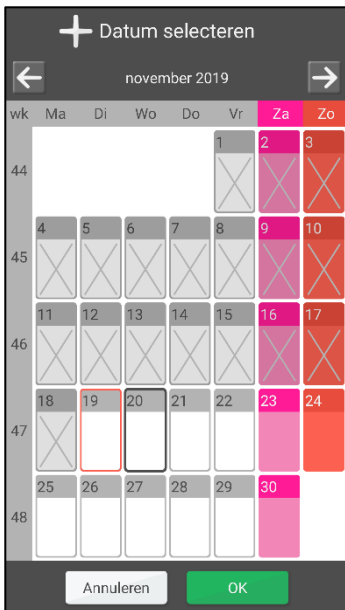

U selecteert de datum door op het tabblad Naam op *Datum* te drukken.

Vervolgens wordt de datumkiezer van MEMOplanner weergegeven.




U kunt maanden vooruit bladeren.



U kunt maanden terugbladeren.

2.10.4 Type selecteren

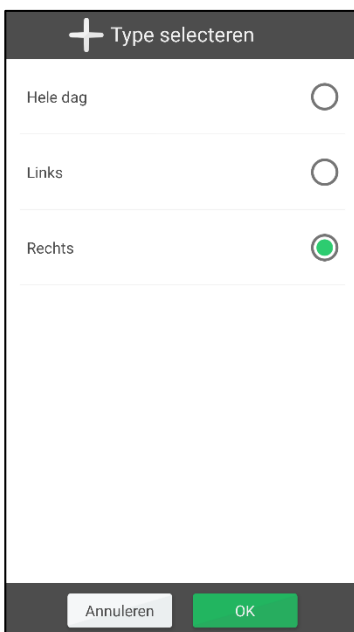

Selecteer wat voor activiteit u wilt toevoegen.

Afhankelijk van de categorie-instelling zijn er verschillende opties om uit te kiezen.

Categorieën tonen

- *Hele dag*. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het veld Hele dag).
- *Links*. De activiteit wordt aan de linkerzijde van de dagkalender getoond.
- *Rechts*. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de dagkalender getoond.

Geen categorieën tonen:

- *Hele dag*. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het veld Hele dag).
- *Gepland*. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de dagkalender getoond.

2.10.5 Tijd selecteren



Hier voert u de begintijd en eventuele eindtijd van de activiteit in.




Hiermee wist u alle cijfers uit de gemarkeerde rij.



Hiermee wist u het laatste cijfer uit de gemarkeerde rij

U kunt instellen of de eindtijd moet worden weergegeven.

2.10.6 Beschikbaar voor

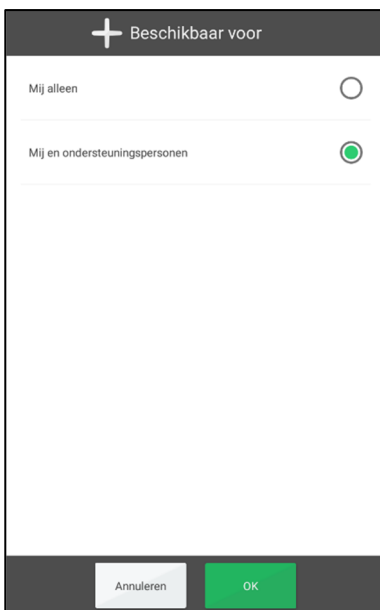


Beschikbaar voor is in te stellen op

- Mij alleen
- Mij en ondersteuningspersonen (Standaard)

Indien *Mij alleen* geselecteerd is, dan is de activiteit voor een helper in myAbilia niet zichtbaar.

Een symbool met een hangslot geeft aan dat de activiteit is ingesteld op *Mij alleen*.

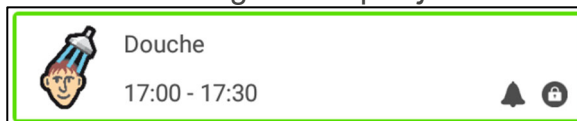

2.10.7 Afvinkbaarheid selecteren



Op het tabblad Naam kunt u een selectievakje aanvinken om de activiteit afvinkbaar te maken.

Een afvinkbare activiteit geeft extra steun, omdat u herinneringen ontvangt als de activiteit niet is uitgevoerd wanneer dat wel de bedoeling was. U ziet duidelijk in de agenda wanneer de activiteit moet plaatsvinden.

2.10.8 Verwijderen na selecteren




Op het tabblad Naam kunt u een selectievakje aanvinken om 'Verwijderen na' in te schakelen.

Dit houdt in dat de activiteit wordt verwijderd zodra de dag van de activiteit is verstreken.

Deze functie is vooral handig voor 'onbelangrijke' activiteiten. Dat maakt het makkelijker om gewenste activiteiten terug te vinden in uw dagboek.

2.10.9 Een extra functie koppelen

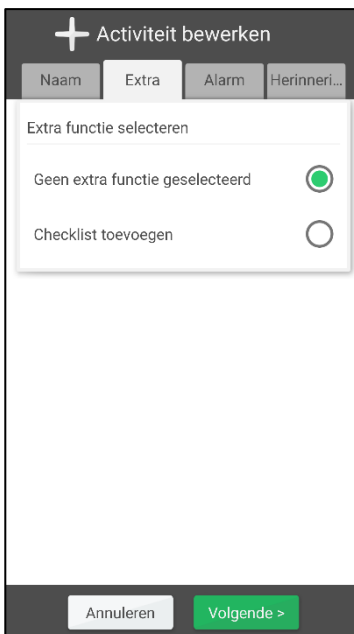


Op het tabblad Extra kunt u een extra functie koppelen aan de activiteit.

U kunt kiezen uit het toevoegen van een checklist of het koppelen van een Skype-contact*.

**De functie 'Contact maken met Skype-contact' is niet standaard ingesteld. Zie 2.11 Skype in activiteit.*


2.10.9.1 Een bestaande checklist koppelen

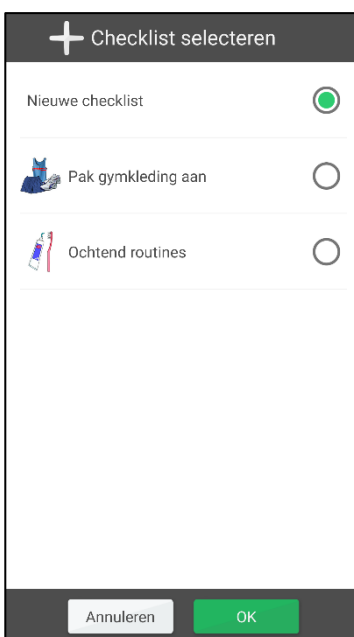

Als u op *Checklist toevoegen* drukt, kunt u een nieuwe checklist maken of een bestaande checklist kiezen.

De bestaande checklists worden beheerd via *myAbilia*.

2.10.9.2 Een nieuwe checklist maken

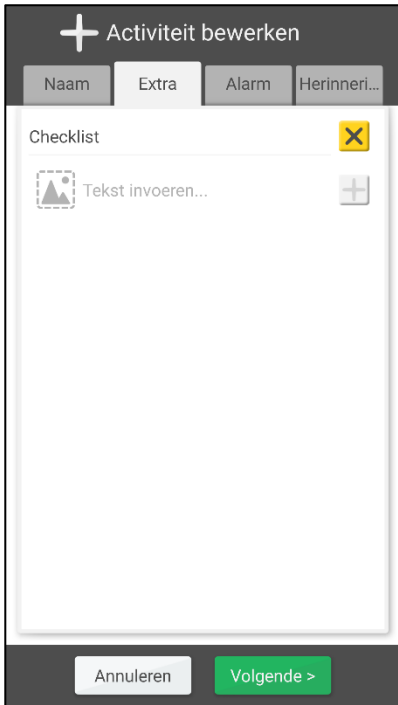

De checklist wordt gemaakt door in het invoerveld taken in te voeren.



U voegt als volgt een taak toe:

1. U selecteert een afbeelding door op het afbeeldingenveld te drukken. Vervolgens wordt de afbeeldingkiezer weergegeven. De naam van de afbeelding wordt automatisch als tekst ingevoerd.
2. Geef de taak een naam door op het tekstveld te drukken. Het tekstinvoervenster wordt geopend.
3. Druk op het *plusteken* om de taak aan de lijst toe te voegen.

Om een taak te bewerken, verwijderen of de volgorde van de taken te wijzigen, drukt u op de taak en vervolgens op een van de volgende knoppen:




2.10.9.3 Een notitie toevoegen

Als u op Notitie toevoegen drukt, kunt u kiezen tussen een nieuwe notitie aanmaken of kiezen tussen bestaande notities.

De bestaande notities kunt u beheren via myAbilia.


2.10.9.4 Een nieuwe notitie aanmaken

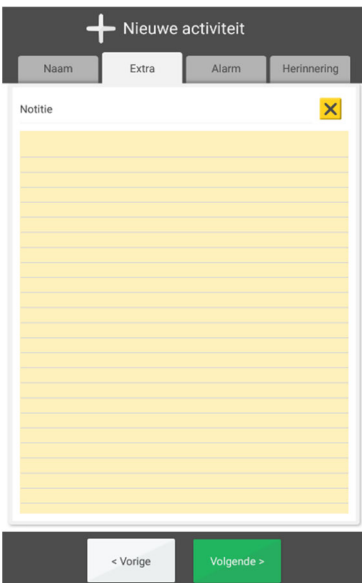

Ga als volgt te werk om een nieuwe notitie aan te maken:

1. Druk op *Nieuwe notitie*.
2. Voer de notitie in.
3. Druk op *Volgende* om de notitie op te slaan.

2.10.10 Alarm selecteren

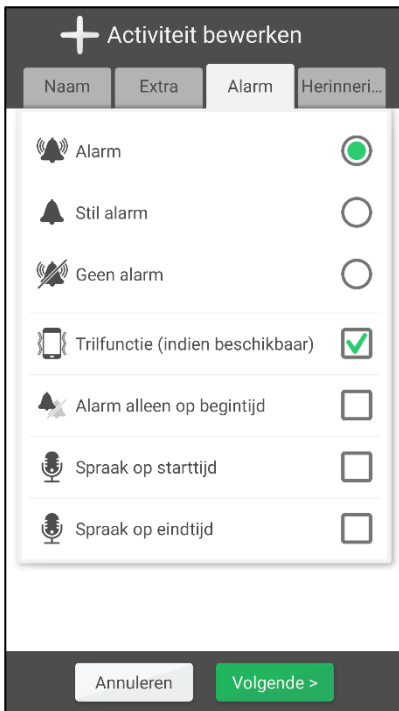

Selecteer op het tabblad Alarm wat voor alarm wordt geactiveerd voor de activiteit.

U heeft de volgende keuzes:

- *Alarm*. Geluidssignaal.
- *Stil alarm*. Een alarm zonder geluid, maar met visuele weergave.
- *Geen alarm*. Er is geen alarmweergave.
- *Alleen trilling* (als het apparaat een trilfunctie heeft).
- *Alarm alleen op begintijd*. Er is geen alarm op de eindtijd.

Als er geen actieve selectie wordt gemaakt, gebruikt het apparaat de standaardoptie. Zie hoofdstuk 4.1.6.3 *Voorselectie*




Het alarm kan vervolgens worden aangevuld met een gesproken bericht. Hieronder leest u hoe u zo'n bericht kunt opnemen.

2.10.10.1 Een gesproken bericht opnemen



Om een gesproken bericht op te nemen, gaat u naar het tabblad Alarm en drukt u op de knop *Spraak*.

Druk op *Opnemen*, spreek het bericht in en druk op *Stoppen* zodra u klaar bent.

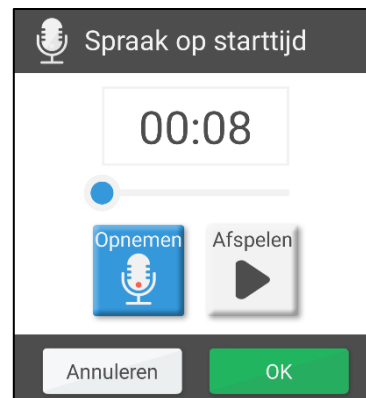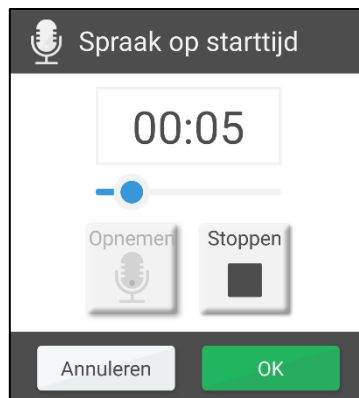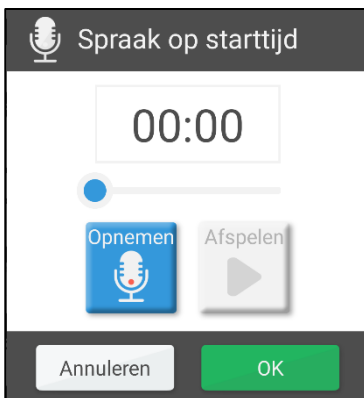

Het opgenomen bericht kan maximaal 30 seconden duren.

2.10.11 Herinnering selecteren

The screenshot shows a mobile application interface for editing an activity. At the top, there is a dark header with a white plus sign and the text 'Activiteit bewerken'. Below the header are four tabs: 'Naam', 'Extra', 'Alarm', and 'Herinneri...'. The 'Herinneri...' tab is selected, and a white modal menu is displayed over it. This menu lists six reminder options, each with a circular icon containing a number and a checkbox to its right:

Herinnering	Selectie
5 minuten	<input type="checkbox"/>
15 minuten	<input type="checkbox"/>
30 minuten	<input type="checkbox"/>
1 uur	<input type="checkbox"/>
2 uur	<input type="checkbox"/>
1 dag	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Annuleren' (white) and 'Volgende >' (green).

Op het tabblad Herinnering kunt u selecteren of u een of meer herinneringen wilt ontvangen op verschillende momenten voordat de activiteit begint.

- 5 minuten
- 15 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 1 dag

2.11 Skype in activiteit

In MEMOplanner kunt u een Skype-contact koppelen aan een activiteit. Het kan handig zijn om Skype-contacten toe te voegen als de gebruiker wil praten of overleggen met de geselecteerde mensen. Als MEMOplanner bijvoorbeeld wordt gebruikt als hulpmiddel in huis, kunnen nachtverpleegkundigen hulp bieden met een videochat, zodat ze niet hoeven langs te komen.

Voordat u een Skype-contact kunt toevoegen, moet u zorgen voor het volgende:


1. Skype moet zijn geïnstalleerd en de gebruiker moet bij Skype zijn ingelogd. Zie het *Handboek*.
2. De functie 'Contact maken met Skype-contact' moet worden ingeschakeld. Zie *4.1.6.2 Activiteit toevoegen*.

2.11.1 Activiteitsweergave met een gekoppeld Skype-contact

Wanneer er een Skype-contact is gekoppeld aan de activiteit, wordt deze in de activiteitsweergave getoond met zijn of haar naam en mogelijk met een afbeelding. Er staat ook een knop bij.



Druk op de knop om een gesprek te starten. Wanneer het gesprek tot stand komt, wordt de gespreksweergave met video geopend.

Zodra het gesprek is afgerond, drukt u op de *startknop* om terug te keren naar MEMOplanner.

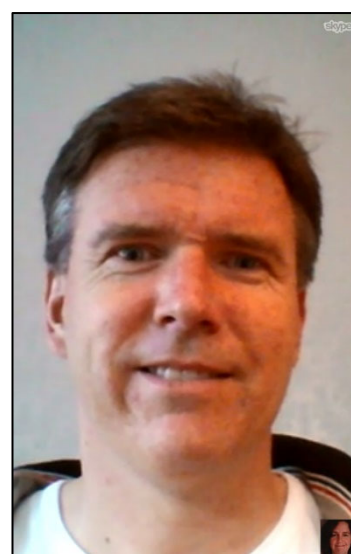

2.11.2 Een Skype-contact koppelen aan een activiteit

Wanneer u de mogelijkheid om een Skype-contact toe te voegen heeft ingeschakeld, wordt deze keuze als extra functie getoond. (Zie 2.6 *Een activiteit toevoegen* voor meer informatie over het toevoegen van een activiteit.)

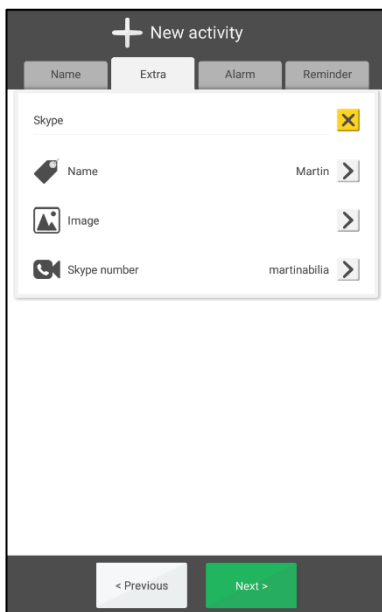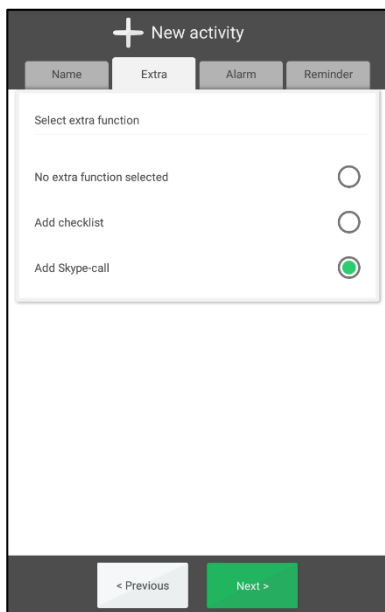


U koppelt als volgt een Skype-contact:

1. Druk op het tekstveld om de naam in te voeren van degene die moet worden gebeld. Het tekst invoervenster wordt geopend.
2. U selecteert een afbeelding door op het afbeeldingenveld te drukken. Vervolgens wordt de afbeeldingkiezer weergegeven.
3. Druk op de rij voor Skype-nummers om het Skype-nummer van het contact in te voeren.

3. Menu

In het menu staan nog meer MEMOplanner-functies die u kunt kiezen.

U kunt instellen wat moet worden weergegeven in het menu. Zie hoofdstuk 4.4 *Menu*.

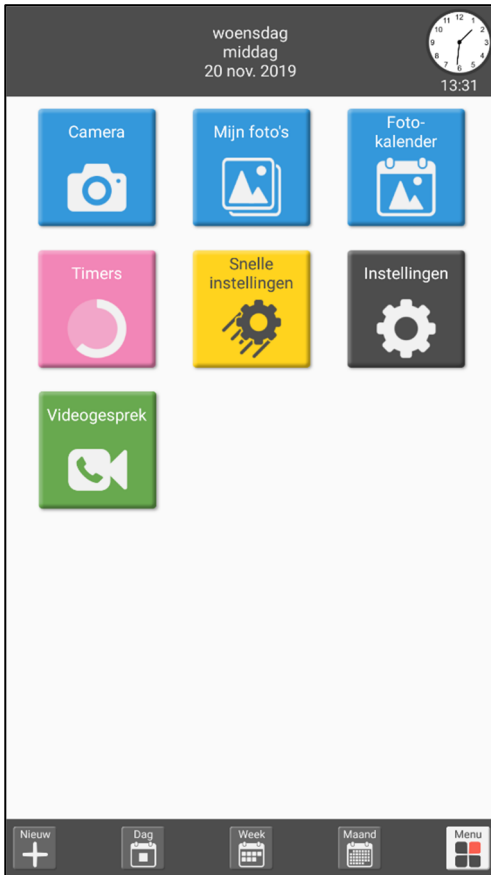

Helemaal bovenaan wordt informatie over de dag en tijd weergegeven.


Het menu bevat de volgende functies:

- Camera
- Mijn foto's
- Fotokalender
- Timers
- Snel-instellingen
- Instellingen

U kunt ook instellen dat een videogesprek (Skype) moet worden weergegeven.

Het menu kan ook worden ingesteld als startpagina.

3.1 Camera

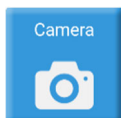

Camera

Met de camera kunt u zelf foto's maken. Zodra u een foto maakt, kunt u deze opslaan of verwijderen.

De foto komt in **Mijn foto's** te staan.

De camera heeft zijn eigen instellingen. Hoe hij werkt, hangt af van uw apparaat. Zie het *Handboek*.

3.2 Mijn foto's




In **Mijn foto's** ziet u alle foto's die met de camera zijn gemaakt, plus eventuele andere afbeeldingen die aan het apparaat zijn toegevoegd.

In **Mijn foto's** worden de afbeeldingen in twee lijsten weergegeven, elk met een eigen tabblad.

- *Favorieten*. Hier worden alle afbeeldingen weergegeven die in de map *Favorieten* van het afbeeldingenarchief in myAbilia staan. Foto's die als favoriet zijn gemarkeerd op het tabblad *Alles*, worden ook gesynchroniseerd met myAbilia. De synchronisatie begint zodra u *Mijn foto's* sluit.

Opmerking: De foto's worden gesynchroniseerd met alle apparaten met hetzelfde account.

- *Alles*. Hier worden alle foto's weergegeven die op het apparaat zijn opgeslagen. De foto's staan in chronologische volgorde, met de meest recente foto eerst.

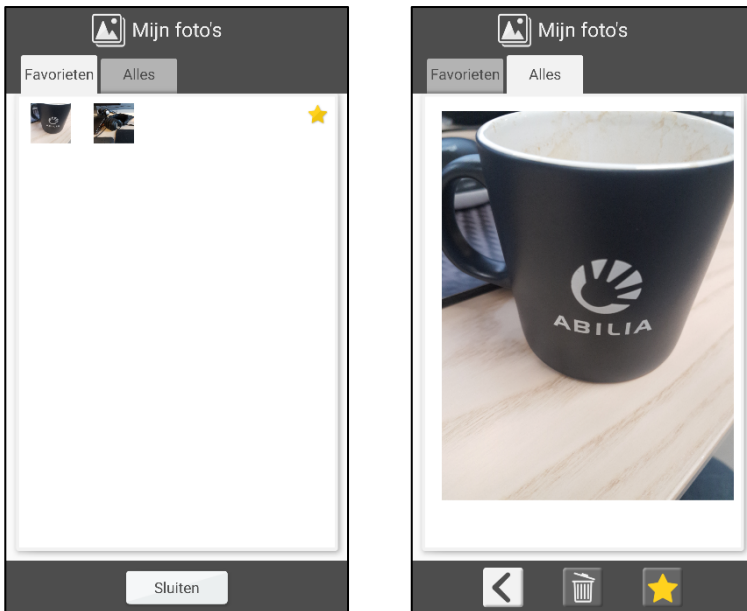

Als u op een foto drukt, wordt deze weergegeven op het scherm. Vervolgens kunt u de foto markeren als favoriet, die markering ongedaan maken of de foto verwijderen.

Veeg omlaag om naar de volgende foto te bladeren.

3.2.1 Afbeelding selecteren als favoriet



Als u een afbeelding wilt markeren als favoriet, moet u deze eerst selecteren in de lijst. Vervolgens drukt u op de knop *Favoriet*.

Als u een afbeelding niet meer als favoriet wilt markeren, doet u hetzelfde.

De afbeeldingen die zijn gemarkeerd als favoriet, worden ook weergegeven in de **fotokalender**.

3.2.2 Een afbeelding verwijderen




Als u een afbeelding wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en drukt u op de knop *Verwijderen*. Voordat de afbeelding wordt verwijderd, moet u bevestigen dat u dit wilt doen.

3.3 Fotokalender



De fotokalender wordt als screensaver gebruikt als u niet wilt dat de agenda continu wordt weergegeven.

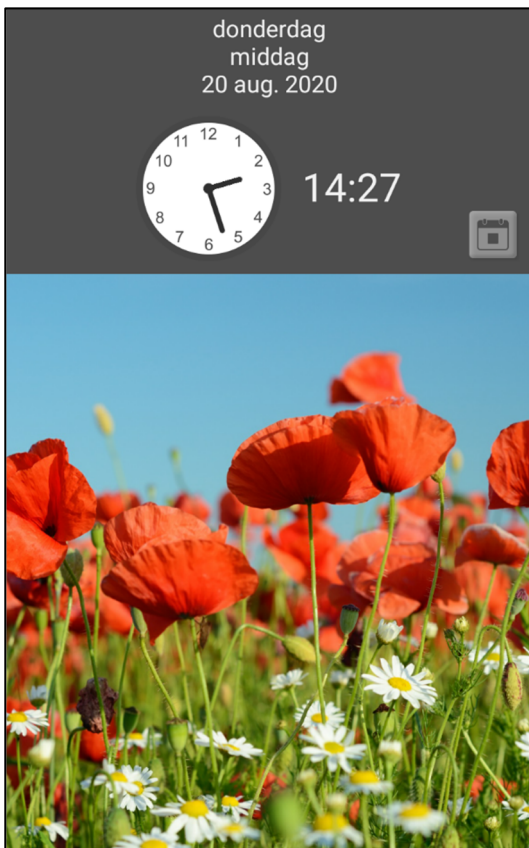


De fotokalender kan worden gebruikt om foto's te tonen die een positieve, motiverende uitwerking hebben op de gebruiker.

Hier worden de foto's getoond die als favoriet zijn gemarkeerd in *Mijn foto's*.

Als u nog geen eigen afbeeldingen heeft geselecteerd, wordt een standaardafbeelding getoond.

Als er meerdere afbeeldingen zijn, worden deze om de vijf minuten automatisch gewisseld. U kunt twee keer vlug achter elkaar op een afbeelding drukken om een andere afbeelding te laden.

Om terug te keren naar de standaardbeginpagina,

drukt u op .

Het pictogram verschilt afhankelijk van de gekozen startpagina.

Voor het instellen van de startpagina zie hoofdstuk 4.2.2 Startpagina.

De fotokalender kan ook worden ingesteld als startpagina.

De fotokalender is alleen beschikbaar op grote schermen.

3.4 Timers



Via *Timers* kunt u een timer starten.



U kunt zelf een tijd opgeven voor de timer of een vooraf ingestelde timer (standaardtimer) selecteren.

Wanneer wordt afgeteld, wordt dit weergegeven op de *menuknop* in de dagkalender, de weekkalender, de maandkalender en het menu.

Het actieve aftellen wordt weer zichtbaar wanneer u op het aftelpictogram drukt.




3.4.1 Nieuwe timer starten

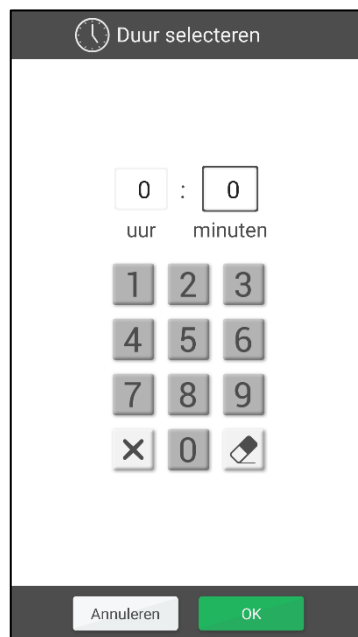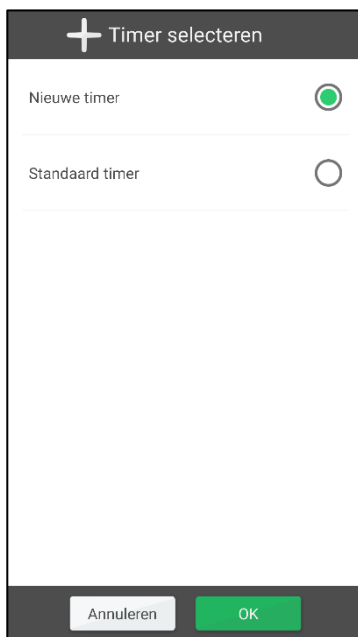

Selecteer 'Nieuwe timer' en voer de tijd van de timer in. De timer start zodra u op *OK* drukt.

De aftelweergave kan worden verborgen door op *Sluiten* te drukken. Om de timer te stoppen drukt u op het kruisje.

3.4.2 Standaardtimer starten

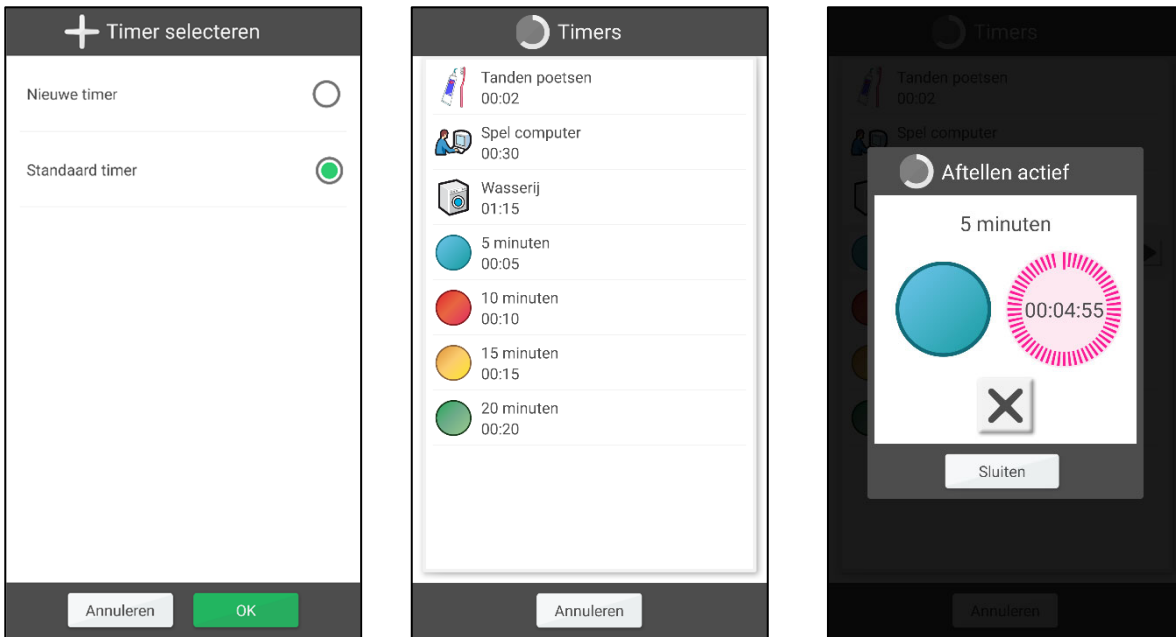

Selecteer 'Standaardtimer' en kies vervolgens de gewenste standaardtimer in de lijst. De timer start meteen.

Zodra de timer is begonnen, kunt u het aftelmenu verbergen door op *Sluiten* te drukken. Om de timer te stoppen drukt u op het kruisje.

Standaardtimers maakt u via Instellingen (zie hoofdstuk 4.5.2 *Standaardtimers*) of via *myAbilia*.

3.4.3 Alarmen

Zodra het aftellen is voltooid, wordt de aftelweergave getoond en klinkt er een alarm. U sluit deze weergave door op *OK* te drukken.

3.5 Snel-instellingen




Via Snel-instellingen kunt u eenvoudige instellingen voor het apparaat selecteren. Zie het *Handboek*.

3.6 Videogesprek (Skype)



Met Videogesprek (Skype) kunt u een videogesprek voeren via Skype. Videogesprekken zijn alleen mogelijk als Skype is geïnstalleerd op het apparaat. Bovendien moet de gebruiker een Skype-account hebben. Zie het *Handboek*.

4. Instellingen

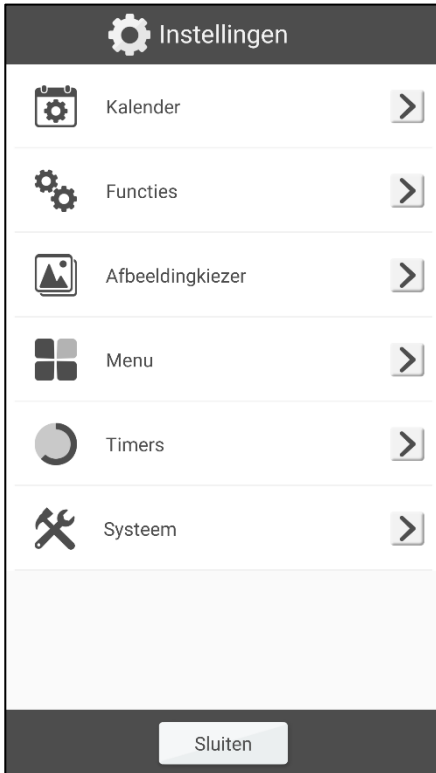

Via **Instellingen** kunt u MEMOplanner aanpassen aan wat de gebruiker nodig heeft en wat hij of zij wel en niet kan.

In het menu Instellingen worden instellingen zo veel mogelijk onderverdeeld in functies.

De instellingen kunnen worden verborgen of worden beveiligd met een code.





In dit hoofdstuk worden de instellingen in dezelfde volgorde en structuur beschreven als ze in het programma worden aangetroffen.

4.1 Kalender

4.1.1 Algemeen


4.1.1.1 Klok (en tijdlijn)

Hier stelt u in hoe de klok wordt weergegeven in het bovenste veld van de dagkalender, de weekkalender, de maandkalender en het menu.

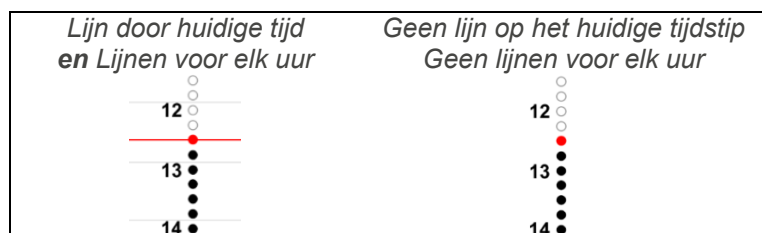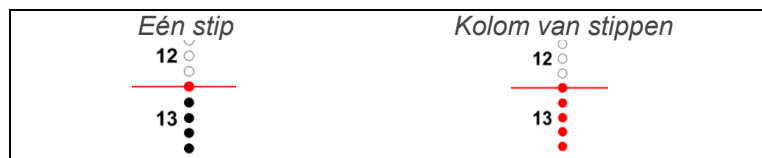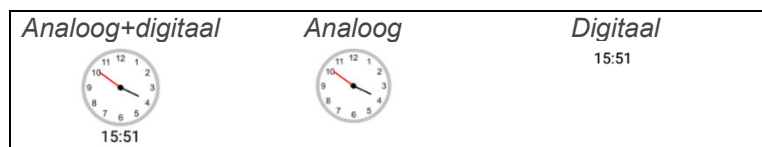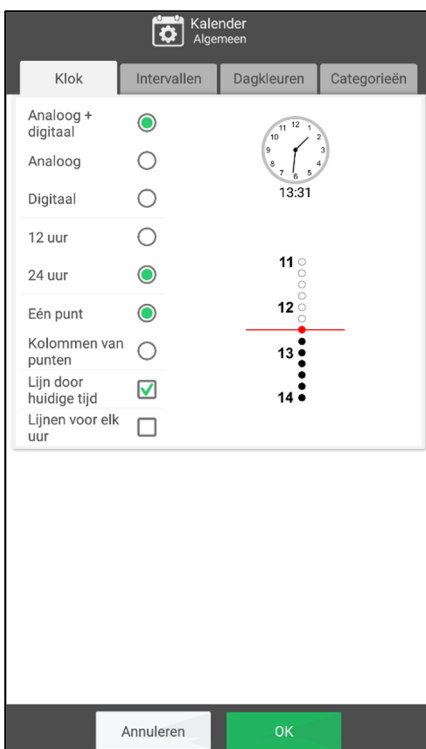

4.1.1.2 Intervallen (dagdelen)

Hier stelt u in wanneer de vroege ochtend, dag, avond en nacht beginnen.

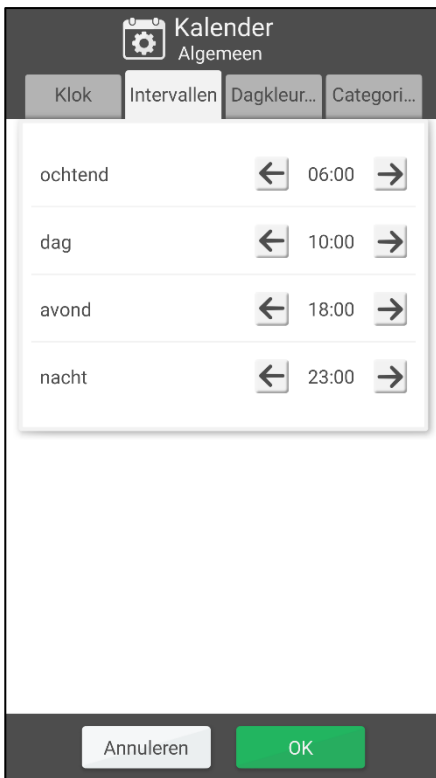

Hoe u de dag verdeelt, heeft invloed op wat er te zien is in het bovenste veld van de dagkalender, de weekkalender, de maandkalender en het menu.

Ook heeft dit invloed op de intervalweergave van de tijdlijn. Zie hoofdstuk 2.1.7 *Menu Scherm*.

De standaardinstelling is:


- Vroege ochtend: 6:00
- Dag: 10:00
- Avond: 18:00
- Nacht: 23:00

(12:00 is de grens tussen ochtend en middag).

De begintijd kunt u aanpassen door op de pijlen te drukken.

4.1.1.3 Dagkleuren

Hier stelt u in of u kleuren voor dagen wilt gebruiken.

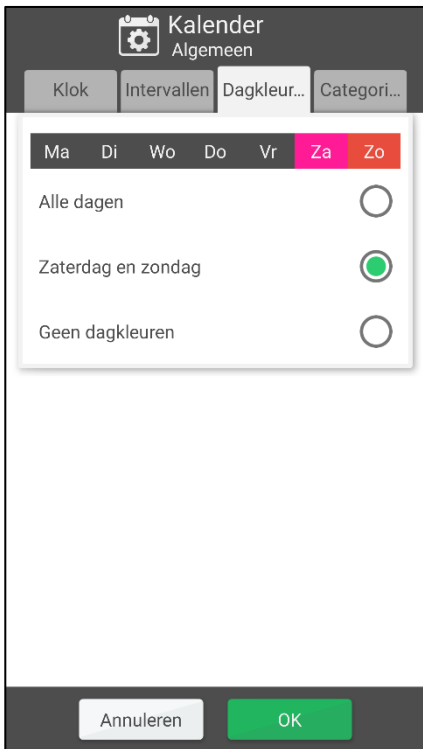

De dagkleuren worden weergegeven in de dagkalender, de weekkalender en de fotokalender. Ook worden deze weergegeven in de dagkolommen van de weekkalender en maandkalender.


Alle dagen



Zaterdag en zondag




Geen dagkleuren

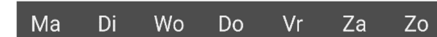

4.1.1.4 Categorieën

Hier kiest u of activiteiten kunt indelen in categorieën die links of rechts worden weergegeven in de dagkalender.

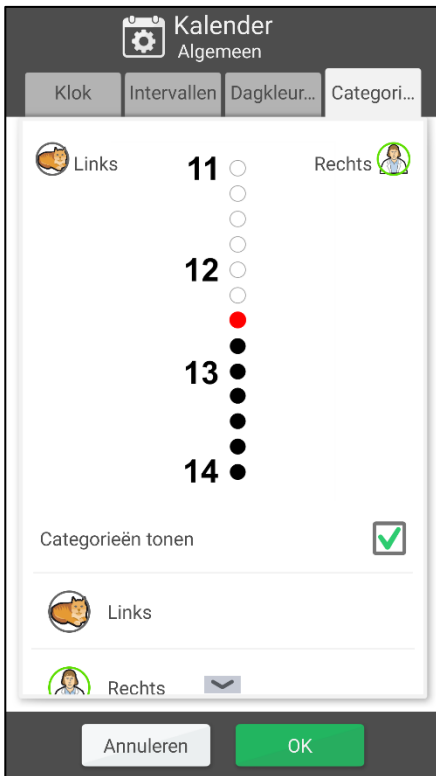

- *Categorieën tonen.* Selecteer of de activiteiten links of rechts moeten worden weergegeven.



Druk op dit symbool om een afbeelding voor de categorie te selecteren.

Links


Druk op de tekst om een de categorie een naam te geven.

- *Kleuren tonen.* Selecteer of de activiteiten links in het grijs worden weergegeven en de activiteiten rechts in het groen.

4.1.2 Dagkalender

4.1.2.1 Bovenste veld

Hier kiest u wat in het bovenste veld van de dagkalender moet worden weergegeven.

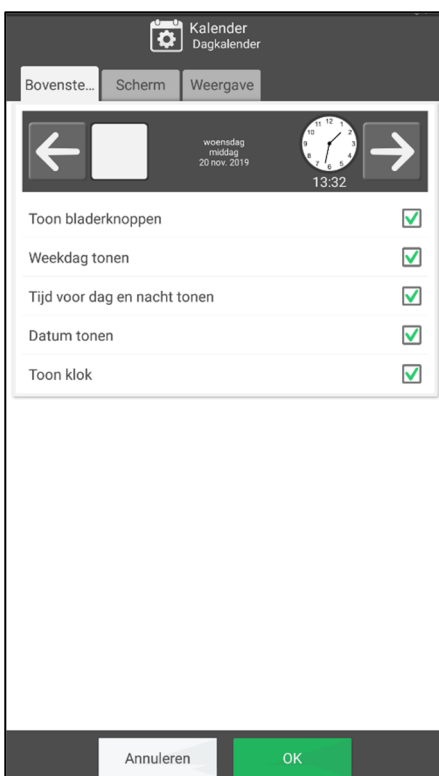


- *Bladerknoppen tonen.* Hiermee kunt u verder/terug in de tijd bladeren.
- *Weekdag tonen.* Hiermee kunt u maandag, dinsdag enzovoort tonen.
- *Tijd voor dag en nacht tonen.* Hiermee bepaalt u of de vroege ochtend, dag, avond en nacht moeten worden weergegeven.
- *Datum tonen.* Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) '26 februari 2016' moet worden weergegeven.
- *Klok tonen.* Hiermee bepaalt u of de klok moet worden weergegeven. In 4.1.1.1 Klok (en tijdlijn) leest u hoe u instelt hoe de klok wordt weergegeven.

Als u niets instelt voor het bovenste veld van de dagkalender, wordt het bovenste veld zowel in de dagkalender als in het menu verborgen.

4.1.2.2 Scherm

Hier stelt u de standaardinstellingen voor de dagkalender in.

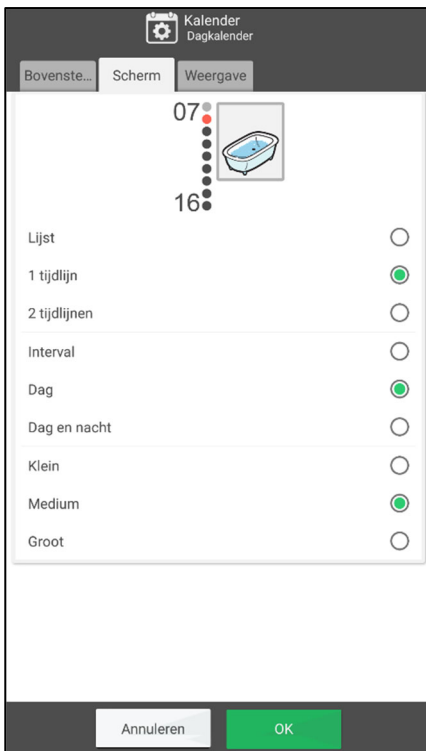


De standaardinstellingen kunnen worden bewerkt via het menu Scherm. Zie hoofdstuk 2.1.7 *Menu Scherm*. De standaardinstelling is daarom extra belangrijk voor gebruikers die geen toegang hebben tot het menu Scherm.

- *Schermsoort*. Lijst, 1 tijdlijn of 2 tijdlijnen.
- *De duur van de tijdlijn*.
 - *Interval*. Vroege ochtend, dag, avond en nacht zijn gescheiden.
 - *Dag*. De tijdlijn toont de ochtend, dag en avond. De nacht wordt afzonderlijk weergegeven.
 - *Dag en nacht*. De tijdlijn toont de hele dag van 24 uur.
- *Het zoomniveau van de tijdlijn*. Hoe groot de tijdlijn moet zijn. Mogelijk past niet alles op één pagina, waardoor u omhoog en omlaag moet vegen om alles te bekijken.

4.1.2.3 Weergave

Hier selecteert u welke functies beschikbaar zijn in het 2.1.7 *Menu Scherm*.

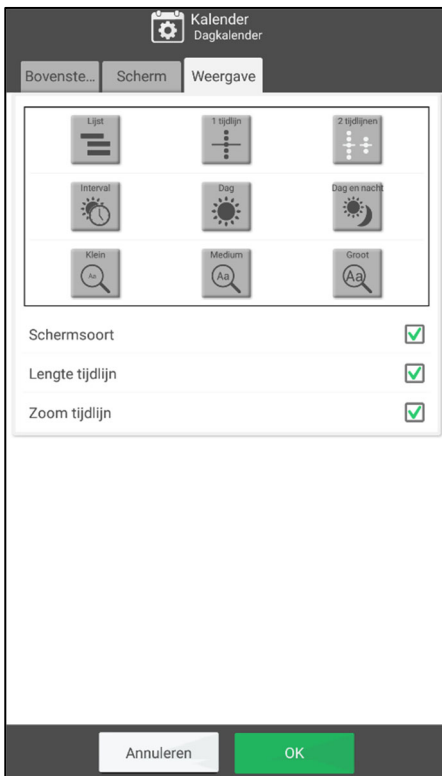

U kunt de volgende functies selecteren:

- *Schermsoort*.
- *Lengte tijdlijn*.
- *Zoom tijdlijn*.

Deze functies worden beschreven in hoofdstuk 4.1.2.2 *Scherm* hierboven.


Als er geen functies worden gekozen, wordt het menu Scherm verborgen in de dagkalender (er wordt geen 'oog' weergegeven).



4.1.3 Weekkalender

4.1.3.1 Bovenste veld


Hier kiest u wat in het bovenste veld van de weekkalender moet worden weergegeven.

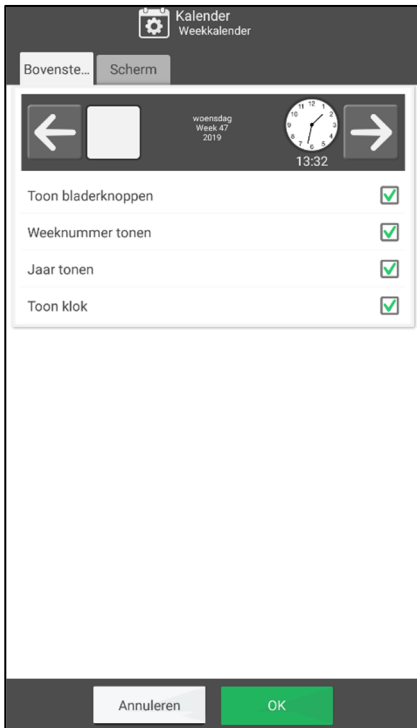

- *Bladerknoppen tonen.* Hiermee kunt u weken verder/terug in de tijd bladeren.
- *Weeknummer tonen.* Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) 'Week 8' moet worden weergegeven.
- *Jaar tonen.* Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) '2019' moet worden weergegeven.
- *Klok tonen.* Hiermee bepaalt u of de klok moet worden weergegeven. In 4.1.1.1 *Klok (en tijdlijn)* leest u hoe u instelt hoe de klok wordt weergegeven.

4.1.3.2 Scherm

Hier stelt u in hoe de weekkalender eruitziet.

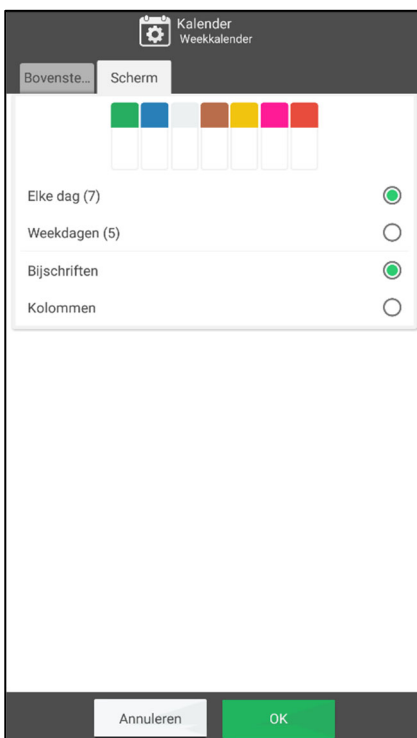

Kies welke dagen moeten worden weergegeven in de weekkalender:

Elke dag (7)
Maandag - zondag




Weekdagen (5)
Maandag - vrijdag




Kies hoe de dagkleuren moeten worden weergegeven in de weekkalender:

Bijschriften

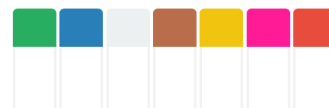

Kolommen

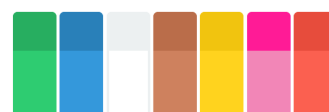


Als u dagkleuren wilt gebruiken, selecteert u deze optie in 4.1.1.3 *Dagkleuren*.

4.1.4 Maandkalender

4.1.4.1 Bovenste veld


Hier kiest u wat in het bovenste veld van de maandkalender moet worden weergegeven.

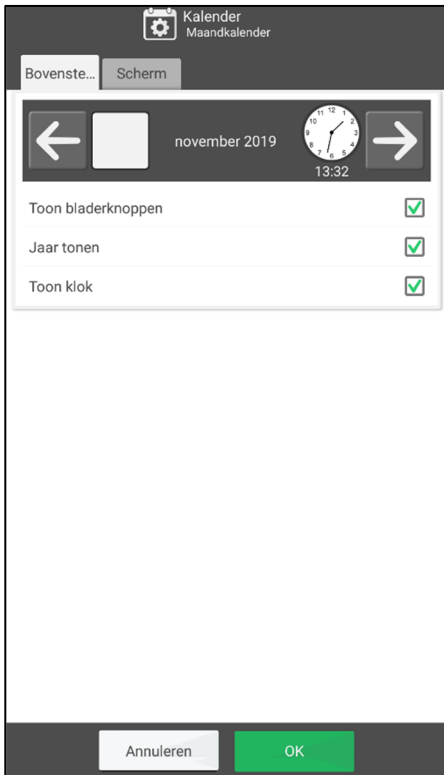


- *Bladerknoppen tonen.* Hiermee kunt u maanden verder/terug in de tijd bladeren.
- *Jaar tonen.* Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) '2019' moet worden weergegeven.
- *Klok tonen.* Hiermee bepaalt u of de klok moet worden weergegeven. In [4.1.1.1 Klok \(en tijdlijn\)](#) leest u hoe u instelt hoe de klok wordt weergegeven.

4.1.4.2 Scherm

Hier stelt u in hoe de maandkalender eruitziet.

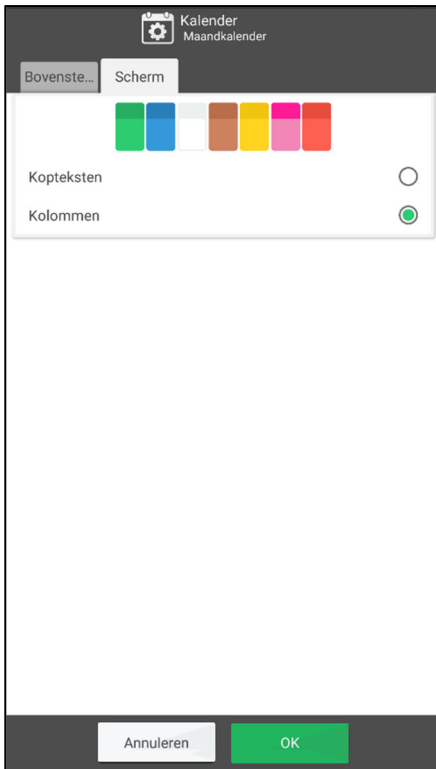


Kies hoe de dagkleuren moeten worden weergegeven in de maandkalender:

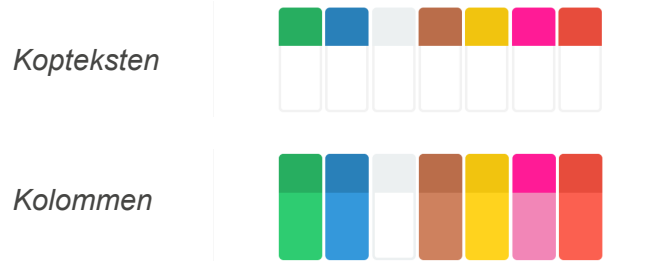

Als u dagkleuren wilt gebruiken, selecteert u deze optie in 4.1.1.3 Dagkleuren.

4.1.5 Activiteitsweergave

Hier stelt u in hoe de activiteitsweergave eruitziet.

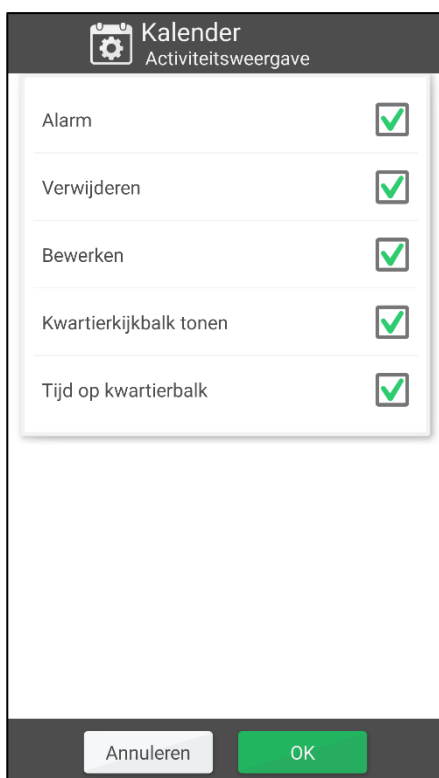


- **Alarm.** Hiermee stelt u in of er een knop moet worden getoond waarmee u het type alarm voor de activiteit kunt wijzigen.
- **Verwijderen.** Hiermee stelt u in of er een knop moet worden getoond waarmee u activiteiten kunt verwijderen.
- **Bewerken.** Hiermee stelt u in of er een knop moet worden getoond waarmee u activiteiten kunt bewerken.
- **Kwartierkijkbalk tonen.** Hiermee stelt u in of het kwartierhorloge moet worden getoond in de activiteiten van de dag.
- **Tijd op kwartierbalk.** Hiermee stelt u in of de resterende tijd tot het begin of eind van een activiteit digitaal moet worden weergegeven.

4.1.6 Een activiteit toevoegen

De instellingen voor het toevoegen van activiteiten zijn verspreid over drie tabbladen.

4.1.6.1 Algemeen

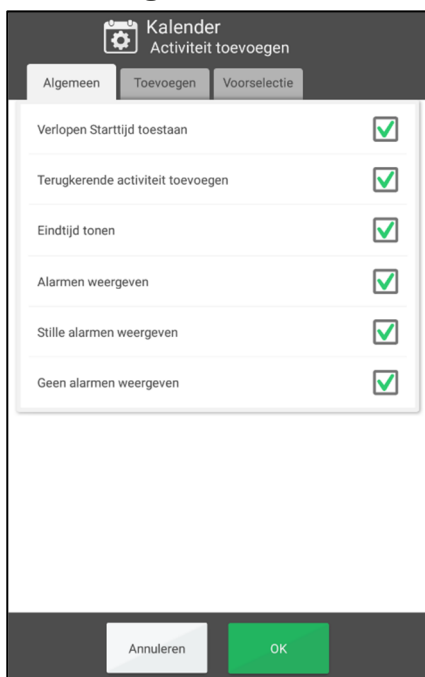


- **Verlopen starttijd toestaan.** Kies deze optie als u een activiteit wilt toevoegen op een tijdstip dat al is geweest, bijvoorbeeld eerder op de dag of gisteren.
- **Terugkerende activiteit toevoegen.** Kies deze optie als u activiteiten wilt toevoegen die wekelijks, maandelijks of jaarlijks worden herhaald. Zo niet, dan wordt de weergave 'Terugkerend' niet weergegeven wanneer u de activiteit toevoegt.
- **Eindtijd tonen.** Kies deze optie als u bij de tijdselectie een eindtijd wilt weergeven wanneer u een nieuwe activiteit toevoegt.
- **Keuze van alarm.** Kies welke keuzes voor alarmen worden getoond bij het toevoegen of bewerken van de activiteit. Zie hoofdstuk 2.4.2 *Het alarm van de activiteit wijzigen*. Als geen van de keuzes wordt geselecteerd, wordt er geen knop *Alarm* getoond in de activiteitsweergave.

4.1.6.2 Activiteit toevoegen

Hoe het instellingenvenster eruitziet, hangt af van of u 'Toevoegen via bewerkweergave' of 'Stap voor stap toevoegen' hebt geselecteerd.

Toevoegen via bewerkweergave

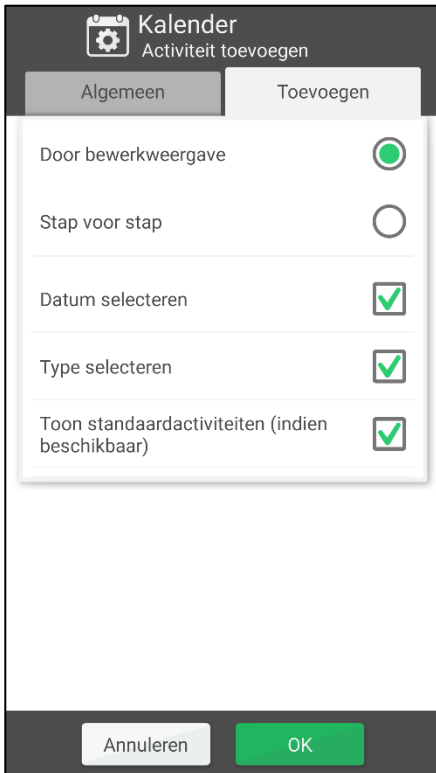


Selecteer 'Door bewerkweergave' bovenaan.

- *Datum selecteren.* Kies deze optie als u een datum voor de activiteit wilt selecteren.
- *Type selecteren.* Kies deze optie als u een activiteit voor de hele dag of een activiteit links/rechts wilt selecteren.
- *Standaardactiviteiten tonen.* Kies deze optie als u wilt kiezen tussen een nieuwe activiteit maken en een standaardactiviteit als sjabloon gebruiken. Zie hoofdstuk 2.6.1.1 *Nieuw of Uit standaardactiviteit selecteren.*
- *Contact maken met Skype-contact.* Kies deze optie als u een Skype-contact wilt kunnen toevoegen aan de extra informatie van een activiteit. (Wordt alleen weergegeven als Skype is geïnstalleerd.)

Zie hoofdstuk 2.6.1 *Een activiteit toevoegen via de bewerkweergave.*

Een activiteit stapsgewijs toevoegen

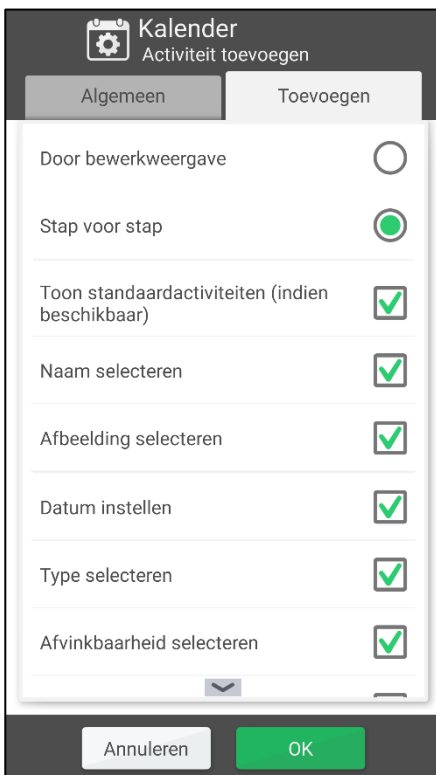


Selecteer 'Stap voor stap' bovenaan.

- *Toon standaardactiviteiten.* Kies deze optie als u wilt kiezen tussen een nieuwe activiteit maken en een standaardactiviteit als sjabloon gebruiken.
- Kies welke stappen u wilt opnemen:
 - *Toon standaardactiviteiten (indien beschikbaar)*
 - *Naam selecteren*
 - *Afbeelding selecteren*
 - *Contact maken met Skype-contact (alleen zichtbaar als Skype is geïnstalleerd)*
 - *Datum instellen*
 - *Type selecteren*
 - *Afvinkbaarheid selecteren*
 - *Selecteer beschikbaar voor*
 - *Wissen na selecteren*
 - *Alarmen selecteren*
 - *Checklist selecteren*
 - *Notitie selecteren*
 - *Herinnering selecteren*

Zie hoofdstuk 2.6.2 *Stapsgewijs een activiteit toevoegen*.


4.1.6.3 Voorselectie

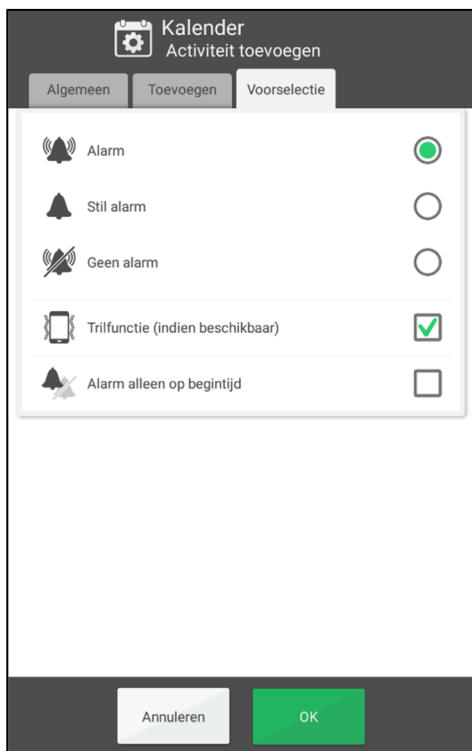

Instellingen voor welk alarm en welke instellingen bij het aanmaken van een activiteit moeten zijn ingesteld.



4.1.7 Alarminstellingen

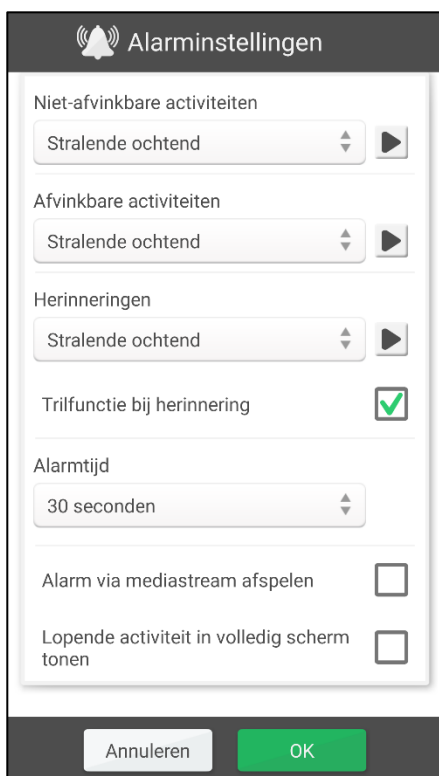Hier kunt u voor verschillende typen activiteiten alarmgeluiden selecteren en opgeven hoe lang het alarm moet klinken voordat eventuele gesproken berichten worden afgespeeld.



Voor de volgende activiteiten kunt u alarmgeluiden kiezen uit de ingebouwde signalen van het apparaat:


- *Niet-afvinkbare activiteiten*
- *Afvinkbare activiteiten*
- *Herinneringen*
- *Alarmtijd.* (Signaal, 15 s., 30 s., 1 min., 2 min., 5 min.) Deze instelling bepaalt hoe lang het alarm klinkt zolang het niet actief wordt uitgeschakeld.
- *Trilfunctie bij herinnering.* Deze optie is alleen mogelijk als het apparaat een trilfunctie heeft.
- *Alarm via mediastream afspelen.* Selecteer dit alternatief als u externe bedrade luidsprekers wilt gebruiken. Het alarm wordt dan door zowel het apparaat als de luidsprekers afgespeeld. Selecteer dit alternatief niet als u externe draadloze luidsprekers gebruikt in de buurt van het apparaat, omdat ze dan een echo kunnen veroorzaken.
- *Lopende activiteit in volledig scherm tonen.* Als u meerdere activiteiten tegelijk heeft, worden ze onderin als miniaturen weergegeven.

-  Hiermee luistert u naar het geselecteerde alarmgeluid.
-  Hiermee schakelt u het afspelen uit.

4.2 Functies

4.2.1 Werkbalk


Hier kiest u welke functies worden weergegeven onder aan de pagina van de dagkalender, de weekkalender, de maandkalender en het menu.

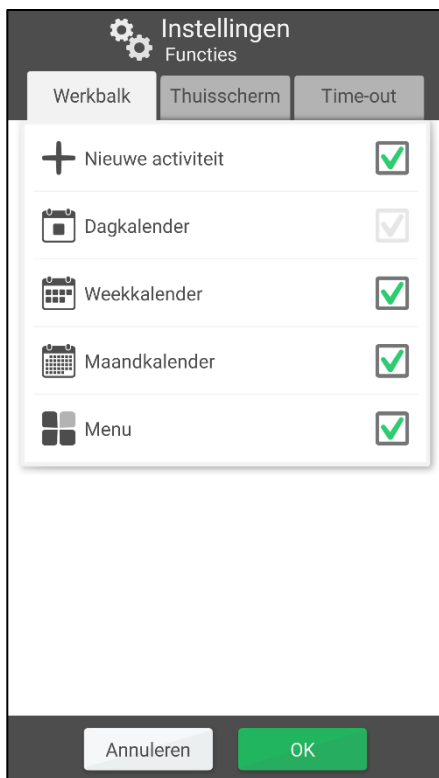

- *Nieuwe activiteit*
- *(Dagkalender moet altijd geselecteerd zijn)*
- *Weekkalender*
- *Maandkalender*
- *Menu*

4.2.2 Startpagina

Hier selecteert u welke functie in de onderste rij (zie hierboven) de startpagina is.

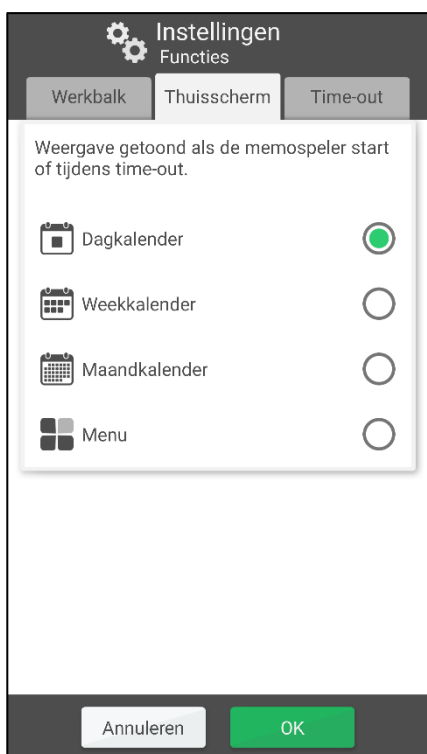


De startpagina is het venster dat wordt getoond wanneer MEMOplanner wordt gestart of wanneer u op de *startknop* drukt (mits MEMOplanner is gekozen als startscherm; zie het *Handboek*).

U kunt de volgende functies selecteren:

- Dagkalender
- Weekkalender
- Maandkalender
- Menu
- Fotokalender (alleen beschikbaar als is geselecteerd dat deze functie wordt weergegeven in het menu; zie hoofdstuk 4.4 Menu)

4.2.3 Time-out

Hier selecteert u of het programma na inactiviteit automatisch terugkeert na de startpagina.

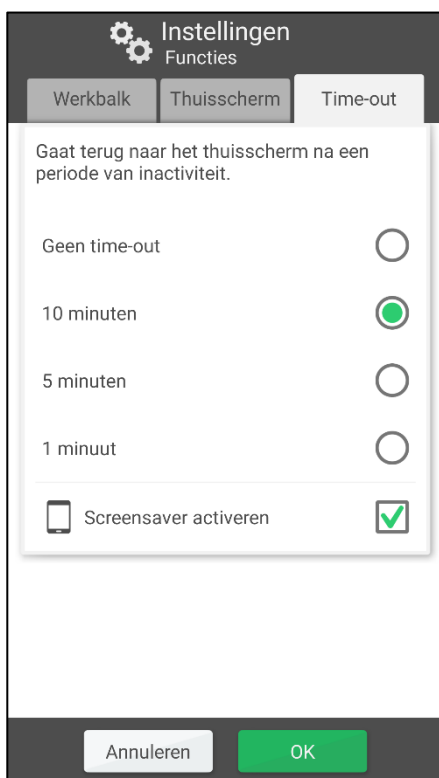


- Geen time-out
- 10 minuten
- 5 minuten
- 1 minuut

U kunt ook instellen of u een screensaver wilt gebruiken. Als 'Screensaver activeren' wordt geselecteerd, worden de datum en tijd na 1, 5 of 10 minuten getoond tegen een donkere achtergrond. Druk op het scherm om het scherm zonder screensaver te tonen.

4.3 Afbeeldingkiezer

Hier selecteert u welke afbeeldingsbronnen worden getoond wanneer u een afbeelding selecteert voor een activiteit, categorie of timer.

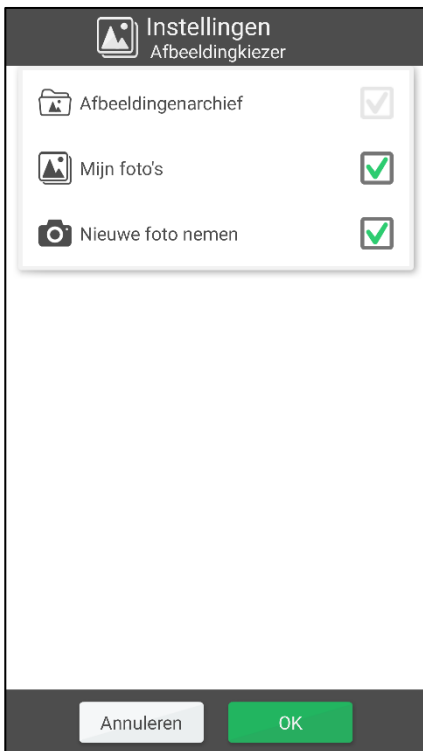


- Afbeeldingenarchief.
- Mijn foto's.
- Nieuwe foto nemen.

De afbeeldingkiezer wordt beschreven in hoofdstuk 2.10.2 *Afbeelding selecteren*.

Het is niet mogelijk het afbeeldingenarchief te bewerken in MEMOplanner. Dit kan alleen via *myAbilia*. Als u een afbeelding selecteert uit 'Mijn foto's', wordt deze automatisch aan het afbeeldingenarchief toegevoegd en gesynchroniseerd met *myAbilia*.

4.4 Menu

Hier selecteert u welke functies worden weergegeven in het **menu**.

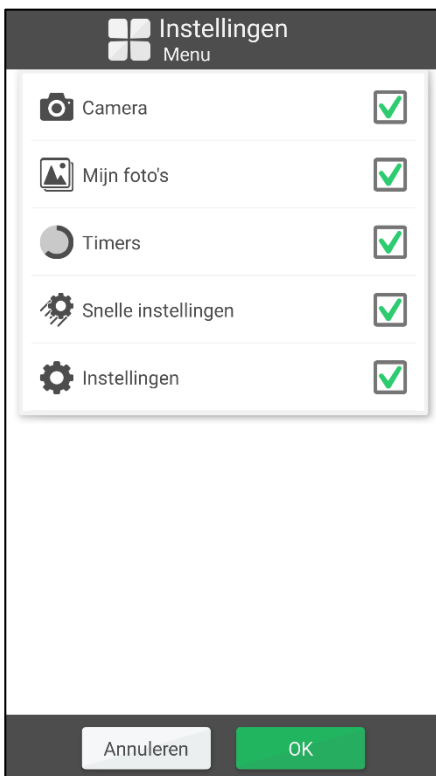

- *Camera*
- *Mijn foto's*
- *Fotokalender*
- *Timers*
- *Snelle instellingen*
- *Instellingen*
- *Videogesprek (Skype)*



Als er geen functies worden geselecteerd, wordt het menu niet getoond.

Instellingen kunnen ook worden geopend door als volgt te drukken op de categoriesymbolen in de dagkalender: links – rechts – links. Als deze ontbreken, drukt u op het desbetreffende oppervlak.

4.5 Timers

4.5.1 Algemeen


Hier kiest u hoe het aftellen wordt getoond en welk signaal wordt geactiveerd bij een alarm.

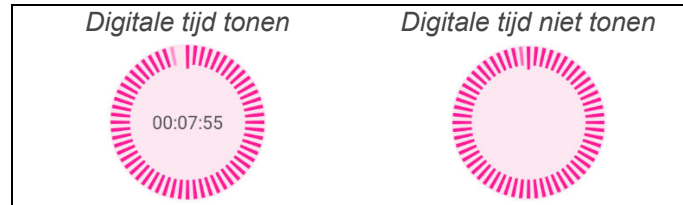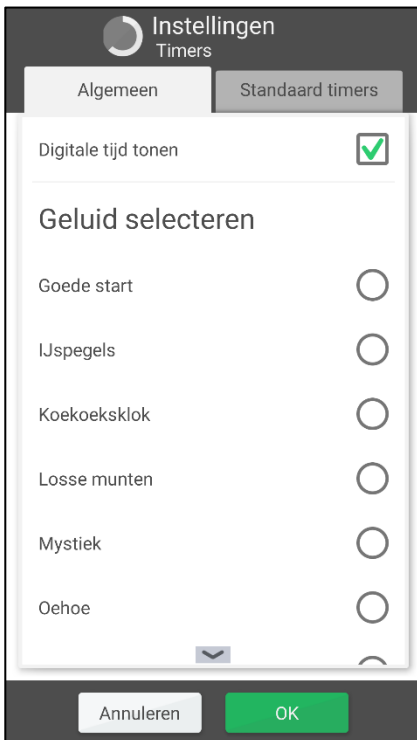


Hier selecteert u welk geluid wordt afgespeeld. De geluidssignalen zijn afhankelijk van het type apparaat. Het alarmgeluid wordt afgespeeld zodra u het selecteert. Druk opnieuw op het geselecteerde alarmgeluid om het afspelen te stoppen.

4.5.2 Standaardtimers

Hier kunt u standaardtimers bewerken die worden getoond wanneer aftellen wordt gestart. (Deze kunnen ook worden bewerkt via *myAbilia*.)

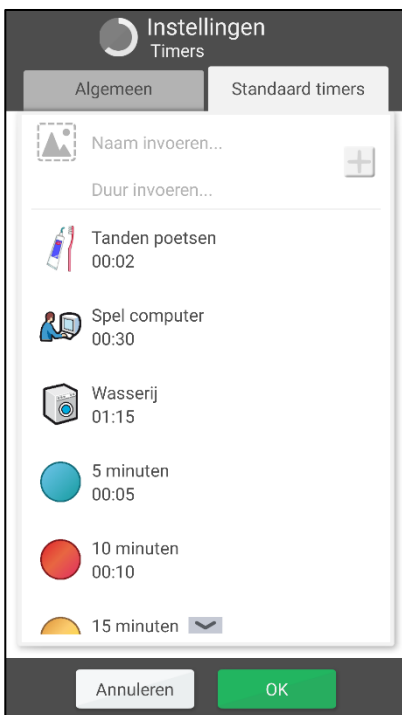

Een standaardtimer wordt gemaakt door in de invoerrij taken in te voeren:

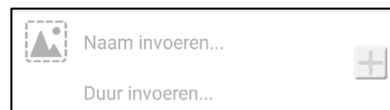

1. Selecteer een afbeelding door op het *afbeeldingenveld* te drukken. Vervolgens wordt de afbeeldingkiezer weergegeven.
2. Geef de timer een naam door te drukken op *Naam invoeren*. Het tekstinvoervenster wordt geopend.
3. Voer de tijd van de timer in door te drukken op *Duur invoeren*. Vervolgens wordt de tijdselectie weergegeven.
4. Druk op het *plusteken* om de standaardtimer aan de lijst toe te voegen.

Om de volgorde te wijzigen of een standaardtimer te bewerken of verwijderen, moet u de timer markeren en op de knop in dezelfde rij drukken:



4.6 Systeem

4.6.1 Codebescherming

Hier kiest u of het menu Instellingen van MEMOplanner moet worden beschermd met een code, en wat deze code dan moet zijn. Ook kunt u de instellingen van Android met een code beschermen.

Systeem
Codebescherming

Code: 0353

Codebeschermingsinstellingen

Deze weergave met code beschermen

Codebeschermingsinstellingen Android

Toegankelijkheidsinstellingen

Druk op de toegankelijkheidsknop hierboven en activeer de MEMOplanner-service om de instellingen met een code te kunnen beschermen.

Annuleren OK

De codebescherming verhindert dat gebruikers toegang hebben tot de instellingen en deze kunnen wijzigen.

Als u dit wilt activeren, moet u 'Codebeschermingsinstellingen' en 'Codebeschermingsinstellingen Android' aanvinken.


Wanneer u geen codebescherming voor de instellingen wilt gebruiken, adviseren wij 'Deze weergave met code beschermen' aan te vinken. Hierdoor kan de codebescherming alleen gewijzigd worden door degene die de code voor dit venster heeft. Hierdoor voorkomt u dat de codebescherming per ongeluk geactiveerd wordt.


Als u een andere code wilt gebruiken dan de oorspronkelijke code **0353**, drukt u op de knop met de code en voert u uw eigen code in.

Als u de instellingen van Android met een code wilt beschermen, drukt u op de knop *Toegankelijkheidsinstellingen* en activeert u de MEMOplanner-service.

4.6.2 Spraakondersteuning

Hier selecteert u of spraakondersteuning kan worden gebruikt. Hier kiest u ook de instellingen voor spraakondersteuning en kunt u stemmen downloaden.

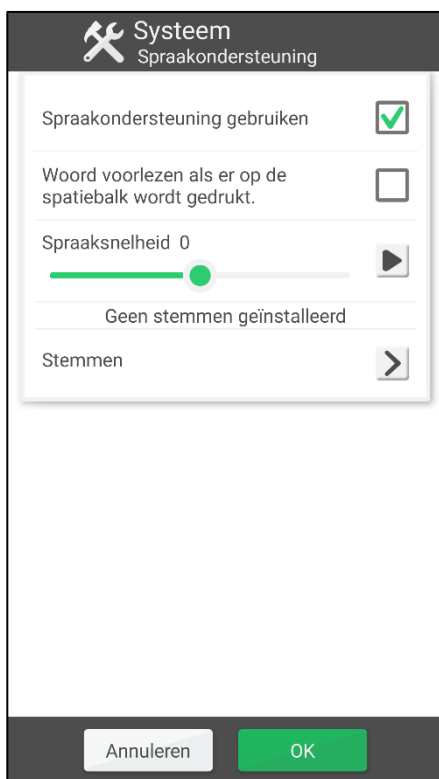


- *Spraakondersteuning gebruiken.* Hier stelt u in of spraakondersteuning moet worden ingeschakeld.
- *Woord voorlezen als er op de spatiebalk wordt gedrukt.* Hier stelt u in of woorden automatisch worden voorgelezen zonder dat de gebruiker op de knop *Spraakondersteuning* hoeft te drukken in het tekstinvoervenster.
- *Spraaksnelheid.* Hier stelt u in hoe snel de stem praat. Druk op  om naar de stem te luisteren.
- *Stem selecteren.* De geïnstalleerde stemmen worden in een lijst weergegeven. Elke stem heeft iemands naam, bijvoorbeeld 'Erik'.

Hieronder leest u hoe u nog meer stemmen downloadt.

Meer informatie over spraakondersteuning vindt u in hoofdstuk 1.3 *Spraakondersteuning in MEMOplanner.*


4.6.2.1 Stemmen downloaden

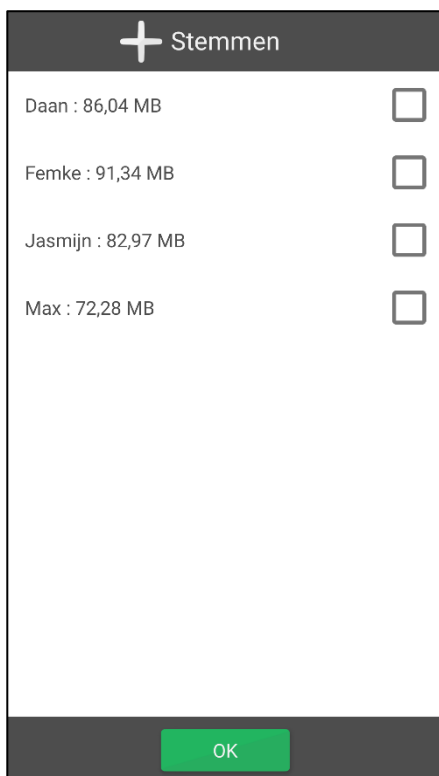

Hiervoor moet u een internetverbinding hebben.


Druk in dit venster op *Stemmen* om stemmen te downloaden.

De beschikbare stemmen worden in een lijst weergegeven. Selecteer de gewenste stemmen en druk op *OK*. Het downloaden begint.

Als u een gedownloade stem die u niet gebruikt wilt verwijderen (bijvoorbeeld om geheugencapaciteit van uw apparaat te besparen), drukt u op .

4.6.3 Toetsenbord

Hier stelt u de standaardinstellingen voor het toetsenbord in MEMOplanner in.

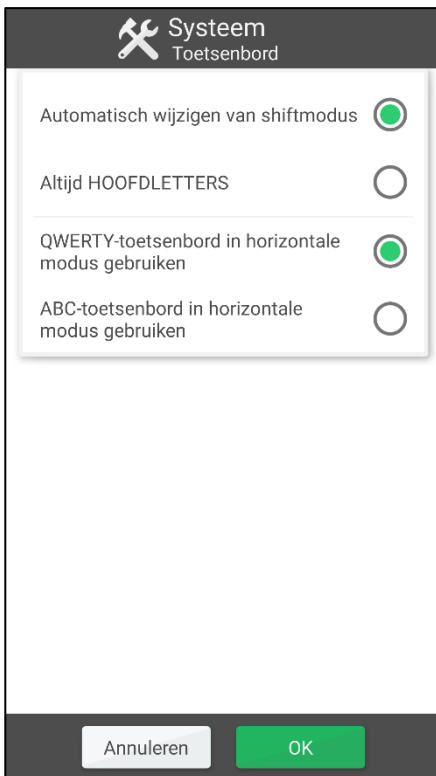

- *Automatisch wijzigen van shiftmodus.* Kies deze optie als de eerste letter automatisch een hoofdletter moet worden.
- *Altijd HOOFDLETTERS.* Kies deze optie als u alleen hoofdletters wilt gebruiken met het toetsenbord.
- *QWERTY-toetsenbord in horizontale modus gebruiken.* Kies deze optie als u een toetsenbord met QWERTY-volgorde wilt gebruiken wanneer u MEMOplanner horizontaal houdt.
- *ABC-toetsenbord in horizontale modus gebruiken.* Kies deze optie als u een toetsenbord met ABC-volgorde wilt gebruiken wanneer u MEMOplanner horizontaal houdt.

In staande stand heeft het MEMOplanner-toetsenbord altijd een ABC-volgorde.

In het *Handboek* wordt beschreven hoe u het MEMOplanner-toetsenbord selecteert en installeert.

4.6.4 Android-instellingen

Hier gaat u naar het instellingenvenster van uw Android-systeem. Deze instellingen worden beschreven in het *Handboek*.

4.6.5 Bestandsbeheer


Hier gaat u naar het bestandsbeheer van uw Android-systeem. Het bestandsbeheer wordt beschreven in het *Handboek*.

4.6.6 Skype updaten

Hier kunt u Skype installeren/updaten. Zie het *Handboek*.

4.6.7 Over MEMOplanner

Hier staat informatie over MEMOplanner en het apparaat waarop MEMOplanner is geïnstalleerd. U kunt u hier zoeken naar updates van het programma.

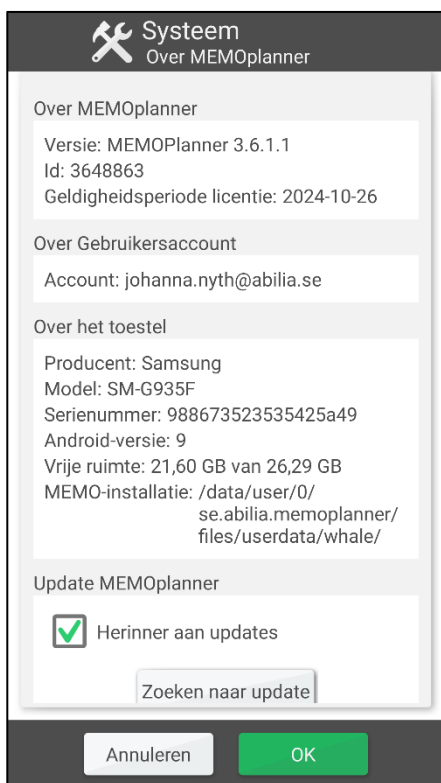

Over MEMOplanner


- *Versie.*
- *ID.* Een unieke identificatie van het apparaat die u soms nodig hebt als u contact opneemt met de helpdesk van Abilia.
- *Geldigheidsperiode licentie.* Geeft aan hoe lang de licentie voor MEMOplanner geldig is en hoe lang het programma nog werkt.

Over het apparaat

- *Producent.*
- *Model.*
- *Android-versie.*
- *Vrije ruimte.*
- *MEMO-installatie.*

In het *Handboek* leest u hoe u controleert op updates en deze installeert.


4.6.8 Logbestanden

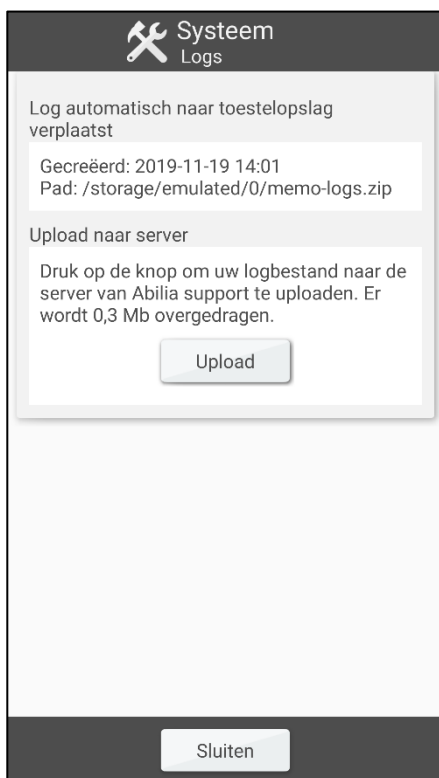

Hiervoor moet u een internetverbinding hebben.

Hier kunt u logbestanden naar Abilia versturen als u problemen ervaart met MEMOplanner.

4.6.9 Synchronisatie

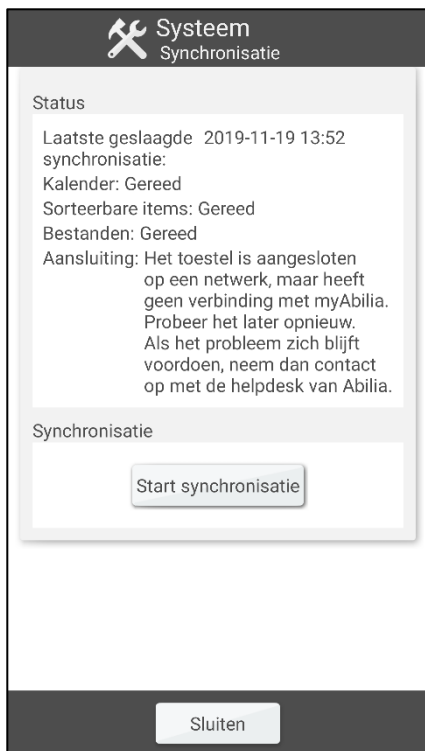


Hiervoor moet u een internetverbinding hebben.

Hier ziet u de status van de synchronisatie met myAbilia. Wanneer u op *Start synchronisatie* drukt, controleert MEMOplanner of de informatie in myAbilia is gesynchroniseerd met MEMOplanner.

4.6.10 Inloggen

Afhankelijk van of u bent ingelogd bij MEMOplanner, logt u hier in of uit.

4.6.10.1 Inloggen

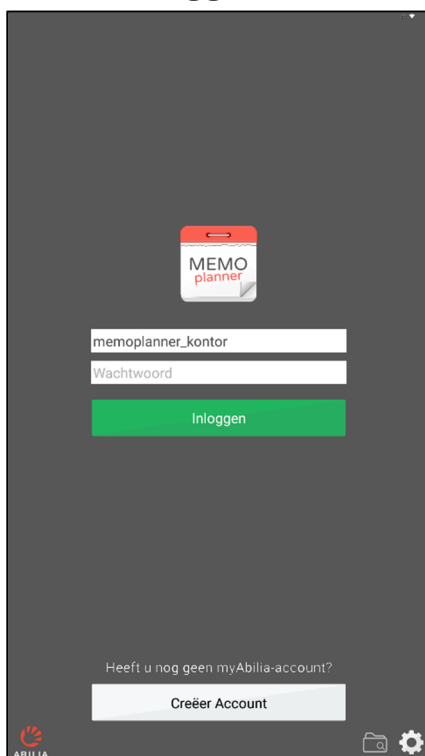

U heeft een myAbilia-gebruikersaccount en een internetverbinding nodig om in te loggen.

Wanneer u inlogt met een **nieuw gebruikersaccount**, wordt een starterset met afbeeldingen, standaardactiviteiten en standaardtimers toegevoegd aan de app.

Wanneer u inlogt met een **oud gebruikersaccount**, worden activiteiten, afbeeldingen enzovoort gedownload van *myAbilia*.

Op deze pagina kunt u ook een nieuw gebruikersaccount maken.

4.6.10.2 Uitloggen



Wanneer u uitlogt worden alle gebruikersgegevens gewist uit MEMOplanner: activiteiten, standaardactiviteiten, standaardtimers en afbeeldingen.

5. Standaardinstellingen van MEMOplanner

Wanneer u MEMOplanner voor de eerste keer start, wordt de standaardinstelling gebruikt. De standaardinstelling is een handig startpunt, maar de instellingen moeten altijd worden aangepast aan het individu. Hieronder wordt uitgelegd wat de standaardinstelling inhoudt.

MEMOplanner				Status
Kalender	Algemeen	Klok	Analoog+digitaal	<input checked="" type="radio"/>
			Analoog	<input type="radio"/>
			Digitaal	<input type="radio"/>
		Tijdlijn 12/24	12 uur	<input type="radio"/>
			24 uur	<input checked="" type="radio"/>
		Stippen op de tijdlijn	Eén stip	<input checked="" type="radio"/>
			Kolom van stippen	<input type="radio"/>
			Lijn door huidige tijd	<input checked="" type="checkbox"/>
			Lijnen voor elk uur	<input type="checkbox"/>
		Intervallen	Vroege ochtend	6:00
			Dag	10:00
			Avond	18:00
			Nacht	23:00
		Dagkleuren	Alle dagen	<input type="radio"/>
			Zaterdag en zondag	<input checked="" type="radio"/>
			Geen dagkleuren	<input type="radio"/>
		Categorieën	Categorieën tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Naam links	Links
			Naam rechts	Rechts
			Kleuren tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dagkalender	Bovenste veld	Bladerknoppen tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Weekdag tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tijd voor dag en nacht tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Datum tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Klok tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
		Scherm	Lijst	<input type="radio"/>
			1 tijdlijn	<input checked="" type="radio"/>
			2 tijdlijnen	<input type="radio"/>
		Lengte tijdlijn	Interval	<input type="radio"/>
			Dag	<input checked="" type="radio"/>
			Dag en nacht	<input type="radio"/>
		Zoom tijdlijn	Klein	<input type="radio"/>
			Medium	<input checked="" type="radio"/>
			Groot	<input type="radio"/>
		Weergave	Schermsort	<input checked="" type="checkbox"/>
			Lengte tijdlijn	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zoom tijdlijn	<input checked="" type="checkbox"/>
	Weekkalender	Bovenste veld	Bladerknoppen tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Weeknummer tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Jaar tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Klok tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
		Scherm	Elke dag (7)	<input checked="" type="radio"/>

			Weekdagen (5)	<input type="radio"/>
		Dagkleuren weergeven	Bijschriften	<input type="radio"/>
			Kolommen	<input checked="" type="radio"/>
	Maandkalender	Bovenste veld	Bladerknoppen tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Jaar tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Klok tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
		Schermbalk	Kopteksten	<input type="radio"/>
			Kolommen	<input checked="" type="radio"/>
	Activiteitsweergave	Werkbalk	Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>
			Verwijderen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>
		Kwartierhorloge	Kwartierhorloge tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tijd op kwartierhorloge	<input checked="" type="checkbox"/>
	Activiteit toevoegen	Algemeen	Verlopen begintijd toestaan	<input checked="" type="checkbox"/>
			Terugkerende activiteit toevoegen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Eindtijd tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Alarm weergeven	<input checked="" type="checkbox"/>
			Stille alarmen weergeven	<input checked="" type="checkbox"/>
			Geen alarmen weergeven	<input checked="" type="checkbox"/>
		Toevoegen	Via bewerkweergave	<input checked="" type="radio"/>
			Stap voor stap	<input type="radio"/>
		Via bewerkweergave	Datum selecteren	<input checked="" type="checkbox"/>
			Type selecteren	<input checked="" type="checkbox"/>
			Standaardactiviteiten tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Contact maken met Skype-contact	<input type="checkbox"/>
		Stap voor stap	Toon standaardactiviteiten tonen (indien beschikbaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
			Naam selecteren	<input checked="" type="checkbox"/>
			Afbeelding selecteren	<input checked="" type="checkbox"/>
			Contact maken met Skype-contact	<input type="checkbox"/>
			Datum instellen	<input type="checkbox"/>
			Type selecteren	<input type="checkbox"/>
			Afvinkbaarheid selecteren	<input checked="" type="checkbox"/>
			Selecteer beschikbaar voor	<input checked="" type="checkbox"/>
			Wissen na selecteren	<input type="checkbox"/>
			Alarm selecteren	<input type="checkbox"/>
			Checklist selecteren	<input type="checkbox"/>
			Notitie selecteren	<input type="checkbox"/>
			Herinnering selecteren	<input type="checkbox"/>

		Voorselectie	Alarm	<input checked="" type="radio"/>
			Stil alarm	<input type="radio"/>
			Geen alarm	<input type="radio"/>
			Trilfunctie (indien beschikbaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
			Alarm alleen op begintijd	<input type="checkbox"/>
	Alarminstellingen	Alarmgeluid	Niet-afvinkbare activiteiten	Standaard
			Afvinkbare activiteiten	Standaard
			Herinneringen	Standaard
		Alarmtijd	Signaal	
			15 seconden	
			30 seconden	<input checked="" type="radio"/>
			1 minuut	
			2 minuten	
			5 minuten	
		Herinneringen	Trilfunctie bij herinnering	<input checked="" type="checkbox"/>
		(Niet alle apparaten hebben een trilfunctie)		
		Alarm via mediastream afspelen		<input type="checkbox"/>
		Lopende activiteit in volledig scherm tonen		<input type="checkbox"/>
Functies	Werkbalk		Nieuwe activiteit	<input checked="" type="checkbox"/>
			Dagkalender	<input checked="" type="checkbox"/>
			Weekkalender	<input checked="" type="checkbox"/>
			Maandkalender	<input checked="" type="checkbox"/>
			Menu	<input checked="" type="checkbox"/>
	Startscherm		Dagkalender	<input checked="" type="radio"/>
			Weekkalender	<input type="radio"/>
			Maandkalender	<input type="radio"/>
			Menu	<input type="radio"/>
			Fotokalender	<input type="radio"/>
	Time-out		Geen time-out	<input checked="" type="radio"/>
			10 minuten	<input type="radio"/>
			5 minuten	<input type="radio"/>
			1 minuut	<input type="radio"/>
			Screensaver activeren	<input type="checkbox"/>
Afbeeldingkiezer			Afbeeldingenarchief	<input checked="" type="checkbox"/>
			Mijn foto's	<input checked="" type="checkbox"/>
			Nieuwe foto nemen	<input checked="" type="checkbox"/>
Menu			Camera	<input checked="" type="checkbox"/>
			Mijn foto's	<input checked="" type="checkbox"/>
			Fotokalender	<input checked="" type="checkbox"/>
			Aftellen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Snel-instellingen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Videogesprek (Skype)	<input type="checkbox"/>

Aftellen	Algemeen		Digitale tijd tonen	<input checked="" type="checkbox"/>
			Geluid selecteren	Standaard
	Standaardtimers		Lijst met standaardtimers	
Systeem	Codebescherming	Codebeschermingsinstellingen		<input type="checkbox"/>
		Deze weergave met code beschermen		<input type="checkbox"/>
		Codebeschermingsinstellingen Android		<input type="checkbox"/>
	Spraakondersteuning		Spraakondersteuning gebruiken	<input type="checkbox"/>
			Woord voorlezen als er op de spatiebalk wordt gedrukt	<input type="checkbox"/>
			Spraaksnelheid	0
	Toetsenbord		Automatisch wijzigen van shiftmodus	<input checked="" type="radio"/>
			Altijd HOOFDLETTERS	<input type="radio"/>
			QWERTY-toetsenbord in horizontale modus gebruiken	<input checked="" type="radio"/>
			ABC-toetsenbord in horizontale modus gebruiken	<input type="radio"/>

Contactgegevens

Zweden

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Zweden
Telefoon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Noorwegen

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Noorwegen
Telefoon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Verenigd Koninkrijk

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationaal

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

4628XX_Handledning_MEMOplanner_NLJanuary 2022

